

Návod k použití
2015-03-10

Ochrana pat Molly
Úleva pro paty

Návod k použití, katalogové číslo: 95-001375



7 331345 044873



Obsah

Důležitá bezpečnostní opatření	2
Úvod	3
Volba velikostí a použití	4
Čištění	5
Další informace	6

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím si přečtěte celý návod.

VÝSTRAHA!

- Ochrana Molly je pomůcka a vyžaduje každodenní kontrolu.
- Ochrana Molly je dostupná v různých velikostech a pečlivá volba správné velikosti je velmi důležitá.
- Vždy doporučujeme mezi pokožku a ochranu Molly vkládat gázové bandáže.
- Ochrana Molly musí být volně upevněna okolo nohy a vždy se musí volně otáčet.
- V případě kontaktu s otevřeným ohněm nebo horkými předměty, například plameny, zapálenou cigaretou nebo horkou žárovkou, může dojít k poškození výrobku a narušení jeho funkce.

1 Úvod



Před použitím si vždy přečtěte návod k použití.

1.1 Obecné informace

Tento výrobek je zdravotnický prostředek vyhovující požadavkům směrnice MDD 93/42/EEC. Podle zákonných předpisů pro zdravotnické prostředky je výrobce povinen nahlásit všechny nehody nebo události týkající se těchto výrobků. Budeme velice vděční za všechny údaje o nehodách a událostech týkajících se našich výrobků a za jejich okamžité nahlášení společnosti Care of Sweden.

1.2 Zamýšlené použití

Tento výrobek je ochranou paty, navržený k zajištění úlevy pro paty.

Snadno se používá a zajišťuje vysokou míru pohodlí při současném ošetření stávajících zranění paty a zabránění novým. Při použití ochrany paty Molly je stále možné volně pohybovat nohou a měnit polohu. Ochrana přitom pomáhá zlepšovat krevní oběh a proces hojení. Tento výrobek je možné také používat jako zabránu proti kříženo nohou po chirurgickém zákroku na kyčlích.

1.3 Popis výrobku

Výrobek je opatřen jádrem z viskoelastické pěny a hygienickým obalem. Obal je odolný proti pronikání vody, ale umožňuje průchod par, je snímatelný a omyvatelný.

Jádro: 100% viskoelastická pěna (tzv. pěna s pamětí)

Obal: Polyuretanem potažený polyester

Splňujte příslušné součásti následujících norem. SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952, EN 14126.

Záruka: 1 rok

1.4 Další informace

Akční plán proti proleženinám

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku pro tento výrobek, je doporučeno vytvořit dobře naplánované a dobře strukturované pracovní prostředí. V našem návodu „Akční plán“ najdete příklady, které lze při používání našich výrobků aplikovat a zavést do praxe.

Průvodce matracemi

Tento praktický návod vám jako poskytovateli péče pomůže při výběru správné matrace ze sortimentu společnosti Care of Sweden. Tyto informace lze nalézt na našich webových stránkách www.careofsweden.com, nebo si je můžete objednat přes naše zákaznické služby tak, že pošlete své údaje na info@careofsweden.se.

1.5 Rozbalení

Začněte kontrolou, zda není poškozen obal. Zjistíte-li poškození, obraťte se před zahájením používání výrobku na dodavatele.

2 Volba velikostí a použití

POZNÁMKA:

Ochrana Molly je dostupná v různých velikostech. Výběr správné velikosti výrobku je velmi důležitý pro jeho správnou funkci.

- Umístěte ochranu pat velikost M na nohu. Vždy mezi pokožku a ochranu Molly vložte gázovou bandáž.
- Ochrana Molly se vyrábí z viskoelastické pěny, což znamená, že bude trvat asi 15-20 minut, dokud se pěna nepřizpůsobí zatížení a bude možné rozhodnout, zda má správnou velikost.
- Zkontrolujte vzdálenost mezi patou a matrací, měla by být asi 2 cm.
- Pokud je vzdálenost větší než 2 cm, změňte velikost na S. Pokud je vzdálenost menší než 2 cm, změňte velikost na L.

Je také možné změřit nohu uživatele a rozhodnou o správné velikosti.

Délka nohy: 78,0 - 85,0 cm – velikost SMALL

Délka nohy: 86,0 - 94,5 cm – velikost MEDIUM

Délka nohy: 102,0 - 103,0 cm – velikost LARGE

Délka nohy představuje vzdálenost mezi předním kyčelním hřebenem (spina iliaca anterior superior) a vnitřním kotníkem (medial malleoli).

POUŽITÍ

- Když leží uživatel na boku, ochrana Molly by měla být otočena tak, aby otvor směřoval k matraci a výška byla nastavena správně.
- Chcete-li zabránit křížení nohou, ochranu Molly byste měli uložit na zdravou nohu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Ochrana Molly musí být volně upevněna okolo nohy a vždy se musí volně otáčet. Vždy doporučujeme mezi pokožku a ochranu Molly vkládat gázové bandáže.

3 Čištění

Než začnete výrobek používat pro jiného uživatele, je důležité dodržet níže uvedené pokyny. Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc a pokyny odpovědného hygienika nebo na dodavatele.

HYGIENICKÝ OBAL



Obaly lze otřít slabým čisticím roztokem pro tento účel, například: alkohol s tenzidy nebo bez nich, 70% isopropanol, oxidační roztok nebo chlor o koncentraci maximálně 1 %. Skvrny od výkalů a krve je nutné ihned odstranit pomocí studené vody. Pečlivě dodržujte místní pokyny a pokyny k použití čisticího prostředku.



Obal lze prát na maximální teplotu 95 °C, sušit v sušičce nebo pověšením.



Čisticí prostředky na bázi chloru a fenolu mohou mít negativní dopad na polyuretanový povrch a nesmí se používat. Při použití chloru doporučujeme použít směs o maximální koncentraci 1 %.

PĚNOVÉ JÁDRO



Vyčistěte zasaženou oblast slabým čisticím roztokem pro tento účel, jako je: alkohol s tenzidy nebo bez nich, 70 % isopropanol, oxidační roztok nebo chlor o koncentraci maximálně 1 %.

Důkladně vytlačte ven vodu. Nechte pěnové jádro vyschnout v teple, v dobře větraném prostoru, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu světlu. Pěnové jádro musí být před dalším použitím úplně suché.

POZNÁMKA:

Při každém čištění výrobku zkontrolujte hygienický chránič. Poškozený chránič je potřeba vyměnit nebo opravit.

4 Další informace

4.1 Skladování

Vždy skladujte při pokojové teplotě v suchém prostředí. Při skladování nesmí být produkt vystaven úderům, nárazům ani jiným možnostem poškození. Výrobek nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu.

4.2 Označení štítky

Výrobek je označen názvem, datem výroby, číslem výrobku, velikostí, čárovým kódem EAN, pokyny pro ošetřování a praní a je na něm místo i pro vaše vlastní označení.

4.3 Záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka v trvání 1 roku. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Nevztahuje se na běžné opotřebení ani na poškození způsobená nevhodným zacházením s výrobkem a nesprávnou péčí.

4.4 Servis a údržba

Tento výrobek nevyžaduje kromě čištění popsaného v tomto návodu žádný jiný servis ani údržbu.

4.5 Předpokládaná životnost

Předpokládaná životnost tohoto výrobku je 2 roky.

4.6 Recyklace

Tyto výrobky jsou plně recyklovatelné a musí se recyklovat jako „hořlavý odpad“. Není potřeba je rozebírat.

4.7 Reklamacce a stížnosti

Stížnosti musí být oznámeny dodavateli. Při vracení výrobku postupuje podle pokynů dodavatele. Výrobek lze vrátit až po oznámení stížnosti. Poškození vinou přepravy by mělo být oznámeno dopravci.

4.8 Definice symbolů



Číslo výrobku



Výrobce

XXXX-XX-XX

Rok-Měsíc-Den



Přečtěte si návod k použití



Označení CE v souladu s
MDD 93/42/EEC



Recyklace



Praní v pračce při 95 °C



<1%
Chlor



Lze sušit v bubnové
sušičce



Nežehlivé



Nežehlit



Nečistit chemicky



Otřít



 **Care of Sweden**
Supporting Life

Kontakt:

Telefon: + 46 771 106600

Fax: + 46 325 12840

E-mail: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.com

Adresa:

Care of Sweden AB
P.O. Box 146
SE-514 23 Tranemo
ŠVÉDSKO

Adresa pro osobní styk:

Fabriksgatan 5A
SE-514 33 Tranemo
ŠVÉDSKO

Adresa místa nakládky:

Byns väg 4A
SE-514 33 Tranemo
ŠVÉDSKO

Dodavatel