



BIA110

BIA100

Čištění a desinfekce

K čištění plastových a kovových částí zařízení používejte vlhký hadřík a neutrální čisticí prostředek. Nepoužívejte výrobky, které mohou zařízení poškrábat.

VAROVÁNÍ!



K čištění lůžka nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, líh, čističe na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože mohou způsobit oděrky plastových dílů a rezivění kovových ploch.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím materiálů a prostředků, které mohou korodovat části výrobku či způsobovat korozi během čištění.

Podmínky likvidace

V případě likvidace zařízení nikdy nepoužívejte městský kontejner na odpad. Zařízení se doporučuje likvidovat prostřednictvím běžných komunálních ekologických sběrných dvorů.