



MOPEDIA®

PEDÁLOVÉ CVIČEBNÍ PŘÍSTROJE

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. KÓDY	STR. 3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STR. 3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	STR. 3
5. UPOZORNĚNÍ	STR. 4
5.2 Varování týkající se používání	STR. 4
6. POUŽITÉ SYMBOLY	STR. 4
7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	STR. 4
8. PŘEHLED DÍLŮ A MONTÁŽ	STR. 5
8.1 Pohled na součásti RP950	STR. 5
8.2 Pohled na díly RP951	STR. 6
8.3 Pohled na díly RP953	STR. 7
9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE	STR. 12
10. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (POUZE PRO RP951 RP958)	STR. 12
11. ÚDRŽBA	STR. 13
12. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE	STR. 14
12.1 Čištění.....	STR. 14
12.2 Dezinfekce.....	STR. 14
13. PODMÍNKY LIKVIDACE	STR. 14
14. ZÁRUKA.....	STR. 14
15. OPRAVY	STR. 14
15.1 Opravy v rámci záruky	STR. 14
15.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	STR. 14
15.3 Produkty bez závady	STR. 15
16. NÁHRADNÍ DÍLY	STR. 15
17. VYJÍMKY ODPOVĚDNOSTI	STR. 15

1. KÓDY

RP950 Aktivní mechanický pedálový trenažér

RP951 Aktivně-pasivní elektrický pedálový trenažér

RP953 Magnetický pedálový trenažér

RP955 Jednoduchý rotoped

RP958 Duální aktivně-pasivní elektrický pedálový trenažér

Poznámka: Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození žádné části výrobku. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na prodejce s žádostí o další pokyny.

VAROVÁNÍ!



- Produkt nepoužívejte k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití zařízení nebo jakéhokoli jiného použití, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provést změny na zařízení a v příslušném návodu za účelem zlepšení vlastností produktu.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Pedálové trenažéry Mopedia Crossy jsou zdravotnické prostředky pro vnitřní a profesionální použití, určené pro osoby s omezenou pohyblivostí a vhodné pro obnovení a udržení koordinace a svalů paží a nohou.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní vylučnou odpovědnost, že výrobky vyráběné a prodávané společností MORETTI SpA v produktové řadě REHABILITAČNÍ PEDÁLOVÉ CVIČEBNÍ PŘÍSTROJE jsou v souladu s platnými ustanoveními nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJÍCH.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA na vlastní vylučnou odpovědnost zaručuje a prohlašuje následující:

1. Uvedená zařízení splňují obecné požadavky na bezpečnost a výkonnost stanovené v příloze I nařízení (EU) 2017/745, jak je předepsáno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Uvedená zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Uvedená zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ VÝZKUMY.
4. Uvedená zařízení se prodávají v NESTERILNÍM balení.
5. Uvedená zařízení by měla být považována za zařízení třídy I v souladu s pravidly stanovenými v příloze VIII uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a poskytuje příslušným orgánům po dobu nejméně deseti let od data výroby poslední výrobní šarže technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením (EU) 2017/745.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, jedinečné registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité normy jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU, které společnost MORETTI SPA vydává a poskytuje prostřednictvím svých vlastních kanálů.

5. UPOZORNĚNÍ

- Vždy se poraďte se svým lékařem nebo terapeutem o správném používání zařízení.
- Balení produktu uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení závisí na opotřebení neopravitelných a/nebo nenahraditelných dílů a nepřesahuje 10 let.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakýkoli závažný incident, který se vyskytl v souvislosti se zařízením, výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.

VAROVÁNÍ!

Pro bezpečné používání pečlivě dodržujte níže uvedené pokyny:



- Zařízení musí mít po stranách alespoň 60 cm volného prostoru pro přístup do cvičební polohy.
- Vždy buďte velmi opatrní v přítomnosti pohyblivých částí, které by mohly zachytit končetiny a způsobit zranění.
- Nedovolte dětem přístup k zařízení bez dozoru.

5.2 Varování k použití

- Podpěrné základny musí být během používání vždy v kontaktu s rovným povrchem, aby byla zaručena správná rovnováha zařízení a maximální bezpečnost.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené. Nebezpečí úrazu!

- Neoprávněné úpravy pedálového trenažéru nebo použití neoriginálních náhradních dílů mohou změnit strukturu výrobku a vytvořit nebezpečné podmínky, které mohou způsobit vážné poškození a zrušit platnost záruky.
- Produkt je vystaven zvláštnímu namáhání, které závisí na kvalitě používání a hmotnosti uživatele. Proto doporučujeme každé 3 až 4 měsíce pravidelně kontrolovat, zda není poškozený, zejména pokud byl vystaven nárazům nebo nepřírozenému namáhání v důsledku používání.

UPOZORNĚNÍ!



Měli byste si být vědomi signálů, které vám vysílá vaše vlastní tělo. Nesprávná nebo nadměrná fyzická aktivita může být škodlivá pro vaše zdraví. Přestaňte cvičit, pokud se u vás objeví některý z následujících příznaků: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dušnost, závratě, točení hlavy nebo nevolnost. Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte lékařskou pomoc, než budete pokračovat v cvičebním programu.

6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečný identifikátor zařízení



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Varování



Datum výroby



Likvidace produktu podle směrnice ES/19/2012



Ochrana proti prachu a stříkající vodě



Použitá část typu B



Maximální nosnost

7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte opotřebení pohyblivých mechanických částí, abyste zajistili, že zařízení lze používat zcela bezpečně pro osoby i majetek.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení, zejména zajištění pedálů a jejich správné zasunutí.
- Vždy zkontrolujte, zda brzda pro nastavení intenzity zátěže funguje správně.
- Před použitím se ujistěte, že jsou šrouby zcela utažené.
- Umístěte výrobek tak, aby byl stabilní a stál na rovném povrchu, mimo dosah koberec nebo podobných předmětů.
- Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické součásti a napájecí kabely.
- Ujistěte se, že jste fyzicky schopni zařízení používat.
- Ujistěte se, že máte na sobě oblečení vhodné pro danou činnost.
- Vždy noste boty nebo ponožky vhodné pro cvičení nohou.



VAROVÁNÍ!

Před zahájením jakékoli rehabilitační terapie se vždy poraďte se svým lékařem nebo terapeutem.


UPOZORNĚNÍ!

Zařízení musí být pravidelně udržováno a denně kontrolováno, aby fungovalo správně. Doporučuje se okamžitě vyměnit opotřebované nebo poškozené díly, protože by mohly způsobit poškození pacienta. Je vhodné, aby odborník pacientovi ukázal, jak používat pedálový treňažer, a vyzval ho, aby pod jeho dohledem několikrát zopakoval nezbytné úkony. Pro správnou rehabilitaci je nutné udržovat správné držení těla. Před zahájením činnosti se poraďte se svým lékařem/terapeutem.



UPOZORNĚNÍ!


Nedodržení pokynů může způsobit zranění nebo vážné zdravotní problémy.

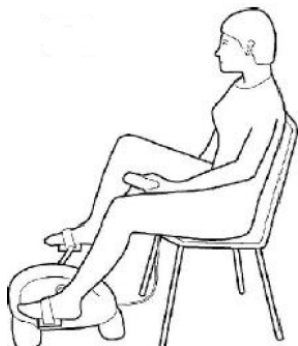

Poznámka: při používání nízkých pedálových cvičebních strojů RP950-RP951-RP953 se vždy ujistěte, že jste ve správné poloze, jak je znázorněno na obrázku vedle.

8. PŘEHLED ČÁSTÍ A MONTÁŽ

8.1 Pohled na součásti RP950

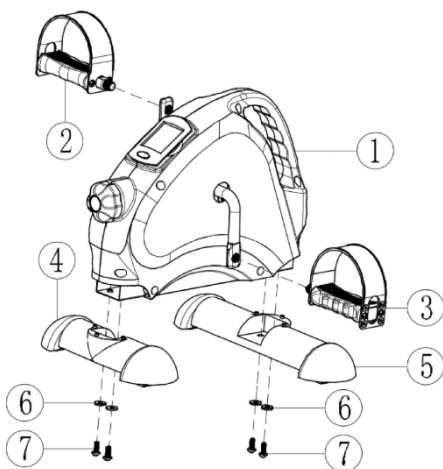

1. Základní konstrukce 1
2. Levý pedál 1
3. Pravý pedál 1
4. Přední základna 1
5. Zadní základna 1
6. Podložka 4
7. Šrouby 4
8. Příhrádka na baterie

Náradí: Imbusový klíč a šestihranný klíč jsou součástí balení

8.1.1 Montáž:


- Připevněte přední základnu (4) a zadní základnu (5) k základní konstrukci (1) pomocí šroubů a podložek (6).
- Ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Pedály a pedálové kliky jsou označeny písmenem „L“ pro levou stranu a „R“ pro pravou stranu.
- Připojte levý pedál (2) a pravý pedál (3) k odpovídajícím pedálovým klikám a ujistěte se, že značky na nich odpovídají.

8.12 Použití

- Umístěte pedálový trenážér na stabilní povrch s dobrým třením
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Cvičení provádějte na stabilní sedačce (židli nebo křesle) umístěné ve správné vzdálenosti od pedálového trenážéru, v případě potřeby použijte pro větší stabilitu dodaný pás.
- Nastavte intenzitu odporu.
- Vložte nohy do pedálů a začněte šlapat, postupně zvyšujte intenzitu až na požadovanou rychlost.

8.13 Funkce displeje

- Počítač má dvouřádkový displej, na kterém můžete zobrazit různé funkce.
- Rychlost se vždy zobrazuje v horním řádku.
- Na spodním řádku lze zobrazit různé funkce.
- Stisknutím oválného tlačítka pod displejem můžete přepínat mezi jednotlivými zobrazeními:

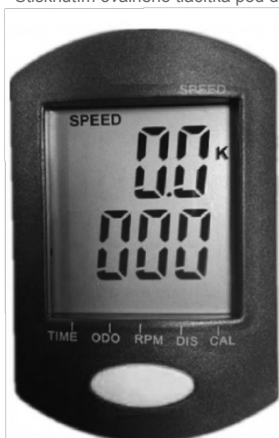

SCAN: každá funkce se zobrazí na několik sekund.

TIME: předchozí doba cvičení v minutách a sekundách (0:00 - 99:59).

ODO: Celková ujetá vzdálenost od posledního vložení baterie (0 - 9999,0).


BATTERY: (0 - 9999,0 km).

Poznámka: tato hodnota se vynuluje, když je vybitá baterie vyjmuta a nahrazena novou

RPM: Ukazuje rychlost otáčení za minutu (0 - 999). **DIST:** Ukazuje ujetou vzdálenost. (0,00 - 99,99 km) **CAL:** Ukazuje počet spálených kalorií

Podržte oválné tlačítko stisknuté po dobu přibližně tří sekund, aby se všechny hodnoty resetovaly na nulu (kromě ODO).

82 Pohled na součásti RP951

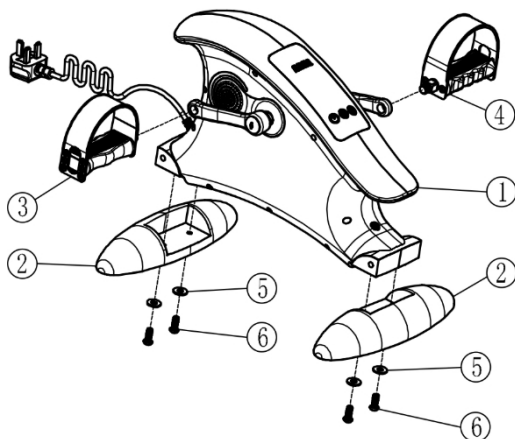

1. Základní konstrukce 1

2. Základny 2

3. Levý pedál 1

4. Právý pedál 1

5. Podložka 4

6. Šrouby 4

7. Dálkové ovládání:

1. Zvýšení rychlosti/odporu

2. Změna aktivního/pasivního režimu

3. Snížení rychlosti/odporu

4. Zapnutí/vypnutí

Nářadí: Imbusový klíč součástí balení

8.2.1 Montáž

- Sestavte základnu (2) na hlavní konstrukci pomocí šroubů a podložek (4) a (6).
- Pedály a pedálové kliky jsou označeny písmenem „L“ pro levou stranu a „R“ pro pravou stranu. Sestavte pravý pedál (4) a levý pedál (3) tak, aby se značky shodovaly.

8.2.2 Použití

- Umístěte pedálový trenážer na stabilní povrch s dobrým třením
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zasunut do zásuvky.
- Cvičení provádějte na stabilní židli (nebo křesle) umístěné ve správné vzdálenosti od pedálového trenážeru. Pro větší stabilitu použijte v případě potřeby dodaný bezpečnostní pás.
- Nastavte intenzitu odporu.
- Stiskněte tlačítko ON. Je zobrazeno na displeji ve StandBy režimu
- Stiskněte tlačítko M pro přechod do provozního režimu.
- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko M pro výběr pasivního režimu H001 nebo aktivního režimu A001
- Pasivní režim má 9 úrovní rychlosti, které lze nastavit tlačítkem vlevo
- Aktivní režim má 6 úrovní odporu, které lze nastavit tlačítkem vlevo
- Pomocí středového tlačítka můžete změnit směr jízdy.
- Po použití a před čištěním zařízení ihned odpojte ze zásuvky.




VAROVÁNÍ!

Odstraňte průhlednou plastovou záložku na boku dálkového ovladače, abyste jej mohli uvést do provozu.

Poznámka: Pokud uživatel vstane nebo úmyslně přidrží pedálový cvičební stroj, aby zabránil pohybu, přejde stroj do ochranného režimu a nebude fungovat, aby se zabránilo poškození způsobenému přetížením.

8.3 Pohled na jednotlivé části RP953

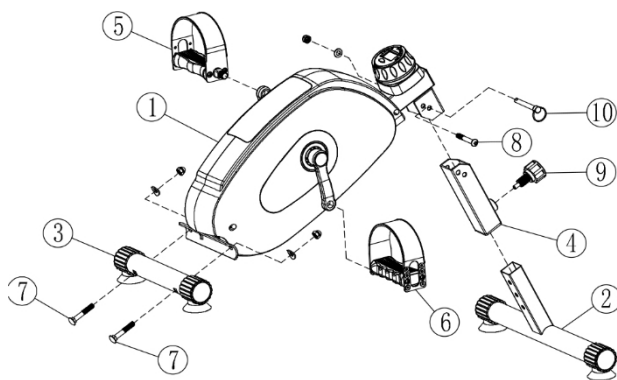

1. Základní konstrukce 1
2. Přední základna 1
3. Zadní základna 1
4. Spojovací trubka 1
5. Levý pedál 1
6. Pravý pedál 1
7. Šrouby základny 2
8. Šrouby trubky 1
9. Knoflík 1
10. Zajišťovací kolík
11. Příhrádka na baterie

Nástroje: Imbusový klíč a šestihranný klíč jsou součástí balení

8.3.1 Montáž:

- Sestavte zadní základnu N3 se základovou konstrukcí N1 pomocí šroubů N7.
- Sestavte spojovací trubku N4 se základovou konstrukcí N1.
- Pomocí šroubu N8 zajistěte pojistným kolíkem N10.
- Spojte přední základnu N2 se základovou konstrukcí pomocí knoflíku N9.
- Namontujte levý pedál N5 a pravý pedál N6 na základnu.

8.32 Použití

- Umístíte pedálový trenážer na stabilní povrch s dobrým třením.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Cvičení provádějte na stabilní židli (nebo křesle) umístěné ve správné vzdálenosti od pedálového cvičebního stroje. Pro větší stabilitu použijte v případě potřeby přiložený pás.
- Nastavte intenzitu odporu.
- Vložte nohy do pedálů a začněte šlapat, postupně zvyšujte intenzitu až na požadovanou rychlost

8.3.3 Funkce displeje

REŽIMY: Stisknutím tohoto tlačítka vyberete a uzamknete požadované funkce. Stisknutím tohoto tlačítka po dobu 4 sekund zrušíte všechny naměřené hodnoty.

TMR: Celkový čas šlapání

CNT: zobrazuje počet opakování

TOTC NT: Celkový počet opakování


CAL: Celkový počet spálených kalorií

TMR: Zobrazuje aktuální dobu pohybu, kterou lze měřit dopředu nebo jako odpočítávání (pokud je nastavena cílová hodnota, která může být odpočítáváním). Zobrazený čas: 00:00 – 99:59 minut: sekundy.

CTN: Zobrazuje počet opakování během cvičení (počítadlo 0~9999).

TOTCNT: Zobrazuje celkový počet opakování během cvičení (počítadlo 0~9999).

CAL: Zobrazuje počet kalorií spálených cvičením, když je nastavena cílová hodnota

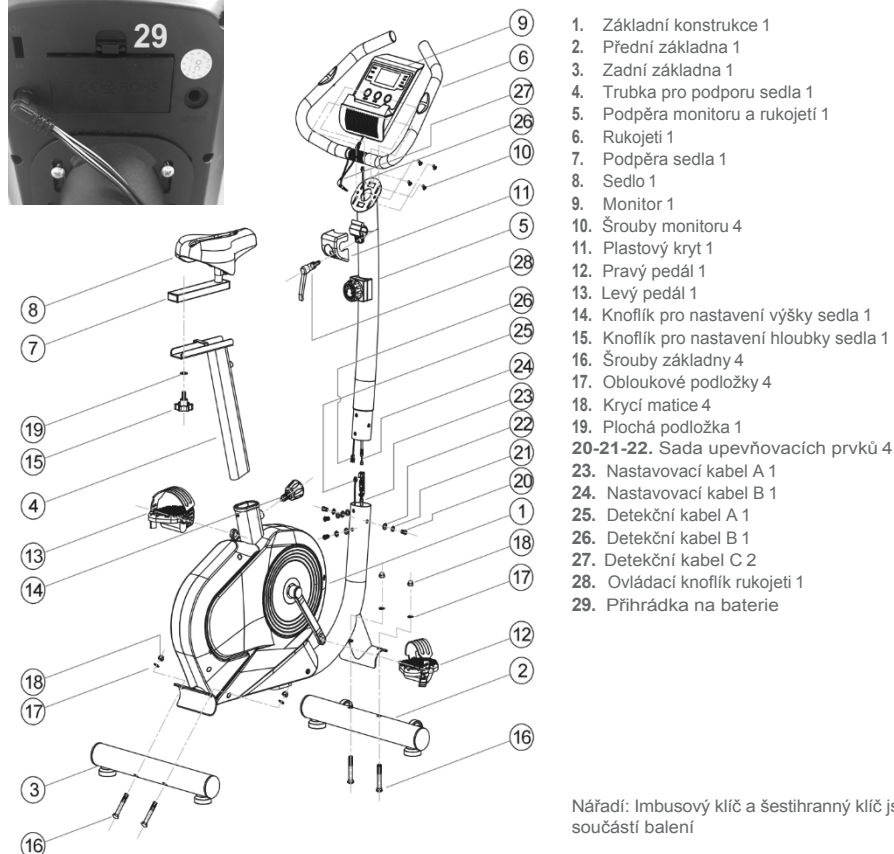

Nářadí: Imbusový klíč a šestihranný klíč jsou součástí balení

8.4.1 Montáž

1. Sestavte přední základnu (s kolečky) a zadní základnu (2 a 3) na základní konstrukci (1), připevněte k hlavnímu tělu (1) pomocí šroubů (16), zakřivených podložek (17) a krycích matic (18).
2. Namontujte pravý a levý pedál (12 a 13), označené R pro pravý a L pro levý, na základní konstrukci (1), poté utáhněte pravý pedál ve směru hodinových ručiček a levý pedál proti směru hodinových ručiček.
3. Umístěte nastavovací knoflík (14) do pouzdra, aniž byste jej zcela utáhli.
4. Vložte trubku pro uchycení sedla (4) do pouzdra, poté zvedněte knoflík a nechte trubku klouzat, dokud nezapadne na místo.
5. Umístěte sloupek pro uchycení monitoru a rukojeti (5) blízko trubky pro vývod kabelů na základové konstrukci a připojte kabely následujícím způsobem:
6. Nastavovací kabel A1 (23) s nastavovacím kabelem B1 (24).
7. Spojte detekční kabel A1 (25) s detekčním kabelem B2 (26).
8. Umístěte podpěrný sloupek (5) do otvoru na rámu základní konstrukce ve směru uvedeném na obrázku, vyrovnejte otvory a pevně jej připevněte pomocí sady pro připevnění podpěry (20+21+22).

Poznámka: Pro nastavení výšky sedlovky (4) nebo rukojeti (5) můžete vyjmout nastavovací knoflík (14).

9. Umístěte sedlo do držáku (4) a připevněte jej pomocí nastavovacího knoflíku (15) spolu s plochou podložkou (19).
10. Umístěte rukojeti (6) na místo instalace na sloupku, připevněte plastový kryt (11) a pomocí nastavovacího knoflíku rukojeti (28) celý systém pevně připevněte.
11. Připojte detekční vodič monitoru (9) k detekčnímu kabelu B (26) podle obrázku a poté zasuňte detekční kabel C (27) do konektoru detekčního kabelu na zadní straně monitoru.
12. Umístěte monitor (9) na upevňovací desku sloupu (5), provlečte detekční kabel (26) kulatým otvorem uprostřed a zajistěte jej pomocí 4 upevňovacích šroubů (10).

8.4.2 Použití:



VAROVÁNÍ!

Systémy detekce srdeční frekvence nemusí být přesné. Pokud se cítíte slabí nebo vám není dobře, okamžitě přestaňte cvičit.

Poznámka: Než se posadíte na rotoped, nastavte sedlo do nejnižší polohy, abyste zjistili nejvhodnější polohu a seznámili se s rotopedem, poté podle potřeby upravte výšku a hloubku.


1. Umístěte rotoped na stabilní povrch s dobrým třením.
2. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
3. Pro začátek nastavte intenzitu odporu na minimum.
4. Vložte nohy do pedálů a začněte šlapat, postupně zvyšujte intenzitu až na požadovanou rychlost.
5. Po přibližně 5 otáčkách pedálu se rozsvítí displej a bude možné používat programovací rozhraní.
6. Pro měření srdečního tepu musíte mít ruce neustále na senzorech umístěných na rukojetích.

Poznámka: VZDÁLENOST mezi sedadlem a rukojetmi lze nastavit od minimálně 42 cm do maximálně 48 cm.

8.4.3 Funkce displeje


1. Automatické skenování (SCAN): v tomto stavu se na hlavním displeji postupně zobrazí všechny funkce TIME-SPD-DIST-CAL-ODO-PUL.
2. Doba pohybu (TIME): kumulativní výpočet doby pohybu od 00:00 do 99:59; uživatel může stisknutím tlačítka vybrat stav zobrazení časové hodnoty.
3. Vzdálenost pohybu (DIST): kumulativní výpočet vzdálenosti pohybu od 0,0 do 999,9; uživatel může stisknutím tlačítka vybrat hodnotu zobrazení vzdálenosti.
4. Kalorie (CAL): zobrazuje kumulativní spalování kalorií od 0,0 do 9999. Stisknutím tlačítka vyberete hodnotu, která se má zobrazit. Poznámka: Jedná se pouze o přibližné údaje, které nelze použít pro lékařské účely.
5. Rychlost pohybu (SPEED): zobrazuje aktuální rychlost v rozmezí 0,0–999,9 km/míle za hodinu.
6. Ujetá vzdálenost (ODO): maximální měřitelná vzdálenost je 0–9999 km.
7. Puls (PUL): okamžitá srdeční frekvence, 40–240krát za minutu.

Poznámka: Jedná se pouze o přibližné údaje, které nelze použít pro lékařské účely.

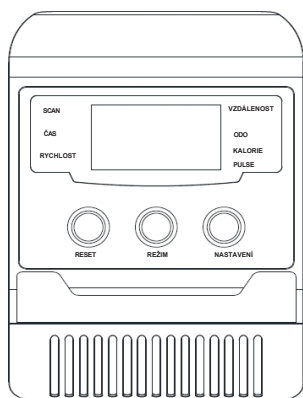

- Tlačítko MODE: stisknutím zobrazíte všechny funkce v pořadí
- Tlačítko RESET: stisknutím resetujete jednotlivé údajů o průběhu cvičení pro funkce TIME CAL a ODO; podržte stisknuté po dobu 3 sekund, aby se resetovaly všechny údaje
- Tlačítko SET: slouží k nastavení cílů cvičení pro funkce TIM, CAL a ODO

8.5 Pohled na součásti RP958

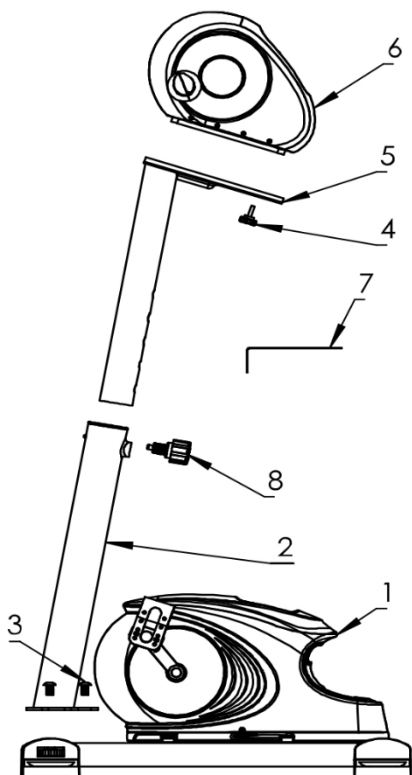

1. Základní konstrukce
2. Základní trubka
3. Šrouby základny 4
4. Nastavovací knoflík
5. Nastavitelná podpěrná trubka
6. Horní část stroje
7. Klíč
8. Nastavovací knoflík

Nástroje: Imbusový klíč je součástí balení

8.5.1 Montáž:

1. Připojte horní část stroje (6) k nosné trubce (5) a upevněte ji pomocí nastavovacího knoflíku (4), přičemž opatrně protáhněte dráty podél trubky, až vyjdou z dolní části.
2. Připojte dráty vyčnívající ze základní konstrukce (1) a trubky horní konstrukce, poté obě části zajistěte 4 šrouby (3) a pevně je utáhněte.

8.4.2 Použití

1. Umístěte pedálový trenažér na stabilní povrch s dobrým třením.
2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zasunut do zásuvky.
3. Cvičení provádějte na stabilní židli (nebo křesle) umístěné ve správné vzdálenosti od pedálového cvičebního stroje.
4. Po usednutí nastavte horní část zařízení podle potřeby pomocí nastavovacího knoflíku (8).

8.4.3 Funkce displeje



- První dvě obrazovky zobrazují rychlost horní a dolní části.
- Spodní displej zobrazuje dobu cvičení, ujetou vzdálenost a spálené kalorie.
- Čtyři malé obrazovky ve spodní části ukazují aktuálně aktivovaný režim pro pasivní režim.

- **Tlačítko On/Off** zapíná stroj.
- **Tlačítko Full body**: spustí horní a dolní část pedálového trenažéru.

Dalším stisknutím se pohyby opakují. Podržením tlačítka se pohyb obou částí obrátí.

- **Tlačítko horní části těla**: spustí horní část; podržením tlačítka se pohyb obrátí.
- **Tlačítko odporu**: stisknutím tohoto tlačítka přejdete z pasivního režimu do aktivního režimu, přičemž úroveň odporu se zvyšují od 1 do 20.
- **Tlačítko režimu**: vybere režim z HR-P1-P2-P3.

F › výchozí nastavení při spuštění. Stisknutím tlačítka „+“ nastavíte rychlost výkonu.

Poznámka: V režimu P1--P2--P3 je rychlost pohybu nastavena počítačem a uživatel ji nemůže upravovat.

- **Tlačítko „+“**: při zastaveném pedálovém trenažéru zvyšuje dobu provozu z 5 minut na 30 minut.

Pedálový trenažér v pohybu, nastavuje rychlost od 1 do 20 úrovní.

- **Tlačítko „-“**: Stiskněte toto tlačítko, když je pedálový trenažér zastaven, aby se zkrátila doba provozu z 30 minut na minimálně 5 minut.

Pedálový trenažér se pohybuje, sníží rychlost o 1 úroveň, až na minimální úroveň.

9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry a hmotnost						
Kódy	 L:	 D:	 V:	Výška sedadla od země	 Kg	
RP950	40 cm	39 cm	30 cm	-	3,5 kg	-
RP951	49 cm	40 cm	30 cm	-	4,5 kg	-
RP953	64 cm	42 cm	31 cm	-	9 kg	-
RP955	98 cm	48 cm	128 cm	80–97 cm	25 kg	150 kg
RP958	46 cm	41 cm	92 cm	-	12 kg	-

Technické specifikace					
Kódy	Napájení	Odpor	Použití	Použití a třída přesnosti (ISO 20957-1 20957-5)	Brzdový systém
RP950	Baterie AAA	Plastové kolečko 0,5 kg	Aktivní	I C	Nezávislé na rychlosti
RP951	220 V 50 Hz 70 W Baterie CR2025 pro dálkové ovládání	Elektromotor	Aktivní/pasivní	I C	
RP953	Baterie LR33	Železné kolo 1,6 kg	Aktivní	I A	
RP955	Baterie AAA	Železné kolo 5 kg	Aktivní	I B	
RP958	110 V–220 V 90 W	Elektromotor	Aktivní/pasivní	I B	

Poznámka: Všechny produkty uvedené v této příručce byly testovány v souladu s normami UNI EN ISO 20957-1 a 20957-5.

9.1 Třída použití a přesnosti

Normy UNI EN ISO 20957-1 a 20957-5 stanovují třídy použití (I, S, H) a třídy přesnosti (A, B, C) cvičebních zařízení uvedených v této příručce. Třída použití stanovuje oblast použití (doma nebo ve specializovaném zařízení) a zamýšlené použití zařízení (soukromé nebo profesionální použití). V tomto případě třída I, kterou splňují všechna naše zařízení, označuje, že jsou určena pro profesionální použití ve specializovaných zařízeních; třída přesnosti (A vysoká, B střední a C nízká) stanoví úroveň přesnosti pro zařízení, která mají systémy sběru dat.

Poznámka: Zařízení s třídou přesnosti B a C nejsou vhodná pro účely, které vyžadují vysokou úroveň přesnosti.



UPOZORNĚNÍ!

Používání pedálových cvičebních strojů doma je povoleno pouze pod přímým dohledem odborníka.

10. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (POUZE PRO RP951 RP958)

Rychlý rozvoj elektroniky, zejména v oblasti komunikací, zaplavil prostředí elektromagnetickým zářením (EM) vyzařovaným televizory, rádií a komunikačními zařízeními. Tyto EM vlny jsou neviditelné a jsou silnější, čím blíže jste k jejich zdroji. Všechny elektrické vodiče fungují jako antény pro EM signály a v různé míře mohou být všechna zařízení ovlivněna elektromagnetickým rušením (EMI). Rušení může způsobit neúmyslné pohyby a/nebo nepravdivé ovládání zařízení.

Elektromagnetická energie vyzařovaná zdroji, jako jsou:

- rozhlasové stanice;
- televizní stanice;
- amatérské rozhlasové stanice;
- obchodní alarmové systémy;
- mobilní telefony a bezdrátové telefony mohou rušit elektrické pedálové trenažéry

Rušení může ovlivnit rychlost pasivního šlapání. Může také trvale poškodit elektronickou řídicí jednotku zařízení. V našem každodenním prostředí se nachází určitý počet intenzivních zdrojů elektromagnetického rušení. Intenzita elektromagnetické energie se měří ve voltech na metr (V/m). Váš elektrický šlapací trenážér je vybaven ochranou proti elektromagnetickému rušení, která byla testována a certifikována jako vyhovující platným mezinárodním předpisům až do určité intenzity. Toto se nazývá „úroveň odolnosti“. Čím vyšší je úroveň odolnosti, tím lépe je zařízení chráněno. V současné době může současná technologie poskytnout úroveň odolnosti nejméně 20 V/m, což je dostatečná ochrana proti nejběžnějším zdrojům elektromagnetického rušení. Domníváme se však, že následující opatření mohou riziko dále minimalizovat.

- Při zapnutém pedálovém trenážéru nepoužívejte přenosné rádiové vysílače, CB rádia a vyhněte se zapínání mobilních telefonů nebo jiných osobních komunikačních zařízení.
- Nepřibližujte se příliš k výkonným rádiovým a televizním vysílačům.
- Pokud dojde k pohybu pedálového trenážéru, který nesouvisí s nastaveným programem nebo rychlostí, okamžitě přestaňte zařízení používat a vypněte jej.
- Instalace dalších elektrických příslušenství nebo komponentů a úpravy motoru elektrického pedálového trenážéru mohou zvýšit jeho náchylnost k elektromagnetickému rušení, a tím i nebezpečí při jeho používání. Upozorňujeme, že tímto také zaniká záruka.
- V každém případě nahlase jakékoli neúmyslné pohyby zařízení prodejci nebo společnosti MORETTI SPA, poznamenejte si to do tohoto návodu a poznamenejte si také, zda se ve vašem okolí nachází zdroj elektromagnetických vln.

10.1 Elektromagnetická kompatibilita (pouze pro RP951 a RP958)

POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE – ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE		
VÝŠE UVEDENÁ ZAŘÍZENÍ JSOU URČENA POUZE PRO PROVOZ V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ UVEDENÉM NÍŽE. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL ZAŘÍZENÍ MUSÍ ZAJISTIT, ABY BYLO POUŽÍVÁNO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.		
EMISNÍ ZKOUŠKY	SOUHLAS	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ – PŘÍRUČKA
RF EMISE CISPR 11	SKUPINA 1	MODELY RP951 A RP958 POUŽÍVÁJÍ RF ENERGII POUZE PRO VNITŘNÍ FUNKCE. JEJICH RF EMISE JSOU PROTO VELMI NÍZKÉ A S VELKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ NEPŘESLOUŽÍ BLÍZKÉ ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ.
RF EMISE CISPR 11	TŘÍDA B	MODELY RP951 A RP958 JSOU VHODNÉ PRO POUŽITÍ VE VŠECH , VČETNĚ DOMÁCNOSTÍ A BUDOV PŘIPOJENÝCH PŘÍMO K NÍZKONAPĚTOVÉ VEŘEJNÉ ELEKTRICKÉ SÍTI PRO REZIDENČNÍ APLIKACE.
HARMONICKÉ EMISE IEC 61000-3-2	TŘÍDA A	
KOLÍZENÍ NAPĚTÍ/BLIKÁNÍ IEC 61000-3-3	V SOULADU	

11. ÚDRŽBA

Zařízení MOPEDIA vyráběná společností Moretti S.p.A. jsou označena značkou CE a před uvedením do prodeje jsou pečlivě zkontrolována.

Pravidelná kontrola zahrnuje prohlídku následujících částí:

- Nosná konstrukce pedálového cvičebního stroje a spojovací díly;
- Zkontrolujte montáž pedálů a gumových nožiček a fungování brzdy pro nastavení intenzity zátěže;
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené;
- Zkontrolujte všechny svařované body;
- Mazání: pedálový trenážér je navržen tak, aby vyžadoval minimální údržbu; nicméně, půlroční kontrola a mazání by měly zajistit optimální životnost.

Poznámka: K opravám používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.



UPOZORNĚNÍ!

Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje, okamžitě vyměňte poškozené díly, jinak zařízení nepoužívejte, dokud nebude opraveno.

12. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

12.1 Čištění

- Použijte pouze vlhký hadřík. Před použitím zařízení důkladně osušte. Nepoužívejte přímý proud vody.
- Nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 30 °C.
- Nepoužívejte vodní paprsek a/nebo parní čističe.

12.2 Dezinfekce

- Pokud je nutné produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční čisticí prostředek.
- Celková dezinfekce systému by měla být prováděna v pravidelných intervalech nebo při změně uživatele. Ztráta barvy některých materiálů může být způsobena určitými druhy potu, UV zářením, opotřebením, teplem nebo vlhkostí a je považována za přirozený proces, na který se nevztahuje záruka.

Poznámka: K čištění nikdy nepoužívejte kyseliny, zásady ani rozpouštědla (aceton nebo ředidlo).

13. PODMÍNKY LIKVIDACE

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/ES:



Na konci své životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Musí být odevzdán do obecních zařízení pro tříděný sběr odpadu nebo prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Třídění odpadu pomáhá snižovat možné negativní dopady na životní prostředí a zdraví vyplývající z nesprávné likvidace a umožňuje recyklaci materiálů, z nichž je výrobek složen, což se promítá do významných úspor energie a zdrojů. Produkt je označen symbolem přeškrtnuté popelnice, který zdůrazňuje povinnost odděleného nakládání s elektromedicínským zařízením.

ZACHÁZENÍ S VYBITÝMI BATERIEMI (POUZE pro RP950, RP953 a RP955)



Tento symbol na výrobku označuje, že baterie nesmí být považovány za běžný domácí odpad. Správná likvidace přispívá k prevenci potenciálně negativních důsledků pro zdraví a životní prostředí, které by jinak byly způsobeny jejich nevhodnou likvidací. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Vybité baterie odнесите do sběrných míst určených k recyklaci. Podrobnější informace o likvidaci vybitých baterií nebo produktu získáte u místního úřadu, místní služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

14. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se poskytuje záruka 2 (dva) roky od data prodeje na vady materiálu a výroby, s výhradou následujících omezení. Záruka se ruší v případě nesprávného použití, zneužití, úpravy výrobku a nedodržení pokynů. Účelové použití výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. Společnost Moretti neodpovídá za škody, zranění nebo jiné následky vyplývající z instalace nebo použití, které není v plném souladu s pokyny uvedenými v instalační, montážní a uživatelské příručce. Společnost Moretti neposkytuje záruku na své výrobky v případě poškození nebo vad za následujících okolností: přírodní katastrofy, neautorizované opravy nebo údržba, nesprávné napájení elektrickou energií (podle potřeby), použití dílů nebo komponentů, které nebyly dodány společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neoprávněné zásahy, poškození při přepravě (jiné než při původní přepravě společností Moretti) nebo neprovedení údržby podle návodu. Součástí podléhající opotřebení nejsou touto zárukou pokryty, pokud je poškození způsobeno běžným používáním produktu.

15. OPRAVY

15.1 Opravy v rámci záruky

Pokud produkt Moretti vykazuje během záruční doby vady materiálu nebo výroby, společnost Moretti se s klientem dohodne, zda se na vadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení produkt vyměnit nebo opravit u určeného prodejce Moretti nebo ve svých vlastních prostorách. Náklady na práci vynaložené při opravě produktu ponese společnost Moretti, pokud určí, že se na opravu vztahuje záruka. Oprava a výměna neprodlužují záruční dobu.

15.2 Opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka

Produkt, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze s předchozím souhlasem zákaznického servisu společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu vzniklé v souvislosti s opravami, na které se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy produktů, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka v délce 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí opraveného produktu.

15.3 Produkty bez závady

Pokud společnost Moretti po obdržení a prozkoumání produktu dojde k závěru, že produkt není vadný, bude o tom klient informován. Produkt bude vrácen klientovi na jeho náklady.

16. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se poskytuje záruka 6 (šest) měsíců od data dodání.

17. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI

Pokud není v této záruce výslovně uvedeno jinak a v mezích zákona, společnost Moretti neposkytuje žádné další výslovné ani implicitní prohlášení, záruky ani podmínky, včetně jakýchkoli budoucích prohlášení, záruk nebo podmínek prodeje, vhodnosti pro daný účel, neporušení a nezasahování. Společnost Moretti nezaručuje, že používání jejího produktu bude nepřerušované a bezproblémové. Trvání jakékoli implicitní záruky poskytované zákonem je omezeno na záruční dobu v mezích zákona.

Některé státy a země neumožňují omezení trvání implicitní záruky nebo vyloučení omezení náhodných nebo nepřímých škod v souvislosti se spotřebními výrobky. V uvedených státech a zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá vyloučení a omezení této záruky. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

**Produkt** _____**Datum nákupu** _____**P r o d e j c e** _____**Ulice** _____ **Město** _____**Prodáno** _____**Ulice** _____ **Město** _____**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriaga (Arezzo) - ITÁLIE - Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com**e-mail: info@morettispa.com****VYROBENO V ČÍNĚ****Originální návod byl přeložen do ČJ 12.9.2025, Stamed s.r.o.**