



**KYARA®**



**ALPAK**

## ELEKTRICKÁ DEČKA NA KRK A ZÁDA LTK710

Návod k obsluze

## Obsah

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| OZNAČENÍ.....                      | 1 |
| ÚVOD.....                          | 1 |
| BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....      | 1 |
| OBECNÝ POPIS, SYMBOLY .....        | 2 |
| FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ ..... | 3 |
| VYPÍNÁNÍ .....                     | 3 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....              | 3 |
| OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE.....     | 3 |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....          | 4 |
| ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....           | 4 |
| ZÁRUKA.....                        | 4 |
| OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE .....        | 4 |

## OZNAČENÍ

LTK710 Elektrická dečka na krk a záda

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení elektrické dečky KYARA. Doporučujeme před prvním použitím pečlivě přečíst tento návod, zejména bezpečnostní upozornění a postupovat podle následujících pokynů. Příručku uschovejte po celou dobu životnosti výrobku. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tuto příručku. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na prodejce.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda u zboží nedošlo k poškození během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.


## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Po vyjmutí zařízení z obalu zkontrolujte obsah balení a zda zařízení není poškozené vlivem přepravy. V případě pochybností nepoužívejte zařízení a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Obalový materiál není hračka pro děti. Uchovávejte plastový obal mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!
- Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Štítek je umístěn na zařízení.
- Toto zařízení smí být používáno pouze jako výhřevná podložka pro domácí použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevyhovující, a proto nebezpečné.
- Přístroj nemohou používat děti a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, stejně tak osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod stálým dohledem zodpovědné osoby.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.
- Nepoužívejte přístroj u dětí nebo postižených osob, které jsou citlivé na teplo.
- Zařízení nesmí být používáno dětmi, pokud není jednotka uvedena do provozu a kontrolována rodiči, zákonnými zástupci nebo pokud nebylo dítě dostatečně poučeno, jak zařízení funguje a jak by jej mělo správně ovládat.
- **VAROVÁNÍ:** Nevhodné pro děti do 3 let. Děti do 3 let by neměly používat přístroj z důvodu neschopnosti reagovat v případě přehřátí.
- Nepoužívejte dečku, pokud je mokrá či vlhká.
- Před čištěním a údržbou vždy odpojte zařízení od napájecího zdroje.
- V případě poruchy nebo špatné funkce spotřebiče jej vypněte a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič musí být používán pouze s typy ovládacích prvků uvedených na štítku.
- Je-li zařízení zapnuté, nepokládejte ovládání ani napájecí kabel pod nebo na horní část topné vložky.
- Nepoužívejte zařízení, jestliže je přehnutá.
- Před skladováním nechte přístroj vychladnout, poté složte.
- Pokud je dečka složená, nenechávejte uvnitř zařízení oblečení.
- Před každým použitím dečky ji pečlivě prohlédněte, zda nevykazuje jakékoliv poškození či opotřebení. Pokud se objeví takové známky, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Přístroj nesmí používat uživatelé kardiostimulátoru.
- Zařízení není určeno k lékařskému použití v nemocnicích.

- Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** pro zahřátí zvířat.
- Nepoužívejte zařízení, když spíte.
- Při delším používání nastavte volič na minimum 1-2.
- Nepoužívejte zařízení na oteklá nebo bolestivá místa.
- Pokud cítíte při používání bolest, přestaňte zařízení používat.
- Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**, jsou-li ve vzduchu přítomny vysoce hořlavé plyny.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepokládejte na přístroj hořlavé materiály nebo materiály, které se snadno znehodnocují v důsledku tepla (např. karton, plast, papíry, svíčky)
- Nikdy nevystavujte zařízení blízkosti jiných zdrojů tepla (hořáky, trouby), teplotám pod nulou, přímému slunečnímu záření, vlhkosti.
- Nevkládejte špendlíky nebo jiné ostré předměty.
- Nadměrné používání při nastavení vysoké teploty může způsobit popálení kůže.

**VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání zařízení hrozí nebezpečí zranění.

## OBEČNÝ POPIS

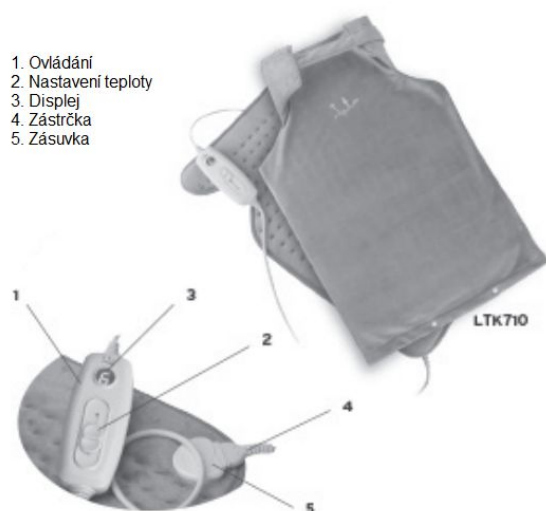

## SYMBOLY

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Kód produktu     |
|  | Šarže            |
|  | Značka CE        |
|  | Návod k obsluze  |
|  | Likvidace        |
|  | Třída izolace II |

Vyhřívací podložka je určena k vyhřívání lidského těla. Vyhřívací dečka může být přiložena na části těla jako krk, ramena, záda, bedra, břicho případně na klouby.

**VAROVÁNÍ:** Elektrickou dečku používejte pouze s dodaným ovladačem. Přesné označení modelu je uvedeno na štítku všitém na dečce.

- Zapojte ovladač do zástrčky na dečce.
- Zasuňte elektrickou zástrčku do zásuvky a na krátkou dobu zvolte maximální teplotu pro urychlení zahřátí dečky. Poté zvolte teplotu od 1 do 3.
- Úroveň 1 = 50 °C; Úroveň 2 = 53 °C Úroveň 3 = 56 °C Úroveň 4 = 59 °C Úroveň 5 = 62 °C Úroveň 6 = 65 °C

Tolerance +/- 5 °C

Dečku přiložte k části těla, kterou chcete vyhřívát.

## FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

- Elektrická dečka je vybavena systémem automatického zastavení. Po 3 hodinách provozu se dečka automaticky vypne.



- Chcete-li dečku znovu zapnout, nastavte volič do polohy „0“, vyčkejte několik sekund a poté znovu zvolte požadovanou teplotu.



### VYPÍNÁNÍ

- Po použití vypněte dečku nastavením voliče do polohy „0“
- Odpojte zařízení ze zásuvky.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Nebějte



Perte při maximální teplotě 30 °C



Nečistěte



Nesušte v sušičce



Nežehlete

- Před čištěním se ujistěte, že dečka není připojena k elektrické síti a je chladná.
- Před čištěním se ujistěte, že je odpojovací kabel odpojen.
- Dečku lze umýt ručně (nepoužívejte pračku) při maximální teplotě 30°C.
- Použijte neutrální čisticí prostředek.
- Nepoužívejte bělidla.
- Nesušte v sušičce, elektrickou dečku nechte uschnout na vzduchu. Nepokládejte na topení a jiné topné systémy.
- Nežehlete
- Před opětovným použitím se ujistěte, že dečka je zcela suchá.
- Při čištění nepoužívejte chemické ani abrazivní prostředky.

## OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte kontejner pro komunální odpad. Doporučujeme likvidaci přístroje v příslušných prostorách pro recyklaci.

Výrobek musí být zlikvidován v souladu s evropskou normou 2002/96/EC. Správná likvidace produktu snižuje riziko pro životní prostředí a zdraví. Části přístroje mohou být dále recyklovány a tím dojde k úspoře energie a surovin. Další informace vám poskytne místní likvidátor nebo prodejce.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Napětí: 220-240 ~ 50 Hz
- Výkon: 100 W
- Rozměry: 63 x 42 cm
- Materiál: 100% polyester

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud je zařízení poškozené, nepokoušejte se ho opravit.

| PROBLÉM            | MOŽNÁ PŘÍČINA  | ŘEŠENÍ   |
|--------------------|--|--|
| Zařízení nefunguje | Přístroj nepřijímá napájení                                      | Ověřte, zda<br>A. Je připojen napájecí kabel do zásuvky<br>B. Zástrčka je vložena do zásuvky<br>C. Zásuvka není vadná<br>D. Pojistka je aktivována |
|                    | Nebyla nastavená teplota. Volič teploty je nastaven na pozici 0. | Nastavte teplotu posunutím na pozici 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6  |
|                    | Byla nastavena ochrana proti přehřátí.                           | Nechte zařízení zkontrolovat výrobcem.   |

## ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

## OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či

výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň