



MOPEDIA®

HLINÍKOVÁ CHODÍTKA

NÁVOD K POUŽITÍ

MA RP686A_RP686B_RP686R 01 A_ENG_07-2023

INDEX

1. KÓDY	STR. 3
2. ÚVOD	STR. 3
3. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ.....	STR.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STR. 3
5. UPOZORNĚNÍ	STR.4
6. SYMBOLY	STR. 5
7. PŘED POUŽITÍM	STR.5
8. OBECNÝ POPIS	STR.5
9. NÁVOD K MONTÁŽI.....	STR. 6
10. POUŽITÍ.....	STR. 6
11. BRZDY	STR.7
12. PÉČE A ÚDRŽBA	STR. 7
13. ČIŠTĚNÍ	STR. 7
14. PÉČE O KOLA.	STR. 7
15. PODMÍNKY LIKVIDACE	STR.7
16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STR. 8
17. NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ	STR. 8
18. ZÁRUKA	STR. 8



Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP686A	Skládací ocelové chodítko TETI – barva stříbrná
RP686B	Skládací ocelové chodítko TETI – barva modrá
RP686R	Skládací ocelové chodítko TETI – barva červená

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali chodítko řady MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A. Chodítka řady MOPEDIA vyráběná společností Moretti S.p.A. jsou navržena tak, aby splňovala všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tato příručka obsahuje několik užitečných doporučení pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zakoupeného chodítka pečlivě přečetli celý návod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne odborné rady nebo pomoc.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Tento chodítko je vhodné pro osoby s pohybovými problémy. Může být použito jako pomůcka pro usnadnění chůze nebo dokonce jako servoasistovaná pomůcka pro chůzi. V žádném případě jej však nemohou používat osoby s evidentní poruchou funkce rukou nebo paží, ani osoby s problémy s rovnováhou. Chodítko lze používat dovnitř i ven. Doporučujeme jej používat na rovném povrchu, kde kola dosáhnou na zem. Nelze jej používat na kamenité půdě nebo na nakloněném povrchu, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě osob nebo věcí.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněných úprav rámu produktu.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyrobený a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny CHODÍTKOS - MOPEDIA je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJÍCH ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

- Zařízení splňují požadavky na obecnou bezpečnost a výkonnost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
- Zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE.
- Zařízení NEJSOU VYROBENY PRO KLINICKÉ TESTY.
- Zařízení jsou balena v NESTERILNÍM OBALU.
- Zařízení patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
- Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Kompletní kódy produktů, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. UPOZORNĚNÍ

5.1 Obecná varování

- NEINSTALUJTE ani nepoužívejte zařízení, dokud si nepřčtete a neporozumíte tomuto návodu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, před instalací tohoto zařízení se obraťte na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Chodítka by měli používat pouze pacienti s odpovídající motorickou schopností, která zajistí jeho bezpečné používání.
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, aby bylo možné určit správné nastavení a správné použití.
- Lékař nebo terapeut by měl přispět k nastavení výšky pro maximální oporu, správné ovládání brzdy a celkovou montáž;
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybná zařízení.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, ke kterému uživatel a/nebo pacient patří, jakoukoli vážnou nehodu, v souvislosti s tímto zařízením.

5.2 Varování pro použití

1. Zajistěte, aby byl brzdový kabel správně nastaven.
2. Po každém nastavení výšky zkontrolujte správnou funkci brzdy, aby se zabránilo volnému ohýbání lanka.
3. Porušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit zranění;
4. Chodítka lze používat pouze na tvrdém, rovném povrchu. Chodítka nepoužívejte k chůzi po schodech.
5. Vždy se opírejte o obě rukojeti, abyste udrželi rovnováhu.
6. Zvláštní pozornost věnujte mokrému, zledovatělému nebo zasněženému povrchu.
7. NEPŘETĚŽUJTE chodítka.
8. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo chodítka (je-li k dispozici) k přepravě osob nebo majetku, sedadlo je určeno pro sezení uživatele se zapnutou parkovací brzdou.
9. Všechna kola musí být během používání neustále v kontaktu s podlahou, aby byla zajištěna správná rovnováha chodítka a maximální bezpečnost.
10. Před použitím sedadla musí být zapnutá brzda.

Poznámka: Pokud je chodítka používáno ve stabilní poloze, musí být ruční brzda zajištěna.

11. NEPOUŽÍVEJTE chodítka k chůzi pozadu, po svahu nebo k překonávání schodů, obrubníků či překážek. Hrozí vážné nebezpečí pádu nebo zranění.
12. Opěradlo je určeno k podpoře zad při sezení. Opěradlo není určeno k podpoře celé hmotnosti těla. Při sezení se nevyklánějte, mohlo by dojít k pádu.
13. Nesedějte si na chodítka, když je nakládáno do vozidla nebo přepravováno ve vozidle.
14. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo k přepravě osob nebo předmětů.
15. Při vstávání z nižší polohy NEPOUŽÍVEJTE chodítka jako oporu pro uživatele. Pokud je chodítka použito k zvednutí uživatele do stoje, může se chodítka pohybovat, i když jsou brzdy v zablokované poloze, což může vést k pádu.
16. NEZATLAČUJTE na chodítka, když jsou brzdy zapnuté. Brzdy slouží k zabránění pohybu kol. Pokud však chodítka zatlačíte, nemusí to zabránit jeho pohybu.

5.3 Varování týkající se montáže

- Zkontrolujte, zda jsou obě trubky podpěry rukojeti správně zasunuty do rámu a zajištěny uzamykacími knoflíky, které jsou zajištěny v držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků.
- Obě trubky rukojetí jsou bezpečně zajištěny v hlavní nosné části pomocí křídlových matic a knoflíků.
- Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek, když je chodítka otevřené, a poškození jeho stability. Deformace mohou také způsobit zranění.
- Dávejte pozor, aby se při otevírání a zavírání nezachytily prsty a/nebo oděv.

6. SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečná identifikace zařízení



Značka CE



Výrobce



Šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Maximální nosnost

7. PŘED POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

1. Zda jsou všechny části chodítka bezpečně zajištěny.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené.
3. Ujistěte se, že sedadlo je správně zajištěno (pokud není možné dále silou zatlačit na spodní rám sedadla).
4. Zkontrolujte, zda je zajištění sedadla správně zasunuto.
5. Zkontrolujte správnou funkci brzdy a běžné brzdy.

8. OBECNÝ POPIS

8.1 Popis dílů



1. Rám chodítka (1 ks)
2. Opěrka zad s tlačítky (1 ks)
3. Rukojeti (2 ks)
4. Taška/košík (1 ks)
5. Přední kola (2 ks)
6. Zadní kola (2 ks)
7. Hvězdicové knoflíky (2 ks)
8. Šrouby a zakřivené podložky (2 ks)

OBR. 1 (Obrázek pouze pro ilustrační účely)

9. NÁVOD K MONTÁŽI

9.1 Před montáží výrobku

Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy. V případě poškození chodítka kontaktujte nejbližšího prodejce.

9.2 Montáž

1. Rozložte chodítko stlačením skládacího držáku pod sedadlem.
 2. Vložte polstrované opěradlo tak, aby polstrovaná část směřovala k přední části zařízení. Zatlačte na opěradlo a současně stiskněte kulaté plastové tlačítko, dokud nezapadne na místo.
 3. Vložte řídítka tak, aby rukojeti směřovaly k zadní části chodítka. Brzdová lanka by měla být na vnější straně řídítek a rámu. Ujistěte se, že přebytečná brzdová lanka směřují k přední části chodítka.
 4. Nastavte výšku řídítek tak, aby vám správně seděla. Připevněte je k otvoru nejbližše požadované výšce. Vložte šroub z vnitřní strany chodítka skrz rám. Připevněte podložku tak, aby těsně přiléhala k rámu. Připevněte knoflík k šroubu. Připevněte podložku tak, aby těsně přiléhala k rámu. Připevněte hvězdicový knoflík k šroubu. Viz obrázek 3. (Důležité: Utáhněte pouze rukou!)
5. Umístěte tašku/košík pod sedadlo.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou knoflíky zasunuty do otvorů.



VAROVÁNÍ! Tašku/košík používejte pouze pro malé předměty. Tašku/košík nepřetěžujte, aby nedošlo k nerovnováze a riziku převrácení (maximální hmotnost 4,5 kg).

9.2.1 Sedadlo

Před usednutím umístěte chodítko na rovný a pevný povrch a zajistěte brzdy.

Ujistěte se, že je západka zámku správně zajištěna a že je chodítko ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ! Při sezení se opřete celou vahou o sedadlo. Nesedějte si tak, že se opíráte pouze o jednu stranu.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou knoflíky zasunuty do otvorů. Před použitím se vždy ujistěte, že se chodítko nezavírá pod vlivem malé boční síly. Při připojování řídítek a kol dávejte pozor, abyste nezkroutili brzdovou lanku.



VAROVÁNÍ! Před usednutím a vstáváním z chodítka se ujistěte, že jsou parkovací brzdy správně zařazeny.

10. JAK POUŽÍVAT

- Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze s oběma rukama na rukojeti.
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli riziku uklouznutí.

- Při chůzi udržujte vzpřímenou polohu, pohled směřujte dopředu, ne dolů.
- Nesuňte chodítko příliš daleko od těla, mohlo by to způsobit pád a nepřiměřené zatížení.
- Chodítko nepoužívejte k překonávání schodů vyšších než 20 mm.
- Při používání venku upřednostňujte chodníky, které jsou řádně upraveny v souladu s předpisy pro odstranění architektonických bariér.

11. BRZDY

11.1 Brzdění

Chcete-li chodítko zabrzdit, zatáhněte prsty za brzdovou páku směrem nahoru, dokud chodítko nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu chodítka, uvolněte brzdové páčky.

11.2 Zablkování brzdy (ruční brzda)

Stiskněte brzdovou páku dlaní, až uslyšíte „kliknutí“, kola jsou zablkována. Zvedněte rukojeť brzdy a uvolněte ji z dorazové polohy.



UPOZORNĚNÍ! Když je uživatel v klidu, musí být brzdy zajištěny.



VAROVÁNÍ! Po provedení jakýchkoli úprav brzd chodítka musíte brzdy před použitím chodítko otestovat. Viz pokyny k údržbě.

12. PÉČE A ÚDRŽBA

Zařízení **MOPEDIA** od společnosti Moretti SpA na trhu jsou pečlivě kontrolována a nesou značku CE. Pro bezpečnost pacienta a lékaře se doporučuje nechat alespoň jednou za dva roky zkontrolovat vhodnost použití vašeho chodítka výrobcem nebo schválenou laboratoří. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Životnost produktu závisí na používání, údržbě, skladování a čištění.

13. ČIŠTĚNÍ

K čištění dílů používejte pouze vlhký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, které by mohly výrobek poškodit.

14. PÉČE O KOLA

1. Kola čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Otřete do sucha čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně promazávejte.



15. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro zpětný odběr komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných komunálních ekologických ostrovů pro předpokládané operace recyklace použitých materiálů.

16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry v cm*

Hmotnost a rozměry

									
RP686A									
RP686B	61	80	55	60	43	9 kg	20	20	136 kg
RP686R									

*Rozměry se mohou lišit o ± 1 cm.

17. NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství najdete v hlavním katalogu společnosti Moretti S.p.A.

18. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se poskytuje záruka 2 roky od data zakoupení na vady materiálu nebo výroby, s výjimkou možných výjimek nebo omezení uvedených níže. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami a záruka nebude platná, pokud nebudou přísně dodržovány pokyny pro použití. Správné použití je uvedeno v tomto návodu.

Společnost Moretti nenese odpovědnost za následné škody, zranění osob nebo cokoliv jiného, co bylo způsobeno nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení nebo s tím souvisí.

Společnost Moretti nezaručuje škody způsobené následujícími okolnostmi: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, poruchy způsobené problémy s dodávkou elektřiny (v případě potřeby), použití náhradních dílů, které nejsou pokryty společností Moretti, nesprávné použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (odlišné od původní přepravy společností Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce.

Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají opotřebení při správném používání zařízení.

18.1 Opravy

Záruční oprava: Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výroby, společnost Moretti se zákazníkem posoudí, zda se na vadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení opravit nebo vyměnit výrobek u prodejce Moretti nebo ve svém vlastním servisu. Náklady na práci může hradit společnost Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje záruku.

Opravy, na které se nevztahuje záruka: Výrobek bez záruky může být vrácen po schválení společností Moretti. Náklady na práci a dopravu za výtah do vany, na který se nevztahuje záruka, hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy se poskytuje záruka 6 měsíců od převzetí zboží.

Bezvadné zařízení: Zákazník bude informován, pokud po vrácení a prohlídce zařízení společnost Moretti prohlásí, že zařízení není vadné. V takovém případě bude zboží zasláno zpět zákazníkovi a náklady na dopravu hradí zákazník.

18.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se poskytuje záruka 6 měsíců od data přijetí.

18.3 Výjimky

Společnost Moretti neposkytuje žádné další výslovné ani implicitní prohlášení, záruky nebo podmínky, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení práv a nezasahování, s výjimkou toho, co je výslovně uvedeno v této záruce. Společnost Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné používání. Doba trvání případných implicitních záruk, které mohou být stanoveny podle zákona, je omezena záruční lhůtou v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení náhodných škod. V takových zemích se některé z těchto výjimek nebo omezení nemusí na uživatele vztahovat.

Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST****Produkt** _____**Datum nákupu** _____**Autorizovaný prodejce** _____

Ulice _____ Místo _____

Kupující _____

Ulice _____ Místo _____

**MORETTI S.p.A.****Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11****www.morettispa.com****e-mail: info@morettispa.com****VYROBENO V ČÍNĚ****Distributor: Stamed s.r.o.****Originál návodu k použití byl přeložen distributorem 10/2025.**

