



MOPEDIA®

TOALETNÍ ŽIDLE

NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah

1.	KÓDY	3
2.	ÚVOD	3
3.	URČENÉ POUŽITÍ	3
4.	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	3
5.	UPOZORNĚNÍ	4
6.	POUŽITÉ SYMBOLY	4
7.	OBECNÝ POPIS	5
8.	MONTÁŽ	5
9.	PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	5
10.	UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ	6
11.	POUŽITÍ	6
12.	ÚDRŽBA	6
13.	ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	7
15.	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	7
16.	NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
17.	ZÁRUKA	8
18.	OPRAVY	8
19.	NÁHRADNÍ DÍLY	8
20.	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI	8



Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RS841 Koupelnová toaletní židle

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali toaletní židli MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A., která je určena k pomoci osobám s obtížemi při chůzi, vyprazdňování a pohybu. Výrobek splňuje požadavky platných evropských předpisů pro zdravotnické prostředky (2017/745). Tato uživatelská příručka obsahuje několik doporučení, jak zařízení správně a bezpečně používat. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte celý návod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne vhodné rady a pomoc.

Poznámka: Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození žádných částí zařízení. Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte jej a obraťte se na prodejce, který vám poskytne další pokyny.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Toaletní sedátka jsou zařízení, která pomáhají při vyprazdňování a pohybu osobám s obtížemi při chůzi.

UPOZORNĚNÍ



- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu.
- Společnost MORETTI S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení nebo jakýmkoli jiným použitím, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit zařízení a tento návod za účelem zlepšení jeho vlastností.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní výlučnou odpovědnost, že výrobky vyráběné a prodávané společností MORETTI SpA v produktové řadě COMMODE CHAIRS – MOPEDIA jsou v souladu s platnými ustanoveními nařízení (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích. Za tímto účelem společnost MORETTI SpA na vlastní výlučnou odpovědnost zaručuje a prohlašuje následující:

1. Uvedená zařízení splňují obecné požadavky na bezpečnost a výkonnost stanovené v příloze I nařízení (EU) 2017/745, jak je předepsáno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Uvedená zařízení NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Uvedená zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ VÝZKUMY.
4. Uvedená zařízení se prodávají v NESTERILNÍM balení.
5. Uvedená zařízení by měla být považována za zařízení třídy I v souladu s pravidly stanovenými v příloze VIII uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a poskytuje příslušným orgánům po dobu nejméně deseti let od data výroby poslední výrobní šarže technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením (EU) 2017/745.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, jedinečné registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité normy jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU, které společnost MORETTI SPA vydává a poskytuje prostřednictvím svých vlastních kanálů.

5. UPOZORNĚNÍ

5.1 Obecná varování

- NEINSTALUJTE ani nepoužívejte tento výrobek, dokud si nepřečtete a neporozumíte tomuto návodu k použití. Pokud nerozumíte varováním, bezpečnostním opatřením a pokynům, před instalací výrobku se obraťte na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technického pracovníka, abyste předešli poškození nebo zranění.
- Vždy se poraďte se svým lékařem nebo terapeutem o správném používání zařízení.
- Balení produktu uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení závisí na opotřebení neopravitelných a/nebo nenahraditelných dílů.
- Vždy buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti děti.
- Nikdy nezvedejte židli za odnímatelné části, které by se při zvedání mohly náhodně odpojit.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakýkoli závažný incident, který se vyskytl v souvislosti se zařízením, výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.



VAROVÁNÍ!

V přítomnosti pohyblivých částí, které by mohly zachytit končetiny a způsobit zranění, buďte velmi opatrní.

5.2 Varování týkající se používání

- Ujistěte se, že sedák nebyl posunut nebo odstraněn.
- Při usedání na židli nebo vstávání z ní se neopírejte o opěrky nohou.
- Nevyklánějte se z toaletní židle, abyste zvedli předměty z nábytku nebo jiných povrchů.
- Nesedejte si na okraj toaletní židle, protože by se mohla převrátit.

6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečné identifikační číslo zařízení



Označení CE



Výrobce



Šarže



Přečtěte si návod k použití



zdravotnického prostředku



Podmínky likvidace



Maximální nosnost

7. OBECNÝ POPIS



RS841

1. Opěradlo
2. Polstrování opěradla
3. Sedák
4. Polstrování sedáku
5. Kbelík
6. Nastavitelné nohy
7. Područky

Obrázek slouží pouze pro ilustrační účely


8. MONTÁŽ

8.1 RS841

Výrobek je dodáván v rozloženém stavu, pro správnou montáž postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Namontujte nohy tak, že je zasunete do příslušných otvorů pod sedadlem, až uslyšíte cvaknutí zajišťovacího tlačítka, jak je znázorněno na **obr. 1**.
- Vložte opěrky loktů do pouzder po stranách sedadla, dokud neuslyšíte zacvaknutí zajišťovacích tlačítek, jak je znázorněno na **obr. 2**.
- Sestavte opěradlo zasunutím podpěr do příslušných pouzder umístěných v zadní části sedadla, jak je znázorněno na **obr. 3**.
- Sestavte čalounění opěradla zasunutím plastových oček do příslušných otvorů a pevným zatlačením, jak je znázorněno na **obr. 4**.

- Umístěte sedák do sedací části a v případě potřeby nasadte čalounění na sedadlo s vloženým sedákem.

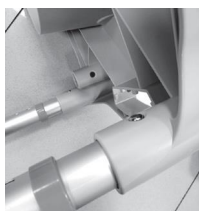

(obr. 1) Obrázek pro ilustraci



(obr. 2) Obrázek pro ilustraci



(obr. 3) Obrázek pro ilustraci



(Obr. 4) Obrázek pro ilustraci

8.2 Demontáž

Postupujte v opačném pořadí než při montáži.

9. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Zkontrolujte správnou montáž zařízení.
- Vždy zkontrolujte opotřeбенé pohyblivých mechanických částí, abyste zajistili, že zařízení lze používat zcela bezpečně pro osoby i prostředek.

10. UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ

- Toaletní židle je určena pouze pro vnitřní použití a není určena k použití jako sedadlo v motorovém vozidle.
- Zvláštní opatrnost je třeba věnovat při používání toaletní židle na nakloněné ploše.
- Doporučuje se skladovat výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- Chcete-li správně sejmut kbílík, zvedněte rukojeť a ujistěte se, že víko zůstává přilepené ke konstrukci.
- Zadní rukojeť slouží pouze ke stabilizaci kbílíku na konstrukci, nepoužívejte ji k jeho přepravě.

11. POUŽITÍ

Poznámka: Přečtěte si obecná varování a pokyny pro uživatele v této příručce.



UPOZORNĚNÍ!

- Samostatné usedání a vstávání z toaletní židle může být potenciálně nebezpečné: provádějte to pouze v případě, že jste fyzicky schopni a opatrně.
- Neopírejte se o odnímatelné části.

11.1 Usedání na toaletní židli

1. Přiblížte se co nejbližší k židli tak, aby byla umístěna vedle vás.
2. Opřete se rukama o rám židle a pomalu se posaďte na sedadlo.

11.2 Vstávání z toaletní židle

1. Přiblížte se co nejbližší k boku jiného sedadla.
2. Opřete se rukama o rám židle, na kterou se přesouváte, zvedněte se a pomalu se posuňte směrem k ní.

12. ÚDRŽBA

Zařízení MOPEDIA vyráběná společností Moretti S.p.A. jsou opatřena značkou CE a před uvedením na trh jsou pečlivě zkontrolována. Pro bezpečnost pacientů a lékařů nechte výrobek alespoň jednou za dva roky zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří, aby byla ověřena jeho vhodnost k použití. K opravám používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Toaletní židle MOPEDIA vyžadují pouze několik jednoduchých a pravidelných úkonů údržby. Pravidelně provádějte následující kontroly:

Prvek	Frekvence
Čištění čalounění	Podle potřeby
Obecná kontrola kvalifikovaným personálem	Každé dva roky



UPOZORNĚNÍ!

Před použitím proveďte všechny kontroly a úkony uvedené v odstavci „PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM“ tohoto návodu k použití.

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

13.1 Čištění potahů a polstrování

Potahy a polstrování jsou vyrobeny z polyesteru a PVC. Čistěte je vodou a jemným mýdlem.

13.2 Čištění WC

WC pravidelně čistěte a dezinfikujte běžným dezinfekčním prostředkem do koupelny. Vždy vyčistěte alespoň před každým použitím.

13.3 Čištění rámu a kovových částí

Na rám a kovové části použijte vodu a neutrální mýdlo, poté je osušte měkkým hadříkem, aby nedošlo k poškrábání laku rámu.

13.4 Dezinfekce

K dezinfekci výrobku použijte běžný dezinfekční čisticí prostředek.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte kyselé, zásadité látky nebo rozpouštědla, jako je aceton nebo ředidlo.

14. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE



Zařízení nikdy nevyhazujte jako běžný domácí odpad. Zařízení odvezte do sběrného dvora k recyklaci.

15. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

15.1 Rozměry a hmotnost

VÝŠKA	 V: 76–89 CM
VÝŠKA OPĚRKY RUKOU (PŘI SEZENÍ)	 V: 40 CM
ROZMĚRY SEDÁKU	 Š: 46 CM  H: 43 CM  V: 42 CM
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY	 Š: 55 CM  H: 44 CM
HMOTNOST	5,1 KG
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	100 KG

16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze náhradní díly a příslušenství uvedené v obecném katalogu Moretti.

17. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se poskytuje záruka 2 (dva) roky od data prodeje na vady materiálu a výroby, s výhradou následujících omezení. Záruka se ruší v případě nesprávného použití, zneužití, úprav výrobku a nedodržení pokynů. Určené použití výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Společnost Moretti nenese odpovědnost za škody, zranění nebo jiné následky vyplývající z instalace nebo použití, které nejsou v souladu s pokyny uvedenými v instalačním, montážním a uživatelském manuálu.

Společnost Moretti neposkytuje záruku na své výrobky v případě poškození nebo vad za následujících okolností: přírodní katastrofy, neoprávněné opravy nebo údržba, nesprávné napájení elektrickou energií (podle potřeby), použití dílů nebo komponentů, které nebyly dodány společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neoprávněné zásahy, poškození při přepravě (jiné než při původní přepravě společností Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu.

Součásti podléhající opotřebení nejsou touto zárukou pokryty, pokud je poškození způsobeno běžným používáním produktu.

18. OPRAVY

18.1 Opravy v rámci záruky

Pokud má produkt Moretti během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, společnost Moretti se s klientem dohodne, zda se na vadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení vyměnit nebo opravit výrobek u určeného prodejce Moretti nebo ve svých vlastních prostorách. Náklady na práci vynaložené při opravě produktu ponese společnost Moretti, pokud určí, že se na opravu vztahuje záruka. Oprava a výměna neprodlužují záruční dobu.

18.2 Opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze s předchozím souhlasem zákaznického servisu společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravami, na které se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka v délce 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

18.3 Produkty bez vad

Pokud společnost Moretti po přijetí a prozkoumání produktu dojde k závěru, že produkt není vadný, bude o tom zákazník informován. Produkt bude vrácen zákazníkovi na jeho náklady.

19. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se poskytuje záruka 6 (šest) měsíců od data dodání.

20. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud není v této záruce výslovně uvedeno jinak a v mezích zákona, společnost Moretti neposkytuje žádné výslovné ani implicitní prohlášení, záruky ani podmínky, včetně jakýchkoli budoucích prohlášení, záruk nebo podmínek prodeje, vhodnosti pro daný účel, neporušení práv a nezasahování. Společnost Moretti nezaručuje, že používání jejích produktů bude nepřerušované a bezproblémové. Doba trvání jakékoli implicitní záruky podle zákona je omezena záruční lhůtou v mezích zákona. Některé státy a země neumožňují omezení doby trvání implicitní záruky nebo vyloučení omezení náhodných nebo nepřímých škod v souvislosti se spotřebními výrobky. V uvedených státech a zemích se na uživatele nemusí vztahovat některé výjimky a omezení této záruky. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt _____

Datum nákupu _____

P r o d e j c e _____

Ulice _____ Město _____

Prodáno _____

Ulice _____ Město _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) - ITÁLIE - Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**VYROBENO V ČÍNĚ****Překlad originální návodu do ČJ – Stamed s.r.o.****09/2025**