



MOPEDIA®

MA ST381-ST382 01 A_ITA_09 2020

NÁVOD K POUŽITÍ

POLŠTÁŘE

INDEX

1. KÓDY.....	STRANA 3
2. ÚVOD.....	STRANA 3
3. URČENÉ POUŽITÍ	STRANA 3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA 3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	STRANA 4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STRANA 4
7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	STRANA 5
8. UPOZORNĚNÍ P R O POUŽITÍ	STRANA 5
9. ÚDRŽBA	STRANA 5
10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE POVRCHU	STRANA 5
10.1 Čištění.....	str. 5
11. PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA 5
12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STRANA 6
13. ZÁRUKA	STRANA 6
13.1 Doložky o osvobození od daně.....	str. 6

 Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

RADY ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA **ST381-ST38201 A_ITA_09 2020**

1. KÓDY

ST381	Kolenní polštář
ST382	Tvarovaný kolenní polštář

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali polštář OPERA z řady **MOPEDIA** by Moretti. Polštáře Moretti jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zařízení pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Polštáře pro pacienty z řady MOPEDIA by Moretti jsou zařízení, která slouží k úlevě pacienta během odpočinku nebo pooperační péče.

POZOR!



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo použití v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny PATIENT CUSHIONS jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745 ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které společnost MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Správné používání přístroje je popsáno v této příručce.
- Zkontrolujte, zda vám byl výrobek doručen nepoškozený, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečný identifikátor zařízení Označení
	CE
	Výrobce
	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnické zařízení
	Podmínky likvidace
	Nebělit
	Ruční praní; maximální teplota 40 °C Nečistěte
	chemicky,
	Nesušte na rotačním bubnu
	Nežehlete

7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřeбенí dílů, abyste se ujistili, že zařízení lze používat zcela bezpečně pro osoby a majetek.

8. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Nenechávejte přístroj delší dobu venku a v kontaktu s vodou.
- V případě pochybností o používání nebo údržbě výrobku se obraťte na svého prodejce.
- Abyste předešli jakýmkoli rizikům, uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

9. ÚDRŽBA

Přístroje řady MOPEDIA by Moretti jsou při uvedení na trh důkladně kontrolovány a označeny značkou CE.

10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE OBALU.

10.1 Čištění

Indikace pro praní podšívky:



Nebělit



Ruční praní; maximální teplota 40 °C



Nečistěte chemicky,



Nesušte na rotačním bubnu



Nežehlete



POZOR!

Výrobek nelze prát. Lze prát pouze obal, jak je uvedeno výše. Bezpodmínečně se vyhněte kyselým nebo zásaditým produktům nebo rozpouštědlům, jako je aceton nebo ředidlo.

11. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KÓD	MATERIÁL	NÁTĚR	MĚŘENÍ
ST381	Tvarovaná paměťová pěna	100% polyester	24,5x20x15/9 cm
ST382	Tvarovaná paměťová pěna	100% polyester	27x12x28 cm

Poznámka: Všechny výrobky jsou odolné proti vznícení podle normy EN1021-1, ale je třeba dbát na opatrnost při použití otevřeného ohně, protože výrobky se mohou vznítit.

13. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

13.1 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ **Umístění** _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ **Umístění** _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.