



## **PODSEDÁKY**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

---

## INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ .....	STRANA.3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	STRANA 3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STRANA 4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STRANA 4
6.1 Prací symboly.....	strana 4
7. OBECNÝ POPIS .....	STRANA 5
7.1 Silikonové gelové polštářky .....	str. 5
7.2 Kompaktní viskoelastické polštáře .....	str. 6
7.3 Perforované polštáře a viskoelastická pěnová základna .....	str. 6
7.4 Anatomické kompozitní polštáře s pevnou základnou z polyuretanové pěny .....	str. 7
7.5 Polštáře se samoformovací tekutinou.....	str. 7
8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....	STRANA 8
9. VAROVÁNÍ P R O POUŽITÍ.....	STRANA 8
10. ÚDRŽBA .....	STRANA 8
11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE .....	STRANA 8
11.1 Čištění.....	strana 8
12. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	STRANA 9
13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI .....	STRANA 9
14. ZÁRUKA.....	STRANA 10
14.1 Doložky o výjimkách .....	str. 10

## CE Zdravotnický prostředek třídy I

### NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA ST708\_xx\_ST709\_xx\_ST712\_xx\_ST713\_xx\_ST716\_xx\_ST719\_xx 02 A\_ITA\_05 2021

#### 1. KÓDY

<b>ST708/xx</b>	Podsedák z viskoelastické pěny
<b>ST709/xx</b>	Anatomický podsedák
<b>ST712/xx</b>	Gelový podsedák
<b>ST713</b>	Gelový podsedák otvorem
<b>ST716/xx</b>	Kompaktní podsedák
<b>ST719/xx</b>	Podsedák se samoformovací tekutinou

#### 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali polštář z řady LEVITAS by Moretti. Polštáře Moretti jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zařízení pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

#### 3. URČENÉ POUŽITÍ

Přístroj, který se používá k úlevě pacienta během sezení v případě pooperačních stavů, proleženin, hemoroidů a překrvené prostaty.

#### POZOR!



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo použití v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

#### 4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA, které jsou součástí řady CUSHIONS, jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

**Poznámka:** Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které vydává společnost MORETTI SPA a zpřístupňuje je prostřednictvím svých kanálů.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ






- Správné používání přístroje je popsáno v této příručce.
- Zkontrolujte, zda vám byl výrobek doručen nepoškozený, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

## 6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečný identifikátor zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnické zařízení
	Podmínky likvidace

### 6.1 Symboly praní

Kde je přítomen:

	Maximální teplota praní 60 °C; normální proces
	Maximální teplota praní 40 °C; normální proces
	Maximální teplota praní 30 °C; normální proces
	Nebělit
	Nečistěte chemicky



Nesušte na rotačním bubnu



Nežehlete

## 7. OBECNÝ POPIS

### 7.1 Silikonové gelové polštářky ST712/40 - ST712/42 - ST712/45



Polštáře jsou vyrobeny z tekutého silikonového gelu s odnímatelným potahem na zip. Vnitřek se skládá z tekutého silikonového gelu a desky z polyuretanové pěny obalené ochrannou 400mikronovou PVC membránou, která umožňuje praní a zabraňuje migraci minerálních olejů. Potah čalounění je vyroben pro horní část ve styku s uživatelem z Hightexu, 100% polyesterové laminované tkaniny z mikrovlákna, a pro spodní část ve styku s vozíkem z protiskluzové tkaniny.


### ST713 SE STŘEDOVÝM OTVOREM



Polštáře se skládají ze základny z polyuretanové pěny a viskoelastické kompaktní fólie. Hermeticky uzavřené s potahem, bez úchytlů. Potah je vyroben v horní části, která je v kontaktu s uživatelem, z Hightexu, 100% polyesterové laminované mikrovláknové tkaniny, a ve spodní části, která je v kontaktu s vozíkem, z protiskluzové tkaniny.

## 7.2 Kompaktní viskoelastické podsedáky


ST716/40 - ST716/43 - ST716/46

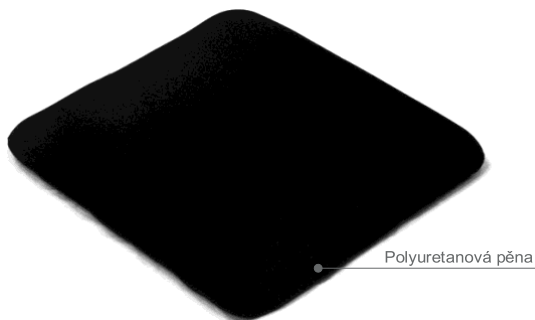

Polštáře se skládají ze základny z polyuretanové pěny a viskoelastické kompaktní fólie. Hermeticky uzavřené s potahem, bez úchyťů. Potah je vyroben v horní části, která je v kontaktu s uživatelem, z Hightexu, 100% polyesterové laminované mikrovláknové tkaniny, a ve spodní části, která je v kontaktu s vozíkem, z protiskluzové tkaniny.

## 7.3 Perforované polštáře a základna z viskoelastické pěny


ST708/40 - ST708/42 - ST708/44 - ST708/46 - ST708/48 - ST708/50

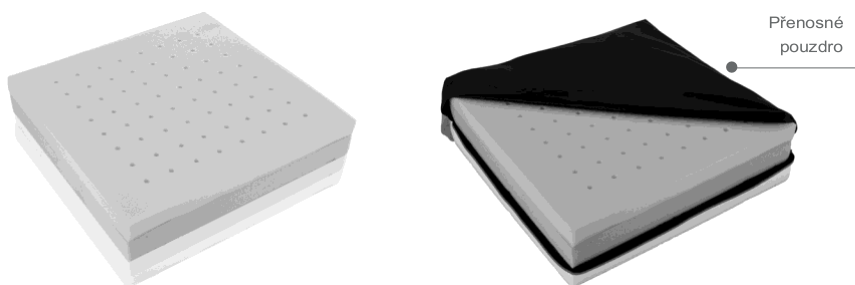

Polštáře jsou vyrobeny z viscoelastické pěny a podpůrné základny z polyuretanové pěny s odnímatelným potahem na zip. Vnitřní strana se skládá z nosné základny z polyuretanové pěny o hustotě 35 kg/m<sup>3</sup> o tloušťce 4 cm, vrchní vrstvy z viskoelastické pěny o hustotě 55 kg/m<sup>3</sup> o tloušťce 3 cm, perforované 6mm průchozími kanálky.

Potah čalounění je zhotoven pro horní část, která přichází do styku s uživatelem, z polyuretanem potažené, kapaliny nepropouštějící a paropropustné, bielastické, protiplísňové a antibakteriální tkaniny, pro spodní část, která přichází do styku s vozíkem, z protiskluzové tkaniny.

#### 7.4 Anatomické kompozitní polštáře s pevnou základnou z polyuretanové pěny ST709/40 - ST709/42 - ST709/44 - ST709/46 - ST709/48 - ST709/50

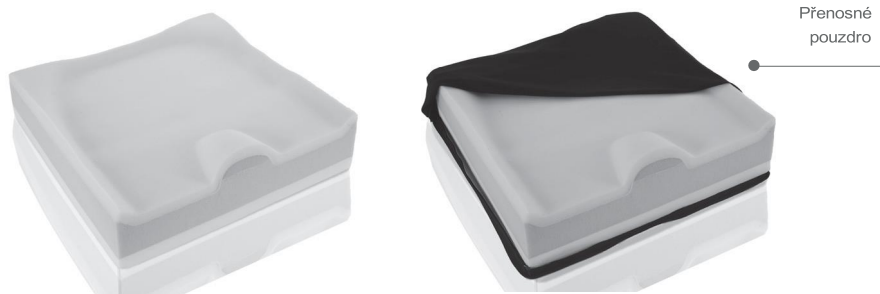

Polštáře jsou vyrobeny z polyuretanové pěny různé hustoty s potahem snímatelným pomocí zipu. Vnitřní část se skládá z pevné základny z polyethylenové pěny; anatomicky tvarované desky z polyuretanové pěny o hustotě 50 kg/m<sup>3</sup> přilepené k základně; horní desky z viskoelastické paměťové pěny o hustotě 55 kg/m<sup>3</sup> přilepené k první desce. Potah se skládá z horní části, která je v kontaktu s uživatelem, z mikrovláčna, prodyšné a bi-elastické tkaniny a ze spodní části, která je v kontaktu s vozíkem, z protisklizové tkaniny.

#### 7.5 Podsedáky se samoformovací tekutinou ST719/1 - ST719/2 - ST719/3 - ST719/4 - ST719/5 - ST719/6 - ST719/7 - ST719/8 - ST719/9



Polštáře mají pevnou předtvarovanou základnu a samovolně se formující tekutinu. Potah je snímatelný. Vnitřní část se skládá z tuhé předtvarované základny z polyethylenové pěny LD2, vysoké v přední části a nízké v zadní části, na kterou je nalepena 2 cm silná viskoelastická deska z nízkoelastické pěny. Nad sedadlem je umístěn vak, který uzavírá samomodelovací tekutinu v 200 mikronové polyuretanové fólii.

Obě části (základna a vak) jsou uzavřeny druhou membránou, PU fólií o tloušťce 300 mikronů ve spodní části a 200 mikronů v horní části.

Potah se skládá z horní části, která je v kontaktu s uživatelem, z mikrovláčna, prodyšné a bi-elastické tkaniny a ze spodní části, která je v kontaktu s vozíkem, z protisklizové tkaniny.

## 8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřebených dílů, abyste se ujistili, že zařízení lze používat zcela bezpečně.
- Umístěte zařízení tak, aby závěs směřoval k zadní straně sedadla a protiskluzová (pogumovaná) část směřovala dolů.

## 9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Nenechávejte přístroj delší dobu venku a v kontaktu s vodou.
- V případě pochybností o používání nebo údržbě výrobku se obraťte na svého prodejce.
- Abyste předešli jakýmkoli rizikům, uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

## 10. ÚDRŽBA

Přístroje řady LEVITAS by Moretti jsou při uvedení na trh důkladně kontrolovány a označeny značkou CE.

## 11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 11.1 Čištění

Údaj pro praní polštáře a potahu, pokud je k dispozici:

### **ST708/40 - ST708/42 - ST708/44 - ST708/46 - ST708/48 - ST708/50 KÓD.**

### **ST709/40 - ST709/42 - ST709/44 - ST709/46 - ST709/48 - ST709/50**

**Interiér:** doporučuje se mytí vodou s neutrálními pracími prostředky. Ždímní lze provádět buď pomocí žehličky, nebo v odstředivce při nízkých otáčkách. Sušení lze provádět v místnosti bez průvanu a slunečního svitu nebo pomocí cirkulačního ohřívače vzduchu (max. teplota 70 °C) **Vnější strana - podšívka:** Doporučujeme prát podšívku ručně s neutrálními mýdly a maximální teplotou, 40 °C u modelu ST709-xx, 60 °C u modelu ST708-xx, nebo v pračce s programem pro jemné prádlo.

### **ST712/40 - ST712/42 - ST712/45 - ST713**

**Vnitřek:** membránu lze čistit alkoholem.

**Vnější podšívka:** Doporučujeme prát podšívku s jemným mýdlem při maximální teplotě 30 °C (ST712/xx) 40 °C (ST713) nebo v pračce na program pro jemné prádlo.

### **ST716/40 - ST716/43 - ST716/46**

Lze prát v ruce nebo v pračce s neutrálními mýdly při maximální teplotě 60 °C, sušit v bubnové sušičce. Nežehlit.

### **ST719/1 - ST719/2 - ST719/3 - ST719/4 - ST719/5 - ST719/6 - ST719/7 - ST719/8 - ST719/9**

**Interiér:** Membránu obsahující polštářek lze čistit alkoholem.

**Vnější podšívka :** Doporučujeme prát.

Ruční praní s neutrálními mýdly při maximální teplotě 40 °C nebo v pračce při šetrném programu.

Řiďte se symboly na štítku. Význam jednotlivých symbolů je uveden v oddíle 6.1.



### **POZOR!**

Výrobek nelze prát. Perte poze obal, jak je uvedeno výše. Bezpodmínečně se vyhněte kyselým nebo zásaditým produktům nebo rozpouštědlům, jako je aceton nebo ředidlo.



## 12. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

## 13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KÓD	MATERIÁL	NÁTĚR	MĚŘENÍ	WEIG HT
ST708/40	Viskoelastická expandovaná pěna	Polyuretanový povlak	40x40x7 cm	2,5 kg
ST708/42	Viskoelastická expandovaná pěna	Polyuretanový povlak	42x42x7 cm	3 kg
ST708/44	Viskoelastická expandovaná pěna	Polyuretanový povlak	44x44x7 cm	3,5 kg
ST708/46	Viskoelastická expandovaná pěna	Polyuretanový povlak	46x46x7 cm	3,5 kg
ST708/48	Viskoelastická expandovaná pěna	Polyuretanový povlak	48x48x7 cm	4 kg
ST708/50	Viskoelastická expandovaná pěna	Polyuretanový povlak	50x50x7 cm	4,5 kg
ST709/40	Polyuretanová pěna	Mikrovlákno	40x40x7,5-9 cm	0,7 kg
ST709/42	Polyuretanová pěna	Mikrovlákno	42x42x7,5-9 cm	0,8 kg
ST709/44	Polyuretanová pěna	Mikrovlákno	44x44x7,5-9 cm	0,9 kg
ST709/46	Polyuretanová pěna	Mikrovlákno	46x46x7,5-9 cm	1 kg
ST709/48	Polyuretanová pěna	Mikrovlákno	48x48x7,5-9 cm	1,05 kg
ST709/50	Polyuretanová pěna	Mikrovlákno	50x50x7,5-9 cm	1,1 kg
ST712/40	Silikonový tekutý gel	Tkanina Hightex	40X40X4 cm	4 kg
ST712/42	Silikonový tekutý gel	Tkanina Hightex	42X42X4 cm	4,3 kg
ST712/45	Silikonový tekutý gel	Tkanina Hightex	45X45X4 cm	4,7 kg
ST713	Silikonový tekutý gel	Tkanina Hightex	42X42X4 cm	3,5 kg
ST716/40	Kompaktní viskoelastický	Tkanina Hightex	40x40x4,5 cm	1,8 kg
ST716/43	Kompaktní viskoelastický	Tkanina Hightex	43x43x4,5 cm	1,8 kg
ST716/46	Kompaktní viskoelastický	Tkanina Hightex	46x46x4,5 cm	1,8 kg
ST719/1	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	38x38x6,5 cm	0,9 kg
ST719/2	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	40x40x6,5 cm	0,9 kg
ST719/3	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	40x45x6,5 cm	0,9 kg
ST719/4	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	42x42x6,5 cm	0,9 kg
ST719/5	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	44x42x6,5 cm	0,9 kg
ST719/6	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	45x40x6,5 cm	0,9 kg
ST719/7	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	45x45x6,5 cm	0,9 kg
ST719/8	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	45x50x6,5 cm	0,9 kg
ST719/9	Samomodelovací kapalina	Mikrovlákno	50x45x6,5 cm	0,9 kg

**Poznámka:** Všechny výrobky jsou odolné proti vznícení podle normy EN1021-1, ale je třeba dbát na opatrnost při použití otevřeného ohně, protože výrobky se mohou vznítit.

## 14. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výjimkou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je to možné), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

### 14.1 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy právními předpisy, je omezena na záruční dobu v mezích právních předpisů. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod ve vztahu ke spotřebitelským výrobkům. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



**ZÁRUČNÍ LISTINA**

**Produkt** \_\_\_\_\_

**Zakoupeno dne** \_\_\_\_\_

**Prodejce** \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

**Prodáno do** \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) e-mail:

[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com) **MADE IN ITALY**