

SKEMA[®]

STOJAN INFUZNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

1. KÓDY.....	strana.3
2. ÚVOD.....	strana.3
3. POUŽITÍ.....	strana.3
4. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	strana.3
5. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....	strana.3
6. OBECNÝ POPIS.....	strana 4
6.1 Zobrazení a popis hliníkových dílů stojanu pro hypodermoklýzu MI432, MI433.....	strana 4
6.2 Zobrazení a popis nerezových dílů stojanů pro hypodermoklýzu MI435, MI436 ...	strana 4
6.3 Zobrazení a popis dílů stojanu na hypodermoklýzu MI437 z nerezové oceli	strana 4
7. MONTÁŽ.....	strana 5
7.1 Návod k instalaci MI432, MI433, MI435, MI436	strana.5
7.2 Návod k instalaci - MI433	strana.5
8. METODY POUŽITÍ.....	strana.5
9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	strana 6
9.1 Čištění	strana.6
9.2 Dezinfekce	strana.6
10. PODMÍNKY LIKVIDACE	strana.6
10.1 Všeobecné podmínky likvidace	strana.6
11. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA.....	strana 6
11.1 Rozměry a hmotnost	strana.6
12. ZÁRUKA.....	strana.6
13. OPRAVY.....	strana.7
13.1 Záruční opravy.....	strana.7
13.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	strana.7
13.3 Nepoškozené výrobky.....	strana.7
14. NÁHRADNÍ DÍLY.....	strana.7
15. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY	strana.7

CE - zdravotnický prostředek třídy I Legislativní nařízení č. 46 ze dne 24. 2. 1997, kterým se provádí směrnice EHS 93/42 a její následné změny.

1. KÓDY

- MI432** Hliníkový stojan infuzní se 2 háky, na kolečkách;
- MI433** Hliníkový stojan infuzní se 4 háky, na kolečkách;
- MI435** Stojan infuzní z nerezové oceli se 2 háky, na kolečkách;
- MI436** Stojan infuzní z nerezové oceli se 4 háčky, na kolečkách;
- MI437** Stojan infuzní z nerezové oceli se 4 háčky na kolečkách.

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali stojany na hypodermoklýzu SKEMAFORM by Moretti. Jejich design a kvalita zaručují maximální funkčnost, bezpečnost a spolehlivost. Stojany pro hypodermoklýzu řady SKEMAFORM by Moretti byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše potřeby. Tato uživatelská příručka obsahuje drobné tipy pro správné používání vybraného přístroje a cenné rady pro vaši bezpečnost. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí. Tato příručka se týká všech čtyř modelů řady přístrojů pro hypodermoklýzu SKEMAFORM. Prosíme, abyste se řídili pouze návodem k modelu, který jste si vybrali.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Stojan na hypodermoklýzu SKEMAFORM je zařízení pro podporu lékařských a zdravotnických činností během podávání intravenózních látek pacientovi.

POZOR!



- Je zakázáno používat následující zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo v důsledku použití jiného, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

4. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyrobený a uvedený na trh samotnou společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny stojanů pro hypodermoklýzu je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a jejich pozdějších změn. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:


1. Dotčené přístroje splňují základní požadavky přílohy I směrnice 93/42/EHS a následných změn, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje jsou uváděny na trh v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčná zařízení je třeba považovat za zařízení třídy I.
6. Není dovoleno používat a/nebo instalovat dotyčná zařízení mimo účel použití společnosti Moretti S.p.A.
7. Společnost Moretti S.p.A. uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu se směrnicí 93/42/EHS a následnými změnami.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod k obsluze.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení se určuje podle opotřebených a/nebo vyměnitelných částí a v žádném případě nepřekročí 10 let.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí

6. OBECNÝ POPIS


6.1 Zobrazení a popis hliníkových dílů infuzního stojanu MI432, MI433

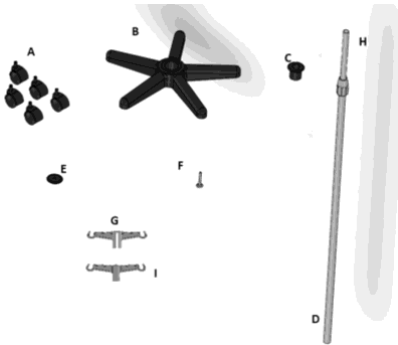

Seznam dílů:

- A. Kolečka pro základnu (5ks)
- B. Podstavec (1ks)
- C. Redukce pro tyč (1 kus)
- D. Zvedací tyč, spodní část (1ks)
- E. Plastová podložka (1 ks)
- F. Pojistný šroub s podložkou (1ks)
- G. Plastový držák háčku (1ks)
*(pouze MI433)
- H. Zvedací tyč, horní část (1 kus)
- I. Plastový držák háčku (1ks)


6.2 Zobrazení a popis dílů infuzního stojanu MI435, MI436 z nerezové oceli

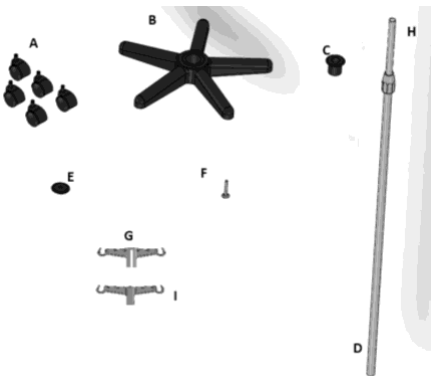

Seznam dílů:

- A. Kolečka pro základnu (5ks)
- B. Podstavec (1ks)
- C. Redukce pro tyč (1 kus)
- D. Zvedací tyč, spodní část (1ks)
- E. Plastová podložka (1 ks)
- F. Pojistný šroub s podložkou (1ks)
- G. Plastový držák háčku (1ks)
*(pouze MI436)
- H. Zvedací tyč, horní část (1 kus)
- I. Plastový držák háčku (1ks)

6.3 Zobrazení a popis dílů infuzního stojanu MI437 z nerezové oceli

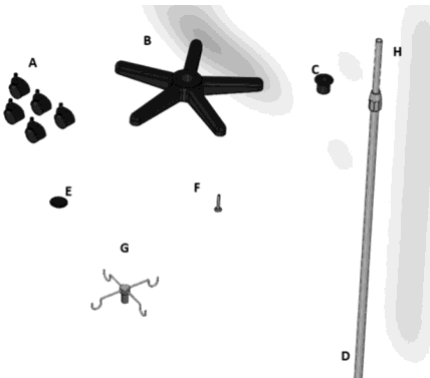

Seznam dílů:

- A. Kolečka pro základnu (5ks)
- B. Podstavec (1ks)
- C. Redukce pro tyč (1 kus)
- D. Zvedací tyč, spodní část (1ks)
- E. Plastová podložka (1 ks)
- F. Pojistný šroub s podložkou (1ks)
- G. Držák háčku z nerezové oceli (1ks)
- H. Zvedací tyč, horní část (1 kus)
- I. Držák háčku z nerezové oceli (1ks)




7. MONTÁŽ



POZOR!



Při montáži zařízení provádějte tyto operace s velkou opatrností, abyste zabránili zranění osob a/nebo poškození majetku.

7.1 Návod k montáži MI432, MI433, MI435, MI436

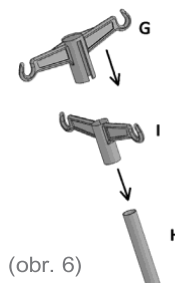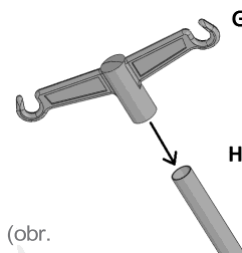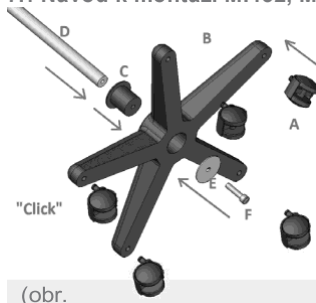

1. Vložte kolečka (č. A) do spodní části opěrné základny (č. B), dokud neuslyšíte "cvaknutí". (Obr.4)
2. Vložte redukci (č. C) do horní části podpěrné základny (č. B) (obr. 4).
3. Vložte tyč (pozn. D) do redukce (pozn. C) (obr. 4).
4. Připevněte tyč k základně pomocí šroubu (ref.F) a podložky (ref.E) (obr.4).
5. Šroub (č. F) řádně utáhněte. (Obr.4)
- 6a. MI432, MI435 - Vložte hákový držák (č. G) do horní části tyče (č. H) mírným tlakem (obr. 5).
- 6b. MI433, MI436 - Vložte držák háčku (č. G) na držák háčku (č. I) a poté lehkým tlakem do horní části tyče (č. H). (Obr. 6).
7. Vaše infuzní tyč je nyní správně sestavena a připravena k použití.


7.2 Návod k instalaci MI437

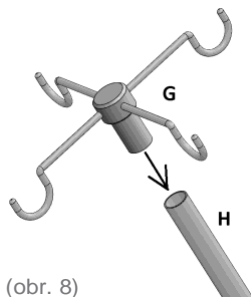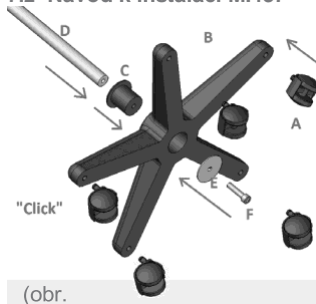

1. Vložte kolečka (č. A) do spodní části opěrné základny (č. B), dokud neuslyšíte "cvaknutí". (Obr. 7)
2. Vložte redukci (č. C) do horní části podpěrné základny (č. B) (obr. 7).
3. Vložte tyč (č. D) do redukce (č. C) (obr. 7).
4. Připevněte tyč k základně pomocí šroubu (ref.F) a podložky (ref.E) (obr. 7).
5. Šroub (č. F) řádně utáhněte. (Obr. 7)
6. Zasaňte držák háku (ref.G) do horní části tyče (ref.H) a lehce přitlačte. (Obr. 8)
7. Vaše infuzní tyč je nyní správně sestavena a připravena k použití.

8. ZPŮSOB POUŽITÍ

Chcete-li nastavit výšku infuzní tyče, uvolněte objímku otáčením proti směru hodinových ručiček, poté nastavte trubku do požadované výšky a objímku opět utáhněte.

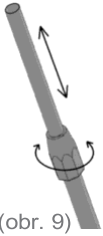

(obr. 9)

UPOZORNĚNÍ:

- Před každým použitím sloupek zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný, což by mohlo zhoršit jeho funkci. V takovém případě sloupek nepoužívejte;
- Vždy dbejte na to, aby poloha podnožky zaručovala maximální pohodlí a bezpečnost pacienta, zvláštní pozornost věnujte pohybu na kolečkách;
- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení na hák uvedené v technických specifikacích.

9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE**9.1 Čištění**

K čištění výrobku použijte pouze hadřík namočený ve vodě a otřete jej do sucha čistým, suchým hadříkem nebo vlažnou vodou a jemným mýdlem.

**POZOR!**

Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových dílů a rezavění kovových povrchů.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií použitých při čištění.

9.2 Dezinfekce

V případě potřeby výrobek vydezinfikujte pomocí jemného dezinfekčního prostředku.

10. PODMÍNKY LIKVIDACE**10.1 Obecné podmínky likvidace**

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

11. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Podstavec s tvarovanou polypropylenovou základnou pro hypodermoklýzu
- 5 otočných koleček Ø50 mm
- Nastavení tyče pomocí knoflíku
- Tvarované háčky ABS (MI432-MI433-MI435-MI436)
- Maximální nosnost na háku 5 kg

11.1 Rozměry a hmotnost

Kód	Výška (min/max)	Rozměry základny (mm)	Maximální přípustná nosnost na hák	Maximální přípustný průtok
MI432	1330 mm/2300 mm	500 mm	5 kg	10 kg
MI433	1330 mm/2300 mm	500 mm	5 kg	20 kg
MI435	1170 mm/2030 mm	500 mm	5 kg	10 kg
MI436	1170 mm/2030 mm	500 mm	5 kg	20 kg
MI437	1170 mm/2030 mm	500 mm	5 kg	20 kg

12. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud

), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

13. OPRAVY

13.1 Záruční oprava

V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení záruční výrobek vyměnit nebo opravit, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravu nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

13.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka Výrobek, na který se nevztahuje záruka, můžete vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem převzetí opraveného výrobku.

13.3 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

14. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí náhradního dílu.

15. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**SKEMA®****ZÁRUČNÍ LISTINA**

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

P r o d e j c e _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Ulice _____ Umístění _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.comemail

