
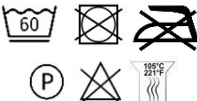





Uživatelský manuál/ Návod k použití

Antidekubitní sedáky do invalidních vozíků

Pro zjištění bezpečnosti si prosím před použitím výrobku důkladně přečtěte následující uživatelský manuál.

Produktový název	XSEAT®	XSEAT® clinic GELSEAT® clinic**	XSEAT® light	GELSEAT®
Obsah balení	Sedák s pěnovým jádrem a PU-TEX potahem vč. zipu, Návod k použití			
Indikace	Nebezpečí vzniku dekubitů – stupeň 4 (EPUAP) Vysoké riziko	Nebezpečí vzniku dekubitů – stupeň 4 (EPUAP) Vysoké riziko	Decubitus prophylaxis	Nebezpečí vzniku dekubitů – stupeň 4 (EPUAP) Vysoké riziko
Kontraindikace	není			
Rozsah použití	Nebezpečí vzniku dekubitů – stupeň 4 (EPUAP) Vysoké riziko	Nebezpečí vzniku dekubitů – stupeň 4 (EPUAP) Vysoké riziko	Decubitus prophylaxis	Nebezpečí vzniku dekubitů – stupeň 4 (EPUAP) Vysoké riziko
Hmotnost uživatele	20 kg - 120 kg	20 kg - 120 kg	20 kg - 120 kg	20 kg - 120 kg
Materiál	PUR pěna, potah – PU, nylon	PUR pěna Potah - PU HR pěna/gel(clinic)**	PUR pěna Potah - PU	PUR pěna, potah – PU, nylon
Velikosti	Viz produktový štítek			
Max. hmotnost uživatele	20 kg - 120 kg	20 kg - 120 kg	20 kg - 120 kg	20 kg - 120 kg
Hmotnost produktu	1,5 kg	1,5 kg	0,5 kg	1,5 kg
Zdravotnický výrobek třídy 1 dle 93/42 EWG				
Třída bezpečnosti / požární ochrana	DIN EN 597 I + II // BS 7175 sec 3 crib 5			
Biokompatibilita	DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1			
Bezpečnostní pozn.	žádná			
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Čištění (potah)				

Čištění/údržba/další použití

Domácí péče	Klinické použití
Během používání	
Očištění potahu hadříkem nebo čisticím prostředkem	Očištění potahu hadříkem nebo čisticím prostředkem
Po změně uživatele	
Očištění potahu hadříkem nebo čisticím prostředkem	Očištění potahu hadříkem nebo čisticím prostředkem
Desinfekce pěnového jádra autoklávem	Desinfekce pěnového jádra autoklávem
Další údržba není nutná	

Instrukce pro použití

- Vyjměte sedák z krabice.
- Umístěte sedák na židli či do inv. vozíku. Držák musí být vepředu a šipky musí směřovat vzhůru ↑

Výrobce

Funke Medical AG
 Ährenfeld 10
 46348 Raesfeld
 Německo
 Tel.: (+49) 2865/266 93 50
 Fax: (+49) 2865/8133
info@funke-medical.de
www.funke-medical.de