

Návod k použití

2017-06-07

CuroCell® Nova CX13

CuroCell® Nova CX19

System se střídavým tlakem

Návod k použití pro produkt číslo: 95-001062



7 331345 021584



Obsah

Důležitá bezpečnostní opatření	3
Úvod	4
Popis výrobku	5
Sestavení / Instalace	7
Provoz	8
Čištění a opravy	19
Uskladnění	12
Údržba	12
Řešení problémů	13
Technický popis	14
Náhradní díly	16
Doplňky a příslušenství	17
Záruka	18
Další informace	19

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ

Před použitím si přečtěte celý návod.

Varování! Chcete-li minimalizovat riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo tělesného zranění:

1. Produkt smí být používán pouze k určenému účelu popsanému v tomto návodu k použití. Produkt nesmí být kombinován, sestavován nebo opravován s použitím jiných částí (např. kompresoru nebo matrace), příslušenství nebo náhradních dílů než těch, které jsou popsány v tomto návodu nebo v jiné dokumentaci od společnosti Care of Sweden.
2. Nepoužívejte tento produkt ve vlhkých místnostech nebo tam, kde je riziko, že kompresor přijde do styku s vodou nebo jinou kapalinou. Nikdy se nedotýkejte kompresoru, který přišel do styku s vodou/kapalinou. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odešlete produkt autorizovanému servisnímu technikovi na servis.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** produkt v blízkosti zdrojů vznícení nebo horkých povrchů, např. ohně, zapálených cigaret nebo horkých lamp, a zabraňte kontaktu s nimi. Přestože produkt byl testován na požární odolnost, mohl by být při kontaktu se zdroji vznícení poškozen.
4. Produkt umístěte a používejte takovým způsobem, aby nemohl být zachycen nebo poškozen. **UPOZORNĚNÍ:** Zvláště dávejte pozor na možnost poškození při zachycení při používání zábradlí lůžka.
5. Nikdy produkt nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka kompresoru, je-li poškozen kryt kompresoru nebo kompresor nefunguje správně. obraťte se na autorizovaný servis, aby kompresor zkontroloval a opravil.
6. Pravidelně kontrolujte funkčnost produktu ruční kontrolou (viz oddíl 4.4). Rovněž kontrolujte komfortní nastavení dle tabulky u pumpy.
7. Neustálý dohled je nutný, je-li produkt používán pro osoby, které potřebují zvláštní dohled, například děti.
8. Matrace jsou chráněny hygienickou pokrývkou; snažte se vyhnout současnému použití většího počtu hygienických pokrývek na této matraci. Existuje riziko, že prostupnost výparů může být narušena.
9. Hygienická pokrývka neumožňuje pronikání kapalin nebo vzduchu, ale propouští výpary. Pacient musí být v takové poloze, aby nehrozilo nebezpečí udušení.
10. Zabraňte poškození hygienického potahu ostrými předměty či objekty.
11. Pokud je potah dodáván s madly na dlouhých stranách, tato madla mohou být používána pouze pro zvedání a přenášení samotné matrace. Všechna jiná použití jsou na vaši vlastní zodpovědnost a nevztahuje se na ně záruka na produkt

1. Úvod

Vzduchové matrace CuroCell® fungují podle principu střídavého tlaku, dlouhodobě používané osvědčené techniky. Ke střídavému tlaku dochází, když se pravidelně střídá tlak mezi buňkami matrace a replikuje tak pohyb těla. Variabilní tlakové cykly jsou nastaveny tam, kde je malý nebo žádný tlak. To je optimální pro zotavení pokožky, nebo aby nedošlo k poškození pokožky.



Před použitím si vždy přečtěte návod k použití.


1.1 Obecné informace

Tento systém je zdravotnický prostředek a je označen značkou CE v souladu se směrnicí MDD 93/42/EEC. Podle zákonných předpisů pro zdravotnické prostředky je výrobce povinen nahlásit všechny nehody nebo události týkající se těchto produktů. Budeme velice vděční za všechny údaje o nehodách a událostech týkajících se našich výrobků a za jejich okamžité nahlášení společnosti Care of Sweden. Systém byl testován a schválen dle následujících norem: IEC 600601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

1.1 Určené použití

CuroCell® Nova CX je výměnná matrace s odlehčovacím systémem se střídavým tlakem. Matraci lze použít ve všech typech prostředí s poskytováním péče k prevenci proleženin, jakož i léčbě proleženin až do kategorie 2(1). Produkt je k dispozici ve dvou verzích. CuroCell® Nova CX13 se pokládá na klasickou matraci (není to náhrada matrace). CuroCell® Nova CX19 je výměnná matrace a pokládá se přímo na rám postele. Matrace je určena k použití pro osoby s doporučenou minimální výškou 120 cm. Doporučená hmotnost uživatele je až 150 kg.

Matrace by měla být používána pouze v poloze vleže v podélném směru na matraci s chodidly u konce s označením symbolu chodidel.

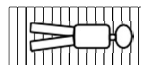

Matraci je nutné po každém pacientovi vyčistit.

CuroCell® Nova CX je výměnná matrace s odlehčovacím systémem se střídavým tlakem. Matraci lze použít ve všech typech prostředí s poskytováním péče k prevenci proleženin, jakož i léčbě proleženin až do kategorie 2(1). Produkt je k dispozici ve dvou verzích. CuroCell® Nova CX13 se pokládá na klasickou matraci (není to náhrada matrace). CuroCell® Nova CX19 je výměnná matrace a pokládá se přímo na rám postele. Matrace je určena k použití pro osoby s doporučenou minimální výškou 120 cm. Doporučená hmotnost uživatele je až 150 kg.

Upozornění:

- U některých pacientů, například po amputaci, neplatí doporučená minimální hmotnost. Tito uživatelé však mohou mít jiné požadavky, protože celá matrace není zatížena. Popis ovládacích prvků najdete v oddílech 4.2, 4.3 a 4.4.
- Při používání společně s polohovacími polštáři si pečlivě přečtěte návod k použití, aby byla zajištěna správná poloha pacienta.
- Používáte-li tento produkt společně s evakuační podložkou, musí ošetřující personál zajistit, aby bylo použití při evakuaci bezpečné.
- Při používání zábradlí lůžka nebo jiných zábran na posteli dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení nebo poškození matrace.
- Matrace nesmí být zvedána, pokud na ní leží pacient, ani nesmí být používána k jinému druhu manipulace než k případné evakuaci s použitím evakuační podložky.
- Tato matrace není vhodná pro použití při rentgenovém vyšetření z důvodu rizika rozmazání snímků nebo vzniku artefaktů, které mohou vést

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.2 Další informace

Akční plán proti proleženinám

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku pro tento produkt, je doporučeno vytvořit dobře naplánované a dobře strukturované pracovní prostředí. V našem návodu „Akční plán“ najdete příklady, které lze aplikovat a zavést do praxe při používání našich produktů.

Průvodce matracemi

Tento praktický návod vám jako poskytovateli péče pomůže při výběru správné matrace ze sortimentu Care of Sweden. CuroCell® AUTO4 je matrace funkční skupiny C. Tyto informace lze nalézt na našich webových stránkách www.careofsweden.com nebo můžete kontaktovat náš zákaznický servis tím, že pošlete zprávu na info@careofsweden.se (viz kontaktní informace na poslední straně).

2. Popis produktu

2.1 Pumpa a matrace

1. Matrace
2. CPR (Rychlé vyfouknutí)
3. Konektor pumpy (kompresoru)
4. Pumpa


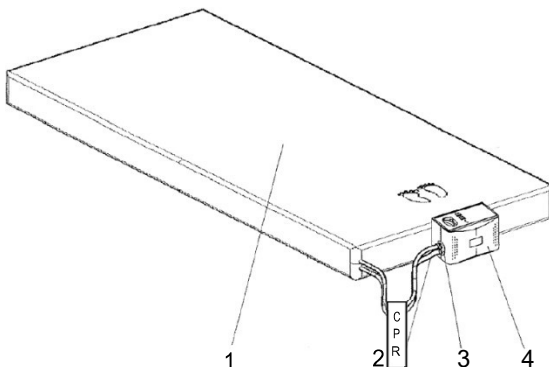


Schéma matrace


CuroCell Nova CX13

3 hlavové buňky. 9 větraných buněk (pokud je jimi produkt vybaven).

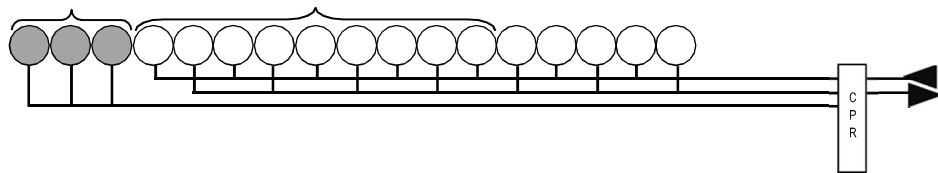


CuroCell Nova CX19 s pěnovým jádrem


3 hlavové buňky. 9 větraných buněk (pokud je jimi produkt vybaven).

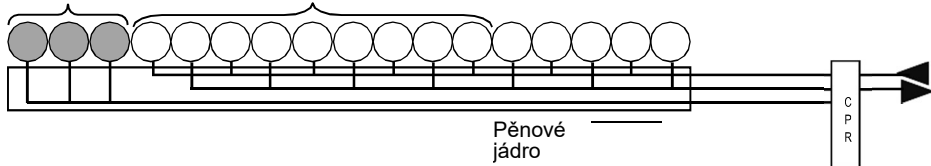

2.2 Pumpa

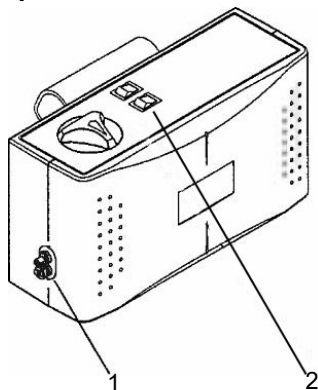


1 Konektor hadiček
2 On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

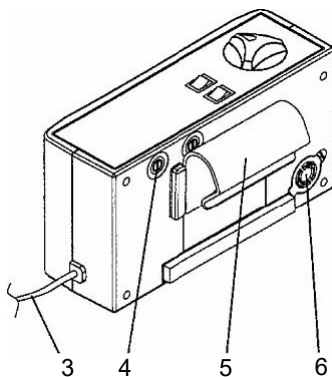

3 Napájecí konektor 5 Závěsný hák
4 Pojistky (2 ks) 6 Vzduch. filtr

2.3 Funkce pumpy – kontrolní panel

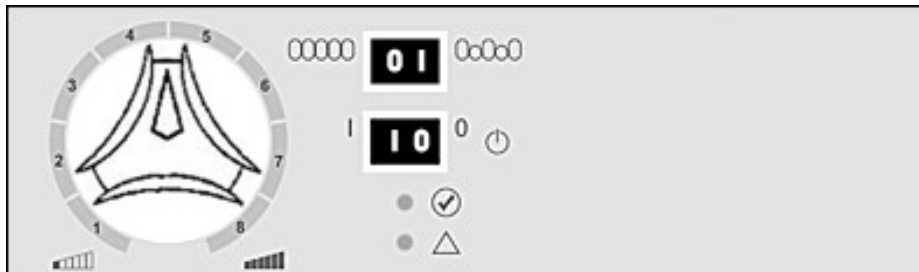

00000 / 00000 Přepnutí statického a dynamického nastavení (0/1).



=Režim 1=Dynamické nastavení, s výjimkou hlavových buněk se všechny ostatní nafouknou. V intervalu 10 minut se tlak v jednotlivých buňkách mění. Doporučujeme používat převážně tento režim.



=Režim 0=Statické nastavení, stejný tlak ve všech buňkách. Po stisknutí tlačítka se vypne režim 1 a tlak ve všech buňkách se postupně vyrovná. Tento režim může být využit v případech péče o pacienta, např. změna polohy, přesun z / do postele nebo ošetření.



Vypnuto/Zapnuto (off/on), (1/0).



Nastavení vhodného tlaku pro optimální komfort pacienta (1-8). Tabulka nastavení je umístěna na pumpě. **UPOZORNĚNÍ!** Pokud chcete zvednout přední část postele (hlava pacienta), tlak musí být vždy nastaven alespoň na stupeň 1!




Kontrolka – matrace je připravena k použití.



Alarm nízkého tlaku. Více informací v oddílu 8, řešení problémů.

3. Sestavení / Instalace

Při rozbalování matrace zkontrolujte, že žádná z částí není poškozena. V případě poškození se před použitím výrobku obraťte na výrobce nebo na místního dodavatele.

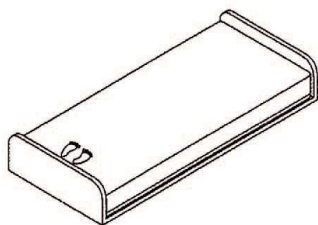


1. Pokud má matrace pěnové jádro (CuroCell® CX19) umístěte ji přímo na rám lůžka. Pomocí pásek na potahu upevněte matraci k pohyblivým částem lůžka.

Model CuroCell® CX19, umístěte přímo na matraci a následně ho pomocí pásek kolem matrace upevněte.

Upozornění!


- Pro zlepšení komfortu pacienta použijte prostěradlo.
- Ujistěte se, že je CPR ventil zavřený.
- Je-li postel výškově nastavitelná, matrace musí být připevněna pouze k pohyblivým částem postele.
- Zkontrolujte buňky a patentky, aby bylo zajištěno správné připojení.

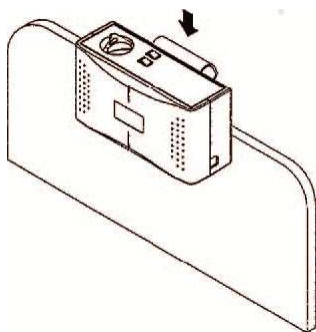


2. Pověste kompresor na konec lůžka u chodidel nebo jej postavte na rovný, pevný povrch.

Ved'te napájecí kabel tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí, přejetí kolečky postele nebo skřípnutí, když se postel zvedá nebo snižuje.

Je-li použit držák kabelu (volitelné): uvolněte úchyty, uložte napájecí kabel do kapsy a upevněte úchyty.

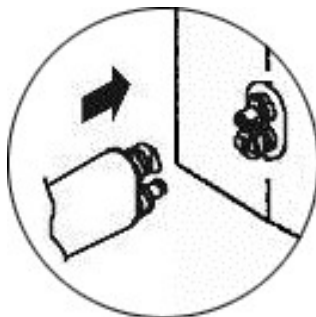

3. Připojte vzduchové trubice z matrace k boku kompresoru. Jsou-li konektory správně připojeny, uslyšíte „cvaknutí“.

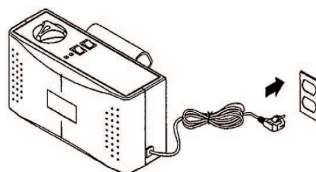

4. Zkontrolujte, zda je vypínač na kompresoru v poloze 0 (OFF). Zapojte zástrčku do schválené elektrické zásuvky (220 V).


4. Provoz



Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte návod k použití.

4.1 Spuštění

1. Zapněte pumpu stisknutím tlačítka "1" (On).
2. Matrace se začne plnit vzduchem. Nafouknutí matrace trvá přibližně 20 minut.
3. V případě nutnosti si může pacient lehnout ještě před plným nafouknutím. Pokud je jako podložka použita jiná, vzduchem plněná matrace, musí být plně nafouklá.

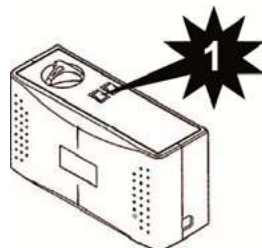


UPOZORNĚNÍ! Při nafouknutí matrace po jejím spuštění doporučujeme mít nastavení tlaku na maximum.



4.2 Výběr režimů

Na výběr jsou dvě nastavení, viz sekce 2.3. Doporučujeme především používat dynamické nastavení.

4.3 Nastavení tlaku/komfortu

Tlak vzduchu v matraci může být nastaven dle pacientových požadavků. Ideální nastavení vždy konzultujte s odpovědnou osobou či ošetřujícím personálem.

1. Dle tabulky na pumpě nastavte ovladačem optimální tlak.
2. Pokud svítí kontrolka , matrace je připravena k použití.

kg		
0-40	1	2
50-60	2	3
70-80	3	4
90-100	4	5
110-120	5	6
130-140	6	7
150	7	8

www.careofsweden.se

UPOZORNĚNÍ!

- V případě zvednutí čela postele musí být tlak nastaven alespoň na úroveň 1.
- Pokud je zatížena pouze část matrace, např. u případů amputace, předepsaný tlak musí být zvýšen o 1 až 2 úrovně.
- Vždy ručně překontrolujte tlak. Více v sekci 4.4.
- Doporučená hmotnost uživatele do 150 kg.

4.4 Ruční kontrola

Ruční kontrola se používá k zajištění správného nahuštění matrace. To by mělo být prováděno pravidelně jednou za směnu a po změně polohy na posteli nebo po změně nastavení komfortu.

Vložte ruku mezi vzduchové buňky přímo pod pánevní oblast uživatele a natočte ruku vertikálně. Přesvědčte se, že pacient neleží přímo na spodní matraci. Mezi podložkou a spodní matrací by měla být mezera na 1 – 2 prsty.

Pokud není mezera dostatečná a cítíte pacientovo tělo na ruce, je třeba zvýšit tlak v matraci o stupeň výš. Vyčkejte 10 minut a proveďte znovu ruční kontrolu.




4.5 CPR

V případě nouzové situace vyžadující CPR (Kardiopulmonální resuscitace): Rychle zatáhněte za CPR pásku a odstraňte rychlospojky na straně kompresoru, aby došlo k co nejrychlejšímu vyfouknutí matrace.

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že je CPR páska po použití opět správně upevněna.



4.6 Nízký tlak

V případě příliš nízkého tlaku v matraci začne svítit kontrolka . Ta zhasne po obnovení normálního tlaku.

Více v části 8 – Řešení problémů.

UPOZORNĚNÍ!

Je-li tlak vzduchu stále nízký, zkontrolujte, zda matrace a trubice nejsou poškozeny. Proveďte opravu podle potřeby nebo se obraťte na výrobce nebo místního dodavatele.


4.7 Funkce pro manipulaci/transport

Je-li nutné převézt či polohovat pacienta přímo na lůžku, trubice mohou být spojeny dohromady (odpojeny od kompresoru) a matrace uvedena do „přepravního režimu“. Doporučujeme používat tento režim pouze pro krátká časová období.



4.8 Funkce paty (vč. zpětných ventilů – volitelné)

Tato funkce umožňuje zmírnění tlaku na paty. Odpojte vzduchovou buňku, která je přímo pod patou. Tato vzduchová buňka se poté vyprázdní a uleví patám pacienta. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka (1) a odpojením konektoru. Buňku ponechte na svém místě v matraci. Vzduchová buňka se aktivuje opětovným připojením.

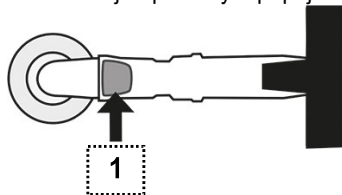

5 Čištění a opravy

Před použitím produktu pro jiného uživatele je důležité dodržet níže uvedené pokyny. Poradte se s odpovědnou osobou nebo s dodavatelem, nejste-li si jistí.

5.1 Čištění

PUMPA

VAROVÁNÍ!

- Neotvírejte kryt kompresoru – riziko úrazu elektrickým proudem. Servis a údržba musí být prováděny autorizovanými techniky.
- Kompresor nesmí být mokrý a nesmí být ponořen do žádné tekutiny.



Otřete kompresor vlhkým hadříkem a mírným čisticím prostředkem pro tento účel, jako je: alkohol s tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztoky nebo chlor o koncentraci max 1%. Používáte-li jiný prostředek, vyberte takový, který nemá vliv na kryt kompresoru.

POTAH MATRACE



Potahy lze otřít mírným čisticím roztokem pro tento účel, jako je: alkohol s tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztok nebo chlor o koncentraci max. 1 %. Skvrny od výkalů a krve je nutné ihned odstranit pomocí studené vody. Pečlivě dodržujte místní pokyny a pokyny k použití čisticího prostředku.

Vícevrstvé potahy je potřeba před vypráním oddělit. Perte společně s podobnými barvami.



Čisticí prostředky na bázi chloru a fenolu mohou mít negativní dopad na PU povrch a nesmí se používat. Při použití chloru doporučujeme použít směs o max. koncentraci 1 %.

VNITŘNÍ POTAH A KOMFORTNÍ TKANINA (příslušenství)



Čistěte zasaženou oblast mírným čisticím roztokem pro tento účel, jako je: alkohol s tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztok nebo chlor o koncentraci max. 1 %.

5.2 Opravy a čištění

PUMPA

Instrukce v sekci 5.1.

MATRACE

1. Odpojte trubice a nechte vyjít vzduch a také otevřete CPR ventil.
2. Sundejte potah. Informace o čištění potahů najdete v kapitole 5.1. Je-li výrobek vybaven pěnovým jádrem, mělo by být vyjmuto a vyčištěno odděleně.
3. Přeneste matraci na čisté místo, které je vhodné pro čištění.
4. Otřete buňky, všechny trubice a CPR ventil mírným čisticím roztokem pro tento účel, jako je: alkohol s tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztoky nebo chlor o koncentraci max. 1 %. Nechte uschnout.
5. Otřete a dezinfikujte všechny pracovní plochy čisticím prostředkem na bázi alkoholu určeným pro tento účel.
6. Složte matraci dohromady. Pokud se buňky z nějakého důvodu uvolní z trubiček, musí být vráceny podle výkresu v kapitole 2.1.

PĚNOVÉ JÁDRO



Čistěte pouze jemným čisticím prostředkem pro tyto účely např.: alkohol s tenzidy nebo bez tenzidů, isopropanol 70%, oxidační roztoky nebo chlor o koncentraci max. 1 %.

Lehce vyždímejte zbytky vody. Potah nepřehýbejte ani nerolujte. Nechte ho zcela uschnout na suchém a větraném místě (ne na přímém slunci). Před dalším použitím musí být vše zcela suché!

UPOZORNĚNÍ!

Při každém čištění produktu zkontrolujte hygienický potah. Poškozený potah je potřeba vyměnit nebo opravit. Během čištění také zkontrolujte kompresor, konektory trubice a napájecí kabel. Poškozené části musí být vyměněny nebo opraveny.

6. Uskladnění


Matraci a kompresor lze nejlépe uskladnit v tašce na produkt (volitelné doplňky). Zacházejte se zabaleným produktem opatrně. Nepokládejte na něj nic těžkého.

7. Údržba

7.1 Obecně


1. Zkontrolujte, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny nebo poškrábány.
2. Zkontrolujte, zda je potah matrace neporušený a zda jsou potah a vzduchové buňky správně sestaveny.
3. Zkontrolujte, zda se proudění vzduchu střídá mezi jednotlivými výstupy na straně kompresoru.
4. Zkontrolujte, zda nejsou trubice nebo konektory poškozené nebo skřípnuté.
5. obraťte se na výrobce nebo na místního dodavatele ohledně náhradních dílů.

7.2 Výměna pojistek

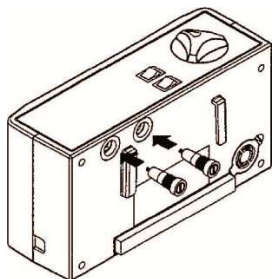

1. Před výměnou pojistek vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
2. Šroubovákem odstraňte krytku pojistky. Vytáhněte držák pojistky.
3. Vložte novou pojistku stejného typu T1AL, 250 V a našroubujte ochrannou krytku zpět na místo. Jsou zde dvě pojistky.

7.3 Výměna vzduchového filtru

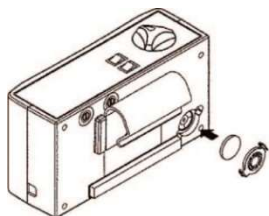

1. Odšroubujte malou kulatou krytku na zadní straně kompresoru.
2. Vyjměte filtr z držáku
3. Vložte nový filtr do držáku a vraťte krytku zpět.

8. Řešení problémů

Problém	Řešení
Kompresor nelze spustit	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do zásuvky. Zkontrolujte pojistky.
Alarm=matrace se vypouští	Zkontrolujte rychlospojky ke vzduchovým trubicím na straně kompresoru, zda jsou konektory správně připojeny. Zkontrolujte, zda je CPR ventil (ventily) uzavřen. Otevřete matraci a zkontrolujte netěsnosti vzduchových buněk nebo trubic. Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory trubic správně namontovány a připojeny.
Žádný vzduch v hlavových buňkách	Když se matrace nafukuje, 4 statické hlavové buňky jsou nafouknuty jako poslední.
Pacient klesá či propadá	Upravte nastavení tlaku a vyčkejte několik minut. Zkontrolujte, zda je CPR ventil uzavřen. Zkontrolujte těsnost buněk a trubic. Proveďte znovu ruční kontrolu, viz sekce 4.4.
Matrace se na lůžku pohybuje	Zkontrolujte, zda je podložka připevněná k matraci pomocí pásek. Pokud se jedná o samostatnou matraci, zkontrolujte u pevnění k rámu postele.
Méně vzduchu v buňkách	To je normální, protože proudění vzduchu se střídá mezi druhou buňkou po nastavenou dobu cyklu (jeden cyklus =10 minut).
Hlučná pumpa, Citelné vibrace	Zkontrolujte, jak je kompresor zavěšen na posteli. Může dojít k rezonanci v částech postele. Sundejte kompresor a poslouchejte, zda lze rozeznat rozdíl. Problém lze vyřešit umístěním kompresoru na rovnou, stabilní plochu nebo vložení ručníku mezi kompresor a postel.

Pokud Vám informace výše nepomohly, obraťte se na společnost Care of Sweden nebo na vašeho lokálního prodejce.

9. Technický popis

9.1 Technické údaje

PUMPA		SPECIFIKACE
Model		CuroCell® Nova
Napětí		220 V-240 V, 50-60 Hz
Příkon		0.05 A
Typ pojistky		T1AL, 250 V
Trvání 1 cyklu		10 min
Rozměry (DxŠxV)		25 x 13.5 x 9.5 cm
Hmotnost		1.8 kg
Okolní prostředí	Teplota	Provoz: 10°C -40°C
		Uskladnění: -15°C -50°C
		Přeprava: -15°C -70°C
	Vlhkost	Provoz: 10% -90% nekondenzující
		Uskladnění: 10% -90% nekondenzující
	Atmosférický tlak	700hPa-1013, 25hPa
Klasifikace		Třída II, Typ BF, IP2X
MATRACE		SPECIFIKACE
Model		CuroCell® Nova CX13/ Nova CX19
Rozměry (DxŠxV)		80/85/90/105/120x200/210x13/19 cm
Hmotnost		5.2 kg (80x200 cm, 8.5 kg s pěnovým jádrem)

POZNÁMKA: Společnost Care of Sweden si vyhrazuje právo kdykoli upravit specifikaci produktu.

VAROVÁNÍ!

Pečlivě dodržujte pokyny k použití a údržbě, aby nedošlo k úrazu, jakož i poškození produktu nebo jiného vybavení.

9.2 Označení štítky

Matrace jsou označeny názvem produktu, datem výroby, číslem produktu, velikostí, pokyny pro péči a praní, čárovým kódem EAN, jakož i prostor pro vaše vlastní označení (např. název oddělení či jméno pacienta). Na produktu je rovněž označena horní a dolní strana a umístění hlavy a nohou.

9.3 Definice symbolů



Položka č.



Výrobce

XXXX-XX-XX

rok-měsíc-den



Umístění nohou



Přečtěte si návod k použití



Funkční skupina



Označeno značkou CE dle MDD 93/42/EEC



Recyklace



Není komunální odpad, řiďte se pokyny pro recyklaci



Doporučená hmotnost uživatele



Uživatelské informace
Kategorie



Uložte přímo na rám postele



Protiskuzové



Funkce paty



Neprat v pračce



Prát na 70°C



Prát na 95°C



<1%
Chlór



Lze sušit v sušičce



Nelze sušit v sušičce



Sušit odkapáním



Nežehlit



Nečistit chemicky



Otřít



Zařízení třídy II (Dvojitá izolace)



Typ BF



Třída IP (stupeň krytí)



Rozsah teplot



Pacient smí na matraci ležet pouze v podélném směru

10. Náhradní díly

Pro CuroCell® Nova CX13

Číslo dílu	Popis	Velikost
295-080200	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	80x200 cm
295-080210	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	80x210 cm
295-085200	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	85x200 cm
295-085210	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	85x210 cm
295-090200	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	90x200 cm
295-090210	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	90x210 cm
295-105200	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	105x200 cm
295-120200	Potah Olivia, šedý, zip po třech str.	120x200 cm

Pro CuroCell® Nova CX19 (matrace s pěnovým jádrem)

Číslo dílu	Popis	Velikost
CC-906010	Horní díl Olivia, šedá	80x200 cm
CC-906011	Horní díl Olivia, šedá	80x210 cm
CC-906012	Horní díl Olivia, šedá	85x200 cm
CC-906013	Horní díl Olivia, šedá	85x210 cm
CC-906014	Horní díl Olivia, šedá	90x200 cm
CC-906015	Horní díl Olivia, šedá	90x210 cm
CC-906016	Horní díl Olivia, šedá	105x200 cm
CC-906018	Horní díl Olivia, šedá	120x200 cm
CC-905610	Spodní díl CuroCell	80x200 cm
CC-905611	Spodní díl CuroCell	80x210 cm
CC-905612	Spodní díl CuroCell	85x200 cm
CC-905613	Spodní díl CuroCell	85x210 cm
CC-905614	Spodní díl CuroCell	90x200 cm
CC-905615	Spodní díl CuroCell	90x210 cm
CC-905616	Spodní díl CuroCell	105x200 cm
CC-905618	Spodní díl CuroCell	120x200 cm

Číslo dílu	Popis	Velikost
CC-901001	Buňka, PU	80x13 cm
CC-901002	Buňka, PU	85x13 cm
CC-901003	Buňka, PU	90x13 cm
CC-901004	Buňka, PU	105x13 cm
CC-901005	Buňka, PU	120x13 cm
CC-8217	Pojistka (set 2 ks)	
CC-8202	Vzduchový filtr	

Pokud potřebujete jiné náhradní díly, požádejte o pomoc společnost Care of Sweden nebo vašeho místního prodejce.

11. Doplnky a příslušenství

11.1 Doplnky

Komfortní tkanina

U pacientů, kteří jsou citliví na kolísání tlaku v matraci, lze přes vzduchové buňky položit polstrovaný vnitřní potah, který zvýší pohodlí.

Oddíl paty

Pro odlehčení citlivých pat jsou k dispozici dvě možnosti. Vyprazdňování vzduchových buněk pomocí zpětných ventilů nebo spodních vzduchových buněk.

Odolná transportní taška

Taška určená k transportu a uskladnění matrace

Uchycení prostěradla

Pomocný doplněk pro AUTO4 pomáhá fixaci prostěradla na matraci. Uchycení se provádí šesti klipy na každou matraci.

Držák kabelu (pouze pro CuroCell® Nova CX19)

Kapsa vedená po delší straně matrace k uložení kabelu. Malé riziko poškození kabelu.

POZOR! Pouze pro nové objednávky

11.2 Příslušenství

Pro CuroCell® Nova CX13

Číslo dílu	Popis	Velikost
CC-9093	Taška	80/85/90 cm
CC-9094	Taška	105/120 cm

Pro CuroCell® Nova CX19 (s pěnovým jádrem)

Číslo dílu	Popis	Velikost
CC-907210	Komfortní tkanina	80x200 cm
CC-907211	Komfortní tkanina	80x210 cm
CC-907212	Komfortní tkanina	85x200 cm
CC-907213	Komfortní tkanina	85x210 cm
CC-907214	Komfortní tkanina	90x200 cm
CC-907215	Komfortní tkanina	90x210 cm
CC-907216	Komfortní tkanina	105x200 cm
CC-907218	Komfortní tkanina	120x200 cm
58-900909	Taška	80/85/90 cm
58-900905	Taška	105/120 cm

11.3 Další příslušenství

Pro zajištění maximální úrovně pohodlí doporučujeme používat příslušenství od společnosti Care of Sweden, protože naše produkty jsou navrhovány tak, aby byly vzájemně kompatibilní. Příslušenství nebo další informace o našich produktech získáte u společnosti Care of Sweden nebo u vašeho místního prodejce.

12. Záruka

12.1 Rozsah záruky

Na tento systém CuroCell® je poskytována 2letá záruka na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na normální opotřebení ani na poškození výrobku v důsledku nedbalosti nebo nesprávného zacházení či péče.

12.2 Servis a údržba

Tato matrace CuroCell® je zdravotnickým zařízením podle MDD 93/42/EEC, které se používá jako pomůcka při prevenci a léčbě proleženin. Proto doporučujeme pravidelný servis a kontrolu kompresoru, aby byla zachována jeho funkčnost a výkon. Jako jiná technická zařízení, tak i kompresor, o který je řádně pečováno, funguje lépe a vydrží déle.

Servis a údržbu musí vždy provádět pracovníci společnosti Care of Sweden nebo autorizovaní technici. Používejte pouze náhradní díly schválené společností Care of Sweden. Při použití neschválených náhradních dílů platnost záruky zaniká.

Závady a poškození v rámci záruky jsou vyřešeny bezplatně.

Reklamacje je potřeba nahlásit společnosti Care of Sweden před vrácením produktu.

12.3 Předpokládaná životnost

Předpokládaná životnost tohoto produktu je odhadnuta na 5 let.

13. Další informace

13.1 Demontáž a recyklace

S výjimkou některých částí kompresoru je možné energetické využití téměř všech materiálů v produktech CuroCell® spalováním v zařízeních na spalování odpadů.

Kompresor:

Použitý kompresor CuroCell® nesmí být rozmontován. Místo toho musí být předán do recyklačního střediska a rozříděn jako elektronický odpad.

Matrace:

Požitou matraci CuroCell® je potřeba odevzdat do recyklačního střediska jako hořlavý odpad. Další informace získáte od společnosti Care of Sweden nebo od vašeho místního dodavatele (REPA, El-Kresten AB).

13.2 Reklamace a stížnosti

Stížnosti musí být oznámeny dodavateli. Při vrácení produktu postupuje podle pokynů dodavatele a vrácení lze provést až po oznámení stížnosti. Poškození vinou přepravy by mělo být oznámeno přepravnímu agentovi.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň



 **care of sweden**
Supporting Life

Kontakt:

Telefon: + 46 771 106600

Fax: + 46 325 12840

Email: info@careofsweden.se

Web: www.careofsweden.com

Korespondenční adresa:

Care of Sweden AB

P. O. Box 146

SE-514 23 Tranemo

SWEDEN

Sídlo firmy:

Fabriksgatan 5A

SE-514 33 Tranemo

SWEDEN

Doručovací adresa:

Byns väg 4A

SE-514 33 Tranemo

SWEDEN