



MOPEDIA®

OCELOVÉ CHODÍTKO

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

| | |
|--|-------|
| 1. OZNAČENÍ..... | STR.3 |
| 2. ÚVOD..... | STR.3 |
| 3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ..... | STR.3 |
| 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ | STR.3 |
| 5. OBECNÁ VAROVÁNÍ..... | STR.4 |
| 5.1 Obecná varování..... | STR.4 |
| 5.2 Varování pro použití..... | STR.4 |
| 5.3 Varování pro montáž a skládání | STR.4 |
| 6. SYMBOLY | STR.5 |
| 7. OBECNÝ POPIS..... | STR.5 |
| 8. PŘED POUŽITÍM..... | STR.5 |
| 9. MONTÁŽNÍ INSTRUKCE..... | STR.5 |
| 9.1 Před montáží produktu | STR.5 |
| 9.2 Rozevírání chodítkou | STR.6 |
| 9.3 Skládání chodítkou..... | STR.6 |
| 9.4 Nastavení madel..... | STR.6 |
| 9.5 Zavírání chodítkou..... | STR.6 |
| 9.6 Košík..... | STR.6 |
| 9.7 Sedadlo..... | STR.6 |
| 10. JAK POUŽÍVAT..... | STR.6 |
| 11. BRZDY | STR.7 |
| 11.1 Použití brzd | STR.7 |
| 11.2 Zajištění kol..... | STR.7 |
| 11.3 Odjištění kol..... | STR.7 |
| 12. ÚDRŽBA..... | STR.7 |
| 13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE..... | STR.7 |
| 13.1 Čištění..... | STR.7 |
| 13.2 Dezinfekce..... | STR.7 |
| 14. PÉČE O KOLA..... | STR.8 |
| 15. PODMÍNKY LIKVIDACE..... | STR.8 |
| 16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI..... | STR.8 |
| 17. ZÁRUKA..... | STR.8 |
| 18. OPRAVY..... | STR.8 |
| 18.1 Záruční oprava..... | STR.8 |
| 18.2 Oprava nekrytá zárukou..... | STR.9 |
| 18.3 Zařízení bez závad..... | STR.9 |
| 19. NÁHRADNÍ DÍLY..... | STR.9 |
| 20. VÝJIMKY..... | STR.9 |

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 Evropského parlamentu a Rady ze dne
5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. OZNAČENÍ

RH520 ocelové chodítko se 4 koly a se sedadlem APOLLO^{HD}

2. ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení chodítka MOPEDIA z nabídky produktů společnosti Moretti S.p.A, které bylo vytvořeno, aby lidem s pohybovými obtížemi usnadnilo pohyb venku, vevnitř, během cest či v každodenním životě. Tento návod k použití obsahuje doporučení pro správné používání tohoto produktu a pro vaši bezpečnost. Doporučujeme vám si pečlivě přečíst tento návod před použitím produktu. V případě pochybností se prosím obraťte na svého prodejce.

Poznámka: Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození jakýchkoliv částí výrobku během přepravy. V případě poškození produkt nepoužívejte. Další pokyny vám poskytne váš prodejce.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného používání.
- Výrobce si vyhrazuje právo upravit zařízení či změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Toto chodítko je vhodné pro osoby s pohybovými problémy. Může být použito jako pomůcka pro usnadnění chůze nebo jako chodítko se servopohonem. Každopádně jej nemohou používat lidé s evidentní poruchou funkce ruky nebo paže, dokonce ani lidé s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít vevnitř i venku. Doporučujeme chodítko používat na rovném povrchu, na který dosáhnou kola. Nelze jej použít na skalnatém terénu nebo na šikmé ploše, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě osob nebo věcí.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moretti S.p.A. na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobek vyrobený a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny CHODÍTKA - MOPEDIA vyhovuje ustanovením nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Zařízení splňují požadavky obecné bezpečnosti a výkonu požadované přílohou I nařízení 2017/745 a stanovené přílohou IV výše uvedeného předpisu.
2. Zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍMI NÁSTROJI.
3. Zařízení NEJSOU VYROBENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v NESTERILNÍM BOXU.
5. Zařízení patří do třídy I v souladu s ustanovenou přílohou VIII výše uvedeného předpisu.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od poslední výrobní série.

Poznámka: Kompletní označení produktů, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou obsaženy v prohlášení EU o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých informačních kanálů.

5. OBECNÁ VAROVÁNÍ

Obecná varování

- NEINSTALUJTE ani nepoužívejte zařízení, dokud si nepřečtete tento návod a neporozumíte mu;
- Pokud nejste schopni porozumět varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se před instalací tohoto zařízení na prodejce zdravotnického prostředku nebo technický personál, aby nedošlo ke zranění nebo poškození;
- Chodítka by měli používat pouze pacienti s vhodnou motorickou kapacitou, která zajišťuje jeho používání bez rizika;
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, abyste určili správné nastavení a správné použití;
- Lékař nebo terapeut by měl pomoci s nastavením výšky pro maximální podporu, s nastavením správné aktivace brzdy a s celkovou montáží;
- Chodítka nejsou určeny k použití jako samohybná zařízení.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s tímto produktem, výrobcí a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

Varování pro použití

- Ujistěte se, že je brzdové lanko správně nastaveno.
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, aby se zabránilo ohýbání lanka;
- Porušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
- Chodítka lze používat pouze na tvrdém, rovném povrchu. Nepoužívejte chodítka při chození po schodech;
- Vždy se opírejte o obě madla, abyste udrželi rovnováhu;
- Věnujte zvláštní pozornost mokru, ledu nebo sněhu;
- Nepřetěžujte chodítka;
- Nepoužívejte sedadlo chodítka (je-li k dispozici) k přepravě osob nebo majetku, sedadlo je určeno pro sezení se zataženou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být kdykoli během používání v kontaktu s podlahou, aby bylo zajištěno správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
- Před použitím sedačky je nutné zabrzdit.

Poznámka: Když je chodítka používáno v nehybné poloze, musí být zatažena ruční brzda

Varování pro montáž a skládání

- Zkontrolujte, zda jsou obě podpůrné trubky rukojetí správně zasunuty do konstrukce a zajištěny pojistnými knoflíky upevněnými v držáku pomocí křídlových matic a knoflíků;
- Ověřte, že jsou obě trubky opěrátka bezpečně zajištěny v hlavní nosné části křídlovými maticemi a knoflíky;
- Na konstrukci rozloženého chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a ohrožení stability. Vlivem deformací může dojít ke zraněním.
- Při rozevirání a zavírání chodítka dávejte pozor na zachycení prstů a/nebo oděvu.

6. SYMBOLY

-  Označení produktu
-  Unikátní identifikace zařízení
-  Označení CE
-  Výrobce
-  Šarže
-  Přečtěte si návod k použití
-  Zdravotnické zařízení
-  Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS



8. PŘED POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

- Že jsou všechny části chodítka bezpečně zajištěny;
- Že jsou všechny šrouby utaženy;
- Že je sedadlo správně umístěno a zajištěno (pokud ne, zatlačte na sedadlo, dokud nezapadne do správné pozice)
- Stav opotřebení materiálů, abyste zaručili naprostou bezpečnost používání tohoto zařízení

9. MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Před montáží produktu

Rozbalte produkt a zkontrolujte, že nedošlo k poškození vlivem přepravy. V případě, že je produkt poškozen, neváhejte a kontaktujte svého prodejce.

Rozevírání chodítka

Rozevřete chodítko zatáhnutím za přední část konstrukce zatímco chodítko stojí na zadních nohách. Umístěte trubky rukojetí. Otáčejte pojistnými knoflíky dokud nejsou uzamčeny.

Skládání chodítka

Přitáhněte přední část konstrukce.

Nastavení madel

Nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků. Odšroubujte knoflíky, umístěte rukojeti do požadované výšky, otáčením knoflíků ve směru hodinových ručiček jej utáhněte a znovu upevněte. Opakujte pro druhou rukojet' a ujistěte se, že jsou obě rukojeti umístěny ve stejné výšce.



VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že rukojet' je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud rukojet' nezůstane rovná, může dojít k riziku zakolísání nebo převrnutí chodítka, zvláště pokud na něj silněji zatlačíte.

Zavírání chodítka

Chodítko zavřete zatáhnutím za postranní tyče a přitáhnutím přední části konstrukce.



VAROVÁNÍ!

Nepokládejte do košíku horké, ostré nebo těžké předměty.

Pro připevnění košíku ke konstrukci vložte podpěru, která je na zadní straně košíku, do odpovídajících štěrbin na sedadle.

Košík

Nákupní košík je zavěšen na chodítko a je přístupný zvednutím sedáku.



VAROVÁNÍ! Košík používejte pouze na drobné předměty.



VAROVÁNÍ!

Nepřetěžujte košík, abyste jej zachovali vyvážený a aby nedošlo k převrácení.

Sedadlo

Před usednutím umístěte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zajistěte brzdy. Ujistěte se, že jsou brzdy bezpečně zajištěny a že je chodítko ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ!

Posadte se tak, abyste rovnoměrně rozložili váhu na sedadlo. Nesedte pouze na jedné straně sedadla.

10. JAK POUŽÍVAT CHODÍTKO

- Chodítko začněte tlačit ve vzpřímené poloze s oběma rukama na rukojetích;
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli riziku uklouznutí;
- Chodte ve vzpřímené poloze s očima dopředu a ne dolů;

- Chodítka netlačte příliš daleko od svého těla, to může způsobit pád nebo nevhodné zatížení;
- Nepoužívejte chodítka k překonání schodů vyšších než 20 mm;
- Při venkovním použití preferujte chodníky řádně upravené v souladu s předpisy pro bezbariérový přístup;

11. BRZDY

Dobrá funkce brzd závisí na opotřebení a nečistotách nahromaděných na kolech. Před každým použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

Použití brzd

Chcete-li chodítka zabrzdit, zatáhněte prsty za brzdovou páku nahoru, dokud se chodítka nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu chodítka, uvolněte brzdovou páku.

Zajištění kol

Zatlačte dlaní na brzdovou páku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, kola jsou pak zajištěna.



VAROVÁNÍ! Když se uživatel nepohybuje, musí být brzdy zajištěny.

Odjištění kol

Zatáhněte za obě brzdové páčky, dokud nejsou odblokovány.

12. ÚDRŽBA

Zařízení MOPEDIA od Moretti SpA jsou na trhu pečlivě zkontrolována a nesou označení CE. Pro bezpečnost pacienta i lékaře se doporučuje, aby výrobce nebo schválená laboratoř alespoň každé 2 roky zkontrolovala vhodnost použití vašeho chodítka. Při opravách se používají pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Životnost výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

K čištění opěradla a konstrukce použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla (ve stejných poměrech) smíchaný s vodou.

Výrobce není zodpovědný za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

Dezinfekce

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.



VAROVÁNÍ!

Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, čistý alkohol, čističe na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezivění kovových povrchů.

14. PÉČE O KOLA

- Očistěte kola teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Otřete do sucha čistým hadříkem.
- Pravidelně promazávejte kola.

15. PODMÍNKY LIKVIDACE










Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím městských sběrných dvorů pro zajištění předpokládané recyklace použitých materiálů.

16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

APOLLO^{HD}

| | |
|---------------------|----------------|
| Produktové označení | RH520 |
| Sedadlo | 46 x 33 x 5 cm |
| Konstrukce | Ocel |

Váha a rozměry

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  váha |
| RH520 | 68 | 78 94 | 55 sedadlo | 75 | 60 | 12.3 | 20 | 20 | 200 |

17. ZÁRUKA

Na produkty Moretti je poskytována záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu, s výjimkou možného vyloučení nebo omezení následujícím způsobem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravou zařízení a záruka nebude platná, pokud nebudou přesně dodržovány pokyny k použití. Správné zamýšlené použití je specifikováno v tomto návodu. Moretti nenese odpovědnost za následné škody, zranění osob nebo cokoli způsobené chybnou instalací nebo nesprávným použitím zařízení nebo v souvislosti s nimi. Moretti neručí za škody způsobené následujícími: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo opravy, závady způsobené problémy s dodávkou elektřiny (je-li to nutné), použití náhradních dílů, které nejsou od společnosti Moretti, nesprávné použití, neoprávněná úprava, poškození přepravou (odlišnou od původní zásilky Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

18. OPRAVY

Záruční oprava

Pokud produkt společnosti Moretti během záruční doby vykazuje materiálové nebo výrobní chyby, Moretti se zákazníkem odhadne, zda lze závadu pokrýt zárukou. Moretti může podle svého nevyvratitelného uvážení opravit nebo vyměnit produkt u prodejce produktů Moretti nebo ve vlastní prodejně. Pracovní náklady může nést Moretti, pokud je oprava kryta zárukou. Oprava nebo výměna neprodlužuje záruku.

Oprava nekrytá zárukou

Výrobek bez záruky může být vrácen po autorizaci společností Moretti. Náklady na opravu a přepravu produktu mimo záruku hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy je poskytována záruka 6 měsíců od převzetí zboží.

Zařízení bez závad

Zákazník bude informován, pokud po vrácení zařízení a kontrole Moretti prohlásí, že zařízení není vadné. V tomto případě bude zboží zasláno zpět zákazníkovi, poštovné hradí zákazník.

19. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí.

20. VYJÍMKY

Moretti nenabízí žádná další prohlášení, záruky nebo podmínky, explicitní nebo implicitní, včetně možných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování a nezasahování, vše kromě toho, co je výslovně uvedeno v této záruce. Moretti nezaručuje nepřetržitě a bezchybné používání. Doba trvání případných implicitních záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země nepovolují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení pro náhodné škody. V takových zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá z těchto výjimek nebo omezení. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Prodejce _____

Adresa _____ Místo _____

Zákazník _____

Adresa _____ Místo _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

VYROBENO V ČR

