



MOPEDIA®

Duo



NÁSTAVEC NA WC VYMĚKČENÝ

RP440

Návod k obsluze

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS.....	2
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....	2
MONTÁŽ.....	2
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:.....	3
ÚDRŽBA	3
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	3
Čištění.....	3
Dezinfekce	3
PODMÍNKY LIKVIDACE	3
Obecné podmínky likvidace	3
ZÁRUKA.....	3
OPRAVY	3
Záruční opravy.....	3
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	4
Neoprávněná reklamace	4
NÁHRADNÍ DÍLY	4
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	4

OZNAČENÍ

RP440 Nástavec na WC 10 cm vyměkčený

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení nástavce na WC MOPEDIA. Nástavce byly navrženy a vyrobeny tak, aby vyhovovaly vašim potřebám pro praktické, správné a bezpečné použití. Tato příručka obsahuje rady pro správné používání zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme pečlivě si přečíst celou příručku před použitím tohoto výrobku. V případě pochybností se obraťte na prodejce.

ÚČEL POUŽITÍ

Nástavec na WC a bidet je zařízení, které pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu při vykonávání potřeby.

VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k obsluze.
- Výrobce/ dodavatel vylučuje jakoukoliv zodpovědnost z možných následků vzniklých nesprávným používáním zakoupeného výrobku a jakýchkoliv neautorizovaných úprav výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu obsahu tohoto dokumentu bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:


1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

OBEČNÁ VAROVÁNÍ

- Před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý manuál;
- Pro správné používání výrobku se vždy poradte se svým lékařem nebo terapeutem;
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Výrobek je balený do kartonu;
- Životnost výrobků je dána přirozenou mírou opotřebení dílů vlivem běžného používání;
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění;
- Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí.

OBECNÝ POPIS

Zvýšený nástavec z plastového materiálu.

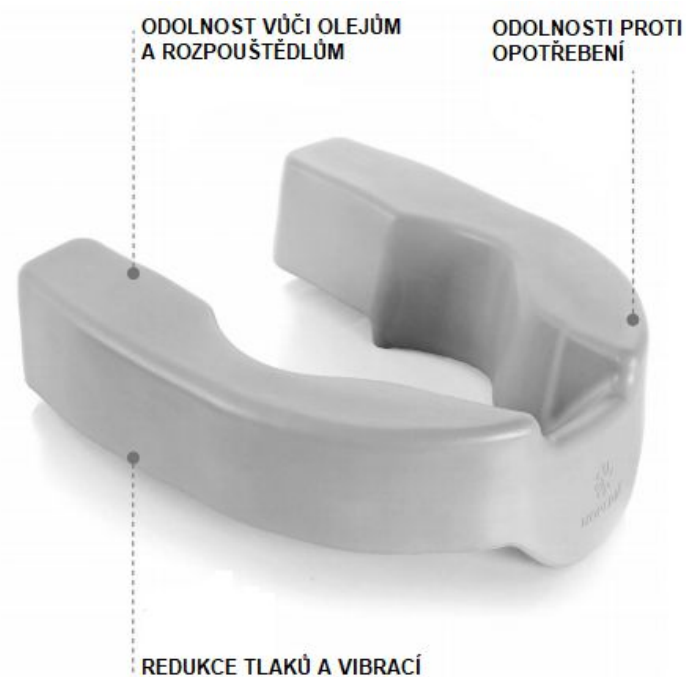

UPOZORNĚNÍ


MATERIÁL EVA = Etylén Vinyl Acetát je elastomerní polymer, z něhož se produkují velice pružné a měkké materiály na bázi gumy. Vyniká tuhostí při nízkých teplotách a odolností proti tvorbě trhlin pod napětím.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda tvar nástavec pasuje na toaletu;
- Ujistěte se, že nástavec je umístěn na správném místě;
- Zkontrolujte stabilitu nástavce, aby nedošlo k vyklouznutí.

MONTÁŽ

Umístěte nástavec na toaletu případně bidet dle obrázku

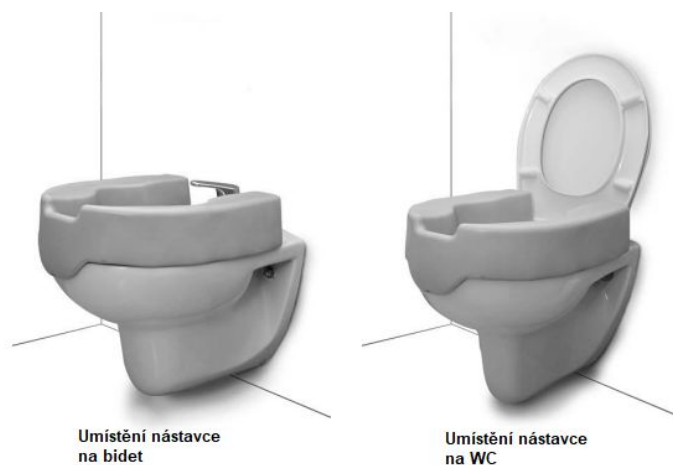

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Vnější rozměry: 34,6 x 46,3 cm
- Výška nástavce: 10 cm
- Hmotnost: 1,5 kg

ÚDRŽBA

Zařízení řady MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost uživatele se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována autorizovaným servisem každé 2 roky. V případě opravy je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím dobře osušte.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte rozpouštědla s přísadkou acetonu nebo ředidla. Je povoleno používat kyseliny a rozpouštědla jako jsou bělidla, chlór atd. Nelze vkládat do autokláva.

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravdu

přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.
tel: +420 725 323 111
www: www.stamed.cz
email: obchod@stamed.cz
adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň