



MOPEDIA®

HLINÍKOVÁ CHODÍTKA

NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

1. KÓDY	STR. 3
2. ÚVOD	STR.3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STR.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STR.3
5. VAROVÁNÍ	STR. 4
5.1 Obecná varování	str. 4
5.2 Varování pro použití	str. 4
5.3 Upozornění týkající se stability	str. 4
5.4 Upozornění týkající se montáže a skládání	str. 4
6. SYMBOLY	STR. 5
7. PŘED POUŽITÍM	STR.5
8. NÁVOD K MONTÁŽI	STR.5
8.1 Před montáží výrobku.....	str. 5
8.2 Montáž a demontáž RP503	str. 5
8.3 Montáž a demontáž RP590	str. 6
10. BRZDY	STR. 6
10.1 Brzdění	str. 6
10.2 Ruční brzda	str. 6
11. PÉČE A ÚDRŽBA.....	STR.6
12. ČIŠTĚNÍ	STR.7
13. ÚDRŽBA KOL	STR.7
14. TECHNICKÉ ÚDAJE	STR.7
15. PODMÍNKY LIKVIDACE	STR.7
16. NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ	STR. 7
17. ZÁRUKA	STR. 7
17.1 Opravy.....	str.8
17.2 Náhradní díly	str. 8
17.3 Výjimky.....	str.8



NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP503 Skládací chodítko pro vnitřní použití LUNA**RP590** Nákupní chodítko KOMBY

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali chodítko řady MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A. Chodítka řady MOPEDIA vyráběné společností Moretti S.p.A. jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje užitečné pokyny pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím zakoupeného chodítka doporučujeme pečlivě si přečíst celý návod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne odbornou radu nebo pomoc.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je vhodný pro osoby s pohybovými problémy. Může být použit jako pomůcka pro usnadnění chůze. Nelze jej však používat u osob s evidentní poruchou funkce rukou nebo paží, ani u osob s poruchami rovnováhy. Chodítko lze používat uvnitř i venku. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde kola dosáhnou na zem. Nelze jej používat na kamenitém povrchu nebo na nakloněné ploše, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě osob.



UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A. nenesе žádnou odpovědnost za následky nesprávného použití tohoto produktu a za neoprávněné zásahy do konstrukce produktu.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyrobený a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny CHODÍTKA - MOPEDIA je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Zařízení splňují požadavky na obecné bezpečnostní a výkonnostní vlastnosti stanovené v příloze I nařízení 2017/745, jak je uvedeno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE.
3. Zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou balena v NESTERILNÍM OBALU.
5. Zařízení patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. VAROVÁNÍ

5.1 Obecná varování

- NEINSTALUJTE ani nepoužívejte zařízení, dokud si nepřečtete a neporozumíte tomuto návodu. Pokud nerozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, před instalací tohoto zařízení se obraťte na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál, abyste předešli zranění nebo poškození.
aby nedošlo ke zranění nebo poškození.
- Chodítko by měli používat pouze pacienti s odpovídající motorickou schopností, která zajišťuje jeho bezpečné používání.
- Správné nastavení a použití konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Lékař nebo terapeut by měl pomoci s nastavením výšky pro maximální oporu, správnou aktivaci brzd a celkovou montáž.
- Chodítka nejsou určeny k použití jako samohybná zařízení.
- Uživatel a/nebo pacient je povinen nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, jehož je uživatel a/nebo pacient občanem, veškeré závažné nehody, ke kterým došlo v souvislosti s používáním zařízení.n

5.2 Varování pro použití

1. Zajistěte správné nastavení brzdového lanka.
2. Po každém nastavení výšky zkontrolujte správnou funkci brzdy, aby se zabránilo volnému ohýbání lanka.
3. Porušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit zranění osob.
4. Chodítko lze používat pouze na tvrdém, rovném povrchu. Chodítko nepoužívejte k výstupu po schodech.
5. Opírejte se vždy o obě činky (RP503) nebo o opěrnou tyč (RP590), abyste udrželi rovnováhu.
6. Zvláštní pozornost věnujte mokrému, zledovatělému nebo zasněženému povrchu;
7. Chodítko nepřetěžujte;
8. Nepoužívejte sedadlo chodítka (je-li součástí) k přepravě osob nebo majetku, sedadlo je určeno pro uživatele se zapnutou parkovací brzdou;
9. Všechna kola musí být během používání vždy v kontaktu s podlahou, aby byla zajištěna správná rovnováha chodítka a maximální bezpečnost;
10. Před použitím sedadla musí být zapnutá brzda.

Poznámka: Při použití chodítka ve stabilní poloze musí být ruční brzda zajištěna.

5.3 Upozornění týkající se stability

- Chodítko může poskytovat pomoc při chůzi osobám s hmotností až 136 kg, VČETNĚ zavazadlové tašky.
- Maximální nosnost tašky RP590 je 15 kg.
- Taška na chodítko RP503 má hmotnostní omezení 5 kg.

5.4 Upozornění k montáži a skládání

- Zkontrolujte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojetí správně zasunuty do rámu a zajištěny aretačními knoflíky, které jsou pevně utaženy v držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků, aby se nemohly pohybovat.
- Obě rukojeti jsou pevně uchyceny v hlavní nosné části pomocí křídlových matic a knoflíků, takže se nemohou pohybovat.
- Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek, když je chodítko rozložené, a poškození stability. Deformace mohou také způsobit zranění.

Poznámka: Dávejte pozor, aby se při otevírání a zavírání nezachytily prsty a/nebo oděv.

6. SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečné identifikační číslo
	Značka CE
	Výrobce
	Šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace
	Maximální nosnost

7. PŘED POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

- Zda jsou všechny části chodítka bezpečně zajištěny.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené.
- Ujistěte se, že sedadlo je správně zajištěno (pokud není „netlačte dále na spodní rám sedadla s elektrickým pohonem“).
- Zkontrolujte, zda je zámek sedadla správně zasunutý.
- Zkontrolujte správnou funkci brzdy a běžné brzdy.

8. MONTÁŽNÍ NÁVOD

8.1 Před montáží výrobku

Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy. V případě poškození chodítka se obraťte na nejbližšího prodejce.



8.2 Montáž a demontáž RP503

- Otevřete chodítko, až vyskočí zajišťovací čep.
- Výšku nastavte uvolněním plastové spony. Jakmile dosáhnete požadované výšky, sponu opět uzavřete.
- Umístěte sedadlo

Pro uzavření postupujte v opačném pořadí



UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že jsou knoflíky pevně utažené a plastová západka správně zajištěná. Před použitím se vždy ujistěte, že se chodítko nesklopí pod vlivem malé boční síly.



8.3 Montáž a demontáž RP590

- Rozložte chodítko a vyndejte zajišťovací čep.
- Výšku nastavte uvolněním plastových spon. Jakmile dosáhnete požadované výšky, spony opět uzavřete.

Pro demontáž otevřete zajišťovací úchyty snížením výšky madla na minimum a poté plastové úchyty znovu uzavřete.

Chcete-li jej zavřít, zatáhněte za látkovou rukojeť umístěnou za taškou.

9. POUŽITÍ

- Začněte tlačit, když stojíte vzpřímeně s oběma rukama na rukojeti.
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli riziku uklouznutí.
- Při chůzi udržujte vzpřímený postoj, oči směřujte dopředu, ne dolů.
- Chodítko neodsouňte příliš daleko od těla, mohlo by to způsobit pád a nesprávné zatížení.
- Chodítko nepoužívejte k překonávání schodů vyšších než 20 mm.
- Při používání chodítka s nákupním košíkem venku upřednostňujte chodníky, které jsou řádně upraveny v souladu s předpisy pro odstranění architektonických bariér.

10. BRZDY

Správná funkce brzd závisí na opotřebení a znečištění kol. Před použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

10.1 Brzdění

K zabrzdění chodítka zatáhněte prsty za brzdovou páku nahoru, dokud chodítko nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v jízdě, uvolněte brzdové páky.

10.2 Zablokování brzd (ruční brzda)

Stiskněte brzdovou páku dlaní, až uslyšíte „kliknutí“, kola jsou zablokována. Zvedněte rukojeť brzd a uvolněte ji ze zastavené polohy.



VAROVÁNÍ! Když je uživatel v klidu, musí být brzdy zablokovány.

11. PÉČE A ÚDRŽBA

Zařízení **MOPEDIA** od společnosti Moretti SpA na trhu jsou pečlivě kontrolována a nesou značku CE. Pro bezpečnost pacienta lékař se doporučuje nechatalespoň jednou za dva roky kontrolovat vhodnost použití vašeho chodítka výrobcem nebo schválenou laboratoří. V případě oprav používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Životnost produktu závisí na používání, údržbě, skladování a čištění.

12. ČIŠTĚNÍ

K čištění dílů používejte pouze vlhký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, které by mohly produkt poškodit.

13. PÉČE O KOLA

1. Kola čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Otřete do sucha čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně promazávejte.

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Série LUNA										
Kód produktu	RP503									
Podnos	35x40 cm									
Rám	Hliník									
Série KOMBY										
Kód produktu	RP590									
Sed	-									
Rám	Hliník									
Rozměry a hmotnost										
										
RP503	56	100 86	58 52	56	41	19 x 63 cm	5,5	-	13	136 kg
RP590	72	108 98	-	57	34	25 x 57 cm	7	18	20	136 kg

Rozměry jsou uvedeny v cm a mohou se lišit o 1 cm.±

* Maximální velikost

15. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro odvoz komunálního odpadu. Doporučujeme místo toho likvidaci prostřednictvím společných komunálních ekologických ostrovů pro předpokládané recyklační operace použitých materiálů.

16. NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství najdete v hlavním katalogu společnosti Moretti S.p.A.

17. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se poskytuje záruka na materiálové a výrobní vady po dobu 2 let od data zakoupení, s výjimkou následujících možných výjimek nebo omezení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami a záruka neplatí, pokud nejsou dodrženy pokyny pro použití. Správné použití je uvedeno v tomto návodu.

Společnost Moretti nenese odpovědnost za následné škody, zranění osob nebo jakékoli jiné škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení.

Společnost Moretti nezodpovídá za škody způsobené následujícími okolnostmi: přírodní katastrofy, neoprávněná údržba nebo opravy, poruchy způsobené problémy s dodávkou elektřiny (v případě potřeby), použití náhradních dílů, které nejsou pokryty zárukou společnosti Moretti, nesprávné použití, neoprávněné úpravy, poškození při přepravě (odlišné od původní dodávky společnosti Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby podle pokynů v návodu.

Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají opotřebení při správném používání zařízení.

17.1 Opravy

Záruční oprava: Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda lze vadu opravit v rámci záruky. Společnost Moretti může podle svého uvážení výrobek opravit nebo vyměnit u prodejce Moretti nebo ve svém servisu. Náklady na práci mohou být hrazeny společností Moretti, pokud je oprava kryta zárukou. Oprava nebo výměna neprodluhuje záruční dobu.

Opravy, na které se nevztahuje záruka: Produkt bez záruky lze vrátit po schválení společností Moretti. Náklady na práci a dopravu mimo záruku hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy se poskytuje záruka 6 měsíců od převzetí zboží.

Bezvadné zařízení: Pokud po vrácení a prohlídce zařízení společnost Moretti shledá, že zařízení není vadné, bude o tom zákazník informován. V takovém případě bude zboží zasláno zpět zákazníkovi, náklady na dopravu hradí zákazník.

17.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se poskytuje záruka 6 měsíců od data převzetí.

17.3 Výjimky

Moretti neposkytuje žádné další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani implicitní, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení práv a nezasahování, s výjimkou toho, co je výslovně uvedeno v této záruce. Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné používání. Trvání případných implicitních záruk, které lze stanovit podle zákona, je omezeno záruční lhůtou v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení náhrady za náhodné škody. V takových zemích se některé z těchto vyloučení nebo omezení nemusí na uživatele vztahovat.

Tato záruka může být změněna bez předchozího oznámení.



ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

P r o d e j c e _____

Adresa _____ Město _____

Prodáno _____

Adresa _____ Město _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com

E-mail: info@morettispa.com

VYROBENO V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE

* Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na našich webových stránkách.

