



MOPEDIA®



Atlante Mini



ZDRAVOTNÍ CHODÍTKO Atlante Mini RP513

Návod k obsluze

Obsah

ÚVOD	1
ÚČEL VÝROBKU	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
UŽIVATELSKÁ VAROVÁNÍ.....	2
NOSNOST	2
UPOZORNĚNÍ PRO SESTAVENÍ:	2
OBECNÝ POPIS	3
PŘED POUŽITÍM.....	3
PŘED MONTÁŽÍ.....	3
SESTAVENÍ MODELU RP513	3
<i>Složení chodítka</i>	3
<i>Nastavení rukojetí</i>	3
Složení chodítka.....	4
Nákupní košík	4
Sedadlo	4
PRAKTICKÉ POUŽITÍ	4
Brzdy.....	4
Uzamčení brzdy	4
Odblokování kol.....	4
ÚDRŽBA	4
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	4
Čištění.....	4
Dezinfekce	4
Údržba kol	5
PODMÍNKY LIKVIDACE	5
Obecné podmínky likvidace	5
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	5
ZÁRUKA.....	5
OPRAVY	5
Záruční opravy.....	5
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	6
Neoprávněná reklamace	6
NÁHRADNÍ DÍLY	6
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	6

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili chodítka z řady MOPEDIA, které pomáhá lidem s obtížemi v pohybu doma, na cestách i v každodenním životě. Výroba byla provedena podle nejvyšší kvality a bezpečnostních norem v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC).

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny ke správnému používání a bezpečnosti. Doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod k použití. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

POZNÁMKA: Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození při přepravě výrobek nepoužívejte. Pro další pokyny se obraťte na prodejce.

ÚČEL VÝROBKU

Toto chodítka je vhodné pro osoby s pohybovými problémy. Může být použito i jako pomocný prostředek k usnadnění ambulantní péče. Rozhodně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky a ramene, a to i lidé s poruchou rovnováhy. Chodítka lze použít v interiéru i exteriéru. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde se všechna kola dotýkají povrchu. Nesmí být používáno na kamenném povrchu, ani na šikmé ploše, chodítka pak může být nestabilní. Zařízení není určeno k převážení lidí nebo věcí.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavatelé nevnášají žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu zdravotních chodítek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nikdy neinstalujte ani nepoužívejte zařízení dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na obchodního zástupce nebo na technický personál před pokusem o instalaci tohoto zařízení, aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje;

- Chodítka by mělo být používáno pouze pacienty s dostatečnou motorikou, která zajistí bezpečné použití tohoto přístroje;
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem o správném nastavení a správném použití;
- Lékař nebo terapeut by měl posoudit nastavení výšky, správnou aktivaci brzdy a obecné sestavení;
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení.

UŽIVATELSKÁ VAROVÁNÍ

- Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven;
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí kabelu;
- Porušení těchto základních pravidel může způsobit osobní újmu;
- Chodítka lze používat pouze na tvrdém a rovnoměrném povrchu. Nepoužívejte přístroj pro stoupání po schodech;
- Udržujte rovnováhu vždy na obou madlech;
- Věnujte zvláštní pozornost při pohybu po vlhkém, ledovém nebo zasněženém povrchu;
- Zařízení nepřetěžujte;
- Nepoužívejte sedačku pro přepravu osob nebo majetku, sedadlo je určeno pouze pro uživatele a s aktivovanou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být během používání stále v kontaktu s povrchem, aby se zajistilo správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
- Před použitím sedadla musí být chodítka zabrzděna.

Poznámka: Pokud je chodítka používáno jako opora v nehybné poloze, musí být ruční brzda zablokována.

NOSNOST:

Chodítka může být používáno osobou s hmotností do 100 kg, VČETNĚ úložného vaku.

Max. nosnost úložného vaku je 5 kg.

UPOZORNĚNÍ PRO SESTAVENÍ:

- Ověřte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojetí správně zasunuty do rámu a pevně zajištěny pomocí zajišťovacích koleček zablokovaných do držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků bez pohybu;
- Obě rukojeti jsou bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části křídlovými maticemi a šrouby;
- Nezavěšujte nic na rám chodítka – hrozí poškození. Poškození rámu může způsobit zranění;
- Při rozkládání a skládání chodítka dbejte opatrnosti a zamezte zachycení prstů a /nebo oděvu.

OBECNÝ POPIS

RP513



PŘED POUŽITÍM

Vždy zkontrolujte:

- Všechny části chodítka jsou bezpečně zajištěny;
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;
- Ujistěte se, že sedadlo je řádně zajištěno;
- Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto;
- Zkontrolujte správnou funkci obou brzd;
- Zkontrolujte opotřebení částí výrobku, aby bylo zaručeno, že výrobek bude zcela bezpečný pro uživatele a jeho okolí.

PŘED MONTÁŽÍ

Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

SESTAVENÍ MODELU RP513

Složení chodítka

- Rozložte chodítka roztažením rámu a nohou;
- Zasuňte trubky rukojetí do rámu;

Nastavení rukojetí

Nastavte výšku rukojetí pomocí postranních knoflíků. Odšroubujte šroub, umístěte rukojeti do požadované výšky, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a opět jej utáhněte. Zopakujte s druhou rukojetí a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce.

VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že pozice rukojetí je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud rukojeť nezůstane rovná, hrozí nebezpečí, že se chodítka bude třást nebo se převrhne, zvláště pokud jej tlačíte větší silou.

Složení chodítka

Zatáhněte za postranní tyče a přisuňte přední část chodítka.

Nákupní košík

Nákupní košík je připevněn pomocí dvou háků k rámu chodítka.

VAROVÁNÍ: Používejte košík pouze pro drobné předměty. Nepřepĺňujte košík, hrozí riziko převrácení!

Sedadlo

Před usednutím umístěte chodítka na rovnou a pevnou plochu a pak zajistěte brzdy. Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítka ve stabilní poloze.

VAROVÁNÍ: Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte pouze k jedné straně.

PRAKTICKÉ POUŽITÍ

- Začněte tlačit chodítka, když jste ve vzpřímené poloze a s oběma rukama na rukojetích;
- Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché, aby se zabránilo nebezpečí sklouznutí;
- Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícími dopředu a ne dolů;
- Netlačte chodítka příliš daleko od těla, což může způsobit pády a nesprávné zatížení;
- Nepoužívejte chodítka k překonání překážek vyšších než 20 mm
- Při použití venku dávejte přednost chodníkům.

Brzdy

Jak zabrzdít

Chcete-li zabrzdít chodítka, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se chodítka zpomalí nebo se zastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu, uvolněte páčku brzdy.

Uzamčení brzdy

Stiskněte brzdovou páčku dlaní. Když uslyšíte „kliknutí“, kolečka jsou zablokována.

VAROVÁNÍ: Pokud se s chodítkem nepohybujete, vždy zabrzděte kola.

Odblokování kol

Zatáhněte za obě páčky brzdy, dokud se brzdy neuvolní.

ÚDRŽBA

Výrobky řady MOPEDIA firmy. jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost uživatele se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována autorizovaným servisem každé dva roky.

V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čistícím prostředkem. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu.

Údržba kol

Očistěte kola teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem. Kola pravidelně mažte.

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ATLANTE MINI										
Kód produktu	RP513									
Sedadlo	31x31 cm									
Konstrukce	hliník									
Rozměry a hmotnost										
Rozměry v cm										
RP513	64	71 84	50	52	45	55x21x81	5,9	15	15	max. nosnost 100 kg

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň