

11. Péče o kola

- 1) Myjte kola teplou vodou a jemnými čistícími prostředky. Utírejte suchým a čistým hadrem.
- 2) Nezapomeňte kola pravidelně promazávat.

12. Technické parametry

Hodnoty uvedené v cm

Hliníková konstrukce



59 cm



91 cm



56,5 cm



62 cm



48 cm



8,5 Kg



130 Kg

Rozměry se mohou lišit o ± 1 cm.

Návod k obsluze Čtyřkolové hliníkové chodítko se sedátkem a stupačkou GAYA

Model: RP538

Před použitím si, prosím, pozorně přečtěte tento návod k obsluze

Návod k obsluze

Čtyřkolové hliníkové chodítko se sedátkem a stupačkou GAYA

Model: RP538

Před použitím si, prosím, pozorně přečtěte tento návod k obsluze

1.	Kód produktu	strana 1
2.	Účel použití	strana 1
3.	Upozornění	strana 1
	3.1 Upozornění	strana 1
	3.2 Upozornění před použitím.....	strana 2
	3.3 Nosnost.....	strana 2
	3.4 Upozornění před sestavením.....	strana 2
4.	Před použitím produktu.....	strana 2
5.	Popis.....	strana 3
6.	Sestavení.....	strana 3
	6.1 Před sestavením produktu.....	strana 3
	6.2 Sedátko.....	strana 3
7.	Použití.....	strana 3
8.	Brzdový systém.....	strana 3
	8.1 Zabrždění.....	strana 3
	8.2 Zamykání brzdy.....	strana 3
9.	Péče a údržba.....	strana 3
10.	Čištění.....	strana 3
11.	Péče o kola.....	strana 3
12.	Technické parametry.....	strana 3

6.2. Sedátko

Předtím, než si na sedátko sednete, se ujistěte, že chodítko stojí na rovné a pevné ploše, a že ho máte pořádně zabržděné.

Pozor! Nesedejte si na sedátko jen z části.

Pozor! Ujistěte se, že jsou šrouby opravdu patřičných dírách. Před používáním vždy zkontrolujte, že skládací rozpěra nemá při malém náporu tendenci se skládat. Neotáčejte rukojeťmi, ať nezamotáte brzdové dráty.

7. Použití

- Stoupněte si k chodítku, chytněte se pevně obou řídítek a začněte pomalu tlačit chodítko vpřed.
- Ujistěte se, že jsou vaše suché, abyste zamezili možnému vyklouznutí řídítek.
- Při chůzi dodržujte správné držení těla a koukejte vždy dopředu, ne dolů.
- Netlačte chodítko až moc před sebou, mohl by hrozit pád a chodítko by mohlo odjet.
- Nepoužívejte chodítko k překonávání překážek vyšších než 20 cm.
- Při chození venku radši využijte upravené chodníky

8.Brzdový systém

8.1 Zabrždění

Pro zabrždění chodítka stlačte páku a držte, chodítko se zpomalí anebo úplně zastaví. Uvolněte páku, když budete chtít pokračovat v chůzi.

8.2 Zamykání brzdy

Stlačte páčku dlaní, až uslyšíte cvaknutí, brzda je zamčená. Zvedněte páčku, abyste uvolnili brzdu.

Pozor! Musíte mít zamčené brzdy, pokud chodítko zrovna používáte jako oporu.

Pozor! Otestujte brzdy, zda fungují, pokud jste prováděli nějaké seřizování nebo úpravy.

9. Péče a údržba

Zařízení MOPEDIA od Moretti SpA jsou pečlivě zkoušena a označena CE značkou. Doba životnosti závisí na využití, údržbě, skladování a čištění produktu.

10. Čištění

K čištění chodítka používejte pouze vlhký hadr s neutrálními čistícími prostředky, nepoužívejte žádná rozpouštědla, drátěné kartáče a drsné nebo ostré předměty, které by mohly produkt poškodit.

6.2 Sestavené chodítko



- A – Rukojeti
- B – Rám řídítek
- C – Šrouby pro nastavení výšky rukojetí
- D – Polstrovaná zádová opěrka
- E – Pojistná tlačítka sloužící k vyjmutí zádové opěrky
- F – Polstrované sedátko
- G – Brzdová páčka
- H – Brzdový drát
- I – Skládací rozpěra
- J – Přední kola
- K – Zadní kola
- L – Košík na drobné předměty

- 1) Vezměte chodítko za tyč u předního kola a za tyč u zadního kola a pomalu roztahujte směrem od sebe, dokud neuslyšíte cvaknout skládací rozpěru (I).
- 2) Zasuňte kovový rám se zádovou opěrkou (D) do úchytů přesně jako na návodu. Zatlačte na rám shora, abyste dostali pojistné tlačítko (E) na správné místo.
- 3) Zasuňte obě řídítká (B) do hlavní konstrukce tak, aby obě rukojeti (A) byly rovnoběžně se zadními koly (K). Brzdové dráty (H) vedte tak, aby drát byl vždy na vnější straně rukojetí a hlavní konstrukce. Ujistěte se, že oba brzdové dráty jsou napojeny na brzdy u zadních kol.



- 4) Nastavte si výšku řídítek (B) podle vaší potřeby. K nastavení správné výšky se postavte k chodítku, jako byste chtěli jet, uvolněte ramena, nechte ruce volně podél těla a narovnejte hlavu. V této pozici byste měli mít rukojeti (A) chodítka ve výšce vašich zápěstí. Tato výška zajistí správný úhel paží od 20° do 30°. Zajistěte řídítká pomocí šroubů (C).

- 5) Umístěte košík (L) po sedátko.

Pozor! Ujistěte se, že jsou šrouby opravdu patřičných dírách.

Pozor! Nastavte výšku chodítka tak, aby pacient, co stojí, měl řídítká ve správné výšce. Tato výška zajistí správný úhel paží od 20° do 30°.

Pozor! Používejte košík pouze pro malé věci. Nepřetěžujte košík, abyste zamezili případným rizikům. (Maximální možná nosnost košíku 4,5 kg)

1. Kód produktu

RP538 Čtyřkolové hliníkové chodítko se sedátkem a stupačkou GAYA 1.0

2. Účel použití

Chodítko je vhodné pro lidi, kteří mají problémy s chůzí. Může být využito k usnadnění pohybu nebo i k opírání. Není vhodné pro lidi s omezenou hybností rukou, paží nebo s poruchou rovnováhy. Zařízení je možné používat uvnitř i venku. Doporučujeme chodítko používat na rovných plochách, kde všechna kola mohou dosáhnout na zem. Není možné ho použít k jízdě na kamenité nebo šikmé cestě, chodítko by se stalo nestabilním. Zařízení není uzpůsobeno k převážení lidí nebo věcí.

Pozor!

- Nepoužívejte zařízení k jakémukoli jinému účelu, než je uvedeno v manuálu
- Moretti S.p.A neručí za všechny škody spojené s následky, které zavinilo nevhodné používání a s tím spojené i neoprávněné změny konstrukce produktu.
- Výrobce si vyhrazuje všechna práva ke změně informací, který obsahuje tento dokument bez předešlého upozornění.

3. Upozornění

3.1 Upozornění

- Nesestavujte a nepoužívejte zařízení před důkladným přečtením manuálu. Pokud nerozumíte upozornění, výstraze nebo pokynům, kontaktujte profesionálního zdravotníka nebo pracovníka technického oddělení před pokusem o sestavení tohoto zařízení, aby se zamezilo případnému zranění nebo poškození.
- Chodítko by mělo být používáno pouze pacienty s přiměřenými motorickými poruchami, což zajišťuje jejich použití bez rizika.
- Poradte se s fyzioterapeutem nebo lékařem, abyste zařízení správně nastavili a správně požívali.
- Fyzioterapeut nebo lékař by se měl podílet na nastavení výšky zařízení, aby byla využita jeho maximální podpora, na správné aktivaci brzdového systému a na obecné montáži zařízení.
- Chodítka nejsou myšlena jako samo poháněcí zařízení.

3.2 Upozornění před použitím

1. Zkontrolujte, že se brzdový drát nachází na správném místě.
2. Ověřte si, že brzdový systém funguje správně při každém zátěžovém testu, abyste předešli případnému uvolnění drátu.
3. Přeskočení těchto jednoduchých pravidel může vést k zranění.
4. Chodítka je možné používat pouze na tvrdých a rovných plochách. Nepoužívejte jej k chození po schodech.
5. Držte se pokaždé obou rukojetí, aby byla zachována rovnováha.
6. Dbejte patřičnou pozornost na mokré, zledovatělé nebo zasněžené plochy.
7. Nepřetěžujte chodítka.
8. Nepoužívejte sedátko chodítka k převážení lidí nebo majetku, sedátko je určeno pouze k odpočinku po zabrzdění.
9. Všechna kola musí v kontaktu s povrchem v jakoukoli dobu používání, aby došlo k zajištění správné rovnováhy chodítka a jeho maximální bezpečnosti.
10. Brzdy musí být důkladně zabrzděny před použitím sedátka.

Poznámka: Ruční brzda musí být zabrzděna, pokud je chodítka ve stabilní poloze.

11. Nepoužívejte chodítka k chůzi pozadu, k slézání nebo vycházení schodů a obrubníků nebo k obcházení překážek. Hrozí risk pádu nebo zranění.
12. Zádová opěra je určena k podpěře zad při sezení. Opěra není schopna udržet plnou zátěž těla. Omezte opírání při sezení, mohlo by dojít k pádu.
13. Nepoužívejte chodítka, když je nakládáno do vozidla nebo během jízdy ve vozidle.
14. Nepoužívejte sedátko k převozu lidí nebo věcí.
15. Nepoužívejte chodítka k opoře při vstávání ze země, pokud takto zařízení používáte déle, brzdy by mohly povolit a hrozí riziko pádu.
16. Nesnažte se chodítka rozjet, když je zabrzděné. Brzdy zabraňují kolečkům v pohybu. Nicméně, při velké snaze rozjet zabrzděné chodítka, mohou brzdy povolit.

3.3 Nosnost

- Chodítka je možné poskytnout oporu pacientům do 130 kg včetně obsahu košíku.
- Košík je schopný unést zátěž do 4,5 kg.

3.4 Upozornění před sestavením

- Ověřte si, že obě říditka jsou pečlivě upevněny do hlavního rámu a že šrouby pro nastavení výšky jsou dotaženy.
- Obě říditka jsou upevněna pomocí šroubů a matic.
- Nevěšte nic na hlavní rám chodítka, abyste se vyhnuli prohnutí nebo jinému poškození.
- Dávejte pozor na možnost skřípnutí prstů nebo oblečení při skládání a rozkládání chodítka.

4. Před použitím produktu

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

- Že všechny části chodítka jsou zamčené.
- Jestli jsou všechny šrouby dotaženy.
- Zkontrolujte, že sedátko je pevně ukotveno. (Pokud ne, zatlačte na sedátko, aby si pořádně sedlo na hlavní rám.)
- Zkontrolujte, zda jsou šrouby na sedátku dotaženy.
- Zkontrolujte správnou funkčnost brzd.

5. Popis



- 1) Hlavní konstrukce (1 ks)
- 2) Zádová opěrka s pojistnými tlačítky (1 ks)
- 3) Říditka (2 ks)
- 4) Košík na drobné předměty (1 ks)
- 5) Přední kola (2 ks)
- 6) Zadní kola (2 ks)
- 7) Šrouby pro nastavení výšky rukojetí (2 ks)
- 8) Šrouby a podložky (2 ks)

6. Sestavení

6.1 Před sestavením produktu

Rozbalte produkt a zkontrolujte, jestli nebyl poškozen během doručování. Pokud by zařízení bylo poškozené, kontaktujte prosím odesílatele.