



MOPEDIA®

SKLÁDACÍ CHODÍTKO S KOLEČKY

NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

1. KÓD	STRANA.3
2. ÚVOD	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA.3
5. UPOZORNĚNÍ	STRANA.4
5.1 Obecná upozornění	strana 4
5.2 Upozornění pro použití.....	strana 4
5.3 Upozornění na stabilitu	strana 4
5.4 Montážní upozornění	strana 4
6. SYMBOLY	STRANA.5
7. OBECNÝ POPIS.....	STRANA.5
8. PŘED POUŽITÍM	STRANA.6
9. NÁVOD K POUŽITÍ	STRANA.6
9.1 Nastavení výšky	strana 6
9.2 Brzdy	strana 6
9.3 Přední kola.....	strana 6
9.4 Zavírání rolovacího vozíku	strana 6
9.5 Sedátko	strana 7
10. NÁVOD K POUŽITÍ.....	STRANA .7
11. PÉČE A ÚDRŽBA.....	STRANA .7
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STRANA.7
12.1 Čištění	strana 7
12.2 Dezinfekce	strana 7
13. PÉČE O KOLO	STRANA.7
14. PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA.7
15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STRANA.8
16. ZÁRUKA	STRANA.8
17. OPRAVY.....	STRANA.8
17.1 Záruční opravy.....	s strana 8
17.2 Opravy, na které se nevztahuje záruka	strana 8
17.3 Zařízení bez závad	strana 8
18. NÁHRADNÍ DÍLY	STRANA.8
19. OSVOBOZENÉ DOLOŽKY	STRANA.8

 Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA RP751 02 A_ITA_11 2020

1. KÓD

RP751 Skládací chodítko 2 páky - 2 otočná kola s aretací - 2 pevná kola s brzdami

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili rolovací vozík MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A., který je určen pro pomoc lidem s pohybovými obtížemi. Při cestování nebo v každodenním životě. Tento návod k obsluze vám poskytuje doporučení pro správné používání a pro vaši bezpečnost. V případě nejasností se obraťte na svého prodejce.

Poznámka: Zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození při přepravě je nepoužívejte. Další pokyny získáte od prodejce.

POZOR!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti Spa odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z jiného použití, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce může zařízení nebo návod k použití upravit bez předchozího upozornění.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Tento vozík je vhodný pro osoby s pohybovými problémy. Lze jej použít jako asistenci pro usnadnění pohybu. Chodítko poskytuje stabilitu, oporu a bezpečnost. Každopádně jej nemohou používat osoby se zjevnou poruchou ruky, nebo paže. A to ani osoby s problémy s rovnováhou. Chodítko lze používat směrem dovníř i ven. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde kolečka dosáhnou na zem. Nelze jej používat na kamenitém podkladu nebo na šikmé ploše, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přenášení osob nebo věcí.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny ROLLATORS je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující :

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabičce NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže .

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. UPOZORNĚNÍ

5.1 Obecná varování

- Zařízení NEINSTALUJTE ani NEPOUŽÍVEJTE, dokud si nepřečtete a neporozumíte této příručce;
Pokud nerozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se před pokusem o instalaci tohoto zařízení na odborného prodejce nebo technický personál, aby nedošlo ke zranění nebo poškození;
- Roller by měli používat pouze pacienti s vhodnou motorickou kapacitou, která zajišťuje jeho používání bez rizik;
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, abyste určili správné nastavení a správné použití;
- Lékař nebo terapeut by měl přispět k nastavení výšky pro maximální oporu, pro správnou aktivaci brzd a pro celkovou montáž;
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybná zařízení.
- Uživatel/ka nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobcí a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel nebo pacient patří.

5.2 Upozornění pro použití

- Zajistěte správné nastavení brzdového lanka;
- Po každém nastavení výšky zkontrolujte správnou funkci brzdy, aby nedošlo k volnému ohybu lana;
- Porušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
- Chodítka lze používat pouze na tvrdém, rovném povrchu. Nepoužívejte chodítka ke stoupání do schodů;
- Vždy se opírete o obě činky, abyste udrželi rovnováhu;
- Zvláštní pozornost věnujte mokrému, zledovatělému nebo zasněženému povrchu;
- Chodítka nepřetěžujte;
- Nepoužívejte sedačku na rolovacím vozíku k přepravě osob nebo majetku, sedačka je určena k sezení uživatele se zataženou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být během používání vždy v kontaktu s podlahou, aby bylo zajištěno správné vyvážení vozíku a maximální bezpečnost;
- Před použitím sedačky musí být brzda zapnutá.

POZNÁMKA: Pokud je vozík používán ve stabilní poloze, musí být ruční brzda zablokována.









5.3 Upozornění na stabilitu

- Chodítka může poskytnout ambulantní pomoc osobě s hmotností až 130 kg (RP751), VČETNĚ nakládacího vaku;

5.4 Montážní upozornění

- Po otevření a sestavení vozíku zkontrolujte, zda je opěrka sedadla na obou stranách zablokována, a zkontrolujte, zda je bezpečnostní systém upevněn ve správné poloze;
- Zkontrolujte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do rámu a zajištěny pojistnými knoflíky;
- Na rám vozíku nic nevěšete, aby nedošlo k deformaci trubek, když je rolovací vozík otevřený, a poškodit tak jeho stabilitu. Ke zranění může dojít také v důsledku deformace;
- Při otvírání a zavírání dávejte pozor na zachycení prstů a/nebo oděvu.

6. SYMBOLY

-  Kód produktu
-  Jedinečná identifikace zařízení
-  Označení CE
-  Výrobce
-  Šarže
-  Přečtěte si návod k použití
-  Zdravotnický prostředek
-  Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS



8. PŘED POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

- zda jsou všechny části vozíku bezpečně zajištěny;
- zda jsou všechny šrouby pevně utaženy;
- zda je sedadlo řádně zajištěno;
- Zda je správně zasunut zámek sedadla;
- Správná funkce brzdy a pravidelné brzdy.
- Stav opotřeбенí mechanických částí v provozu, aby bylo zajištěno používání zařízení v naprosté bezpečnosti pro osoby a věci.

9. NÁVOD K POUŽITÍ

9.1 Nastavení výšky

Stisknutím tlačítka nastavte výšku. Vytáhněte tyč a věnujte pozornost příslušným otvorům až do požadované výšky, která by měla odpovídat potřebám uživatele. Poté nechte tlačítko opět stisknuté, aby se tyč zafixovala. Popsaný postup opakujte pro každou nohu, na závěr zkontrolujte, zda mají všechny čtyři nohy stejnou výšku. Maximální únosná hmotnost 130 kg.



POZOR! Dbejte zvýšené opatrnosti na mokřých a kluzkých površích, pozor na elektrické kabely, mokřé povrchy, koberce, hračky nebo odpadky, nábytek, malé schůdky a mezery v podlaze.
Nepoužívejte kolečkové křeslo na schodech nebo eskalátorech.

9.2 Brzdy

Brzdy spustíte zatažením za páčky umístěné v boční tyči vozíku (obrázek 1). Pokud chcete zablokovat zadní kola, zatáhněte za páčky směrem dolů (obrázek 2).



(obrázek. 1/2)



(obrázek. 3)



(obrázek. 4)



9.3 Přední kola

Přední kolečka mohou být jak pevná, tak otočná, pro zapnutí otočné funkce zatáhněte za odblokovací páčku umístěnou na horní straně kolečka (obrázek 3). Chcete-li vypnout pevnou funkci, stáhněte odblokovací páčku umístěnou na horní straně kolečka (obrázek 4).

9.4 Zavření rolovacího vozíku

Chcete-li kolečkové křeslo zavřít, zvedněte sedadlo a střídavě stiskněte světle modré páčky, čímž zavřete boční stranu (obrázek 5).



(obrázek 5)

9.5 Sedátko

Před usednutím postavte vozík na rovný a pevný povrch a zabrzděte. Ujistěte se, že jsou brzdy bezpečně zajištěny a že je rotoped ve stabilní poloze.



POZOR! Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte si tak, že budete tlačit pouze na jednu stranu.

10. JAK POUŽÍVAT

- Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze s oběma rukama na rukojeti;
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli riziku uklouznutí;
- Chůze ve vzpřímené poloze s očima směřujícíma dopředu, nikoli dolů;
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, mohlo by to způsobit pády a neadekvátní zatížení;
- Nepoužívejte kolečkové křeslo k překonávání schodů vyšších než 20 mm;
- Při venkovním použití dávejte přednost chodníkům řádně připraveným v souladu s předpisy pro odstraňování architektonických bariér.

11. PÉČE A ÚDRŽBA

Přístroje **MOPEDIA** by Moretti SpA na trhu jsou pečlivě kontrolovány a nesou označení CE. Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby výrobce nebo schválená laboratoř nejméně jednou za 2 roky zkontrolovala vhodnost použití vašeho vozíku. V případě oprav je třeba používat pouze originální náhradní díly a příslušenství. Životnost výrobku závisí na způsobu používání, údržby, skladování a čištění.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

12.1 Čištění

K čištění výrobku používejte pouze vlhký hadřík a osušte jej čistým a suchým hadříkem nebo teplou vodou s neutrálním mýdlem. Výrobní společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou použitím materiálů, které by mohly poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

12.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.



POZOR! Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkoholy, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekce a aceton, protože tyto látky způsobují oděr plastových dílů a narušení kovových povrchů.

13. PÉČE O KOLA

1. Kola očistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Otřete je do sucha čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně promazávejte.

14. PODMÍNKY LIKVIDACE



Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných obecních ekologických ostrovů pro předpokládané operace recyklace použitých materiálů.

15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Hliníkové kolečkové křeslo se 2 pákami - 2 otočná kola s aretací - 2 pevná kola s brzdami

Kód produktu	RP751
Sídlo	28x44 cm - Poliuretano
Rám	Alluminio

Misure in CM										
RP751	57	82 92	49 59	69	52	20	6,6	12	12	130 kg

16. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu, s výjimkou možných vyloučení nebo omezení, která jsou uvedena níže. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami a na záruku, která neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správný účel použití je uveden v tomto návodu. Společnost Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob nebo cokoliv jiného, co bylo způsobeno chybnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení nebo v souvislosti s ním. Společnost Moretti neručí za škody způsobené následujícími podmínkami: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo opravy, závady způsobené problémy na přívodu elektrické energie (v případě potřeby), použití náhradních dílů, na které se společnost Moretti nevztahuje, nesprávné použití, neautorizované změny, poškození při přepravě (odlišné od originální dodávky Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřeбенí při správném používání zařízení.

17. OPRAVA

17.1 Záruční oprava

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti se zákazníkem posoudí, zda lze vadu pokrýt ze záruky. Společnost Moretti může podle svého nezpochybnitelného uvážení položku opravit nebo vyměnit, a to u prodejce Moretti nebo na vlastní základně. Náklady na práci mohou být účtovány společností Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje záruku.

17.2 Oprava není kryta zárukou

Výrobek bez záruky lze vrátit po autorizaci společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu vanového výtahu mimo záruku hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy se vztahuje záruka 6 měsíců od převzetí zboží.

17.3 Nepoškozené zařízení

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po vrácení a kontrole zařízení prohlásí, že zařízení není vadné. V takovém případě bude zboží zasláno zpět zákazníkovi, poštovné hradí zákazník.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 měsíců od data převzetí.

19. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

Společnost Moretti neposkytuje žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani implicitní, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro daný

specifický účel, neporušování a nezasahování, vše kromě toho, co je výslovně uvedeno v této záruce. Společnost Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné používání. Doba trvání případných implicitních záruk, které mohou být uloženy ze zákona, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení náhodných škod. V takových zemích se některé z těchto vyloučení nebo omezení nemusí na uživatele vztahovat. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní prodejce _____

Adresa _____ **Obec/město** _____

Prodáno do _____

Adresa _____ **Obec/město** _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.