



MOPEDIA®



**MADLA K WC
RP770**

Návod k obsluze

OZNAČENÍ

RP770 Madla k WC

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení madel na WC MOPEdia. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodáváný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

ÚČEL POUŽITÍ

Madla k WC zajistí zdravotně postiženým komfort při vykonávání potřeby.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobce a dodavatel nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

OBEČNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na technický personál před pokusem o použití tohoto výrobku, aby nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroj tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo jiným způsobem s ním manipulovaly.

OBECNÝ POPIS


Bezpečnostní madla na WC. Anodizovaný hliníkový trubkový profil o průměru 2,5 cm, měkké područky. Užitečná pomůcka při sedání a vstávání z toalety. Přizpůsobitelná k jakémukoli typu toalety. Výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými nástavci.

MONTÁŽ

Výrobek je dodáván nesmontovaný, ale lze ho snadno sestavit bez použití nástrojů.

Obsah balení:

- Nohy s protiskluzovými nástavci (2 ks)
- Montážní deska pro upevnění rámu na toaletu (1 ks)
- Rámy – područky (2 ks)

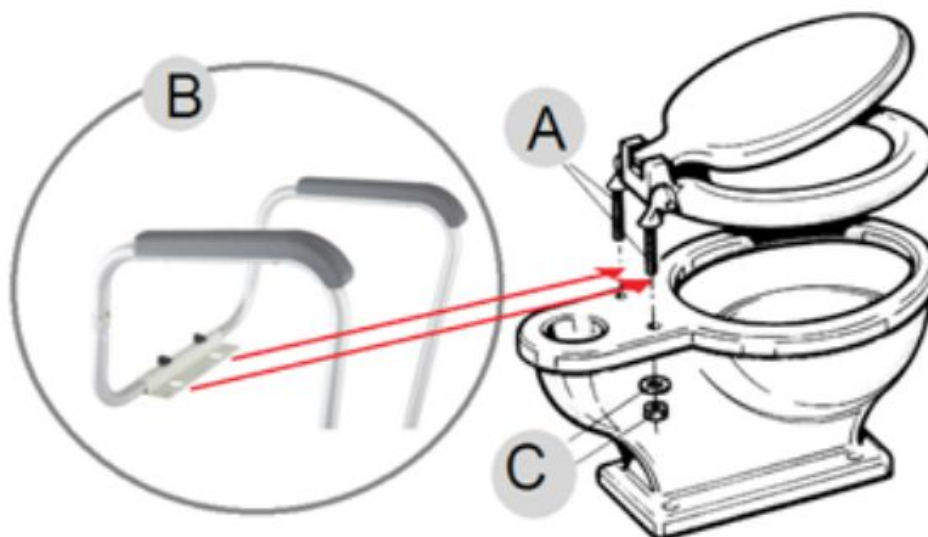

- Odšroubujte a vyjměte záchodové prkénko.
- Vsuňte nohy do hlavního rámu.
- Instalujte rám s montážní deskou k toaletě.

Vsuňte madla do rámu a nasad'te zpátky prkénko a zašroubujte.

Nastavte šířku madel a výšku nohou dle vaší potřeby. Zkontrolujte stabilitu a ujistěte se, že jsou nohy a područky ve stejné výšce.

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

- Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
 - Vždy pomáhejte pacientovi s omezenou pohyblivostí posadit se na toaletu.
 - Podpěru nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na obalu.
 - Vyvarujte se prudkých pohybů během přemístění.
 - Buďte opatrní, je-li podlaha mokrá nebo kluzká, to může znesnadnit umístění pacienta.
 - Výrobek neukládejte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, utažení šroubů a stav protiskluzových nožiček.
 - V případě pochybností ohledně použití, úpravy nebo údržby výrobku kontaktujte svého prodejce.
- !! Maximální nosnost v žádném případě nepřekračujte!!

POUŽITÍ

RP770 – Získáte větší stabilitu při vstávání a sezení na toaletě.

Ujistěte se, že na madla nepřenášíte celou váhu těla, jedná se pouze o PODPORU.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchejte s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu výrobku.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím přípravků, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

RP770 – rozměry: 54-62 cm x 45 x 66-76 cm; váha: 1,5 kg; maximální nosnost: 100 kg

* Měření se vztahuje na celkové rozměry.

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEdia má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň