



**MOPEDIA®**



## **KLOZETOVÉ KŘESLO DO SPRCHY RP780**

**Návod k obsluze**

## Obsah

ÚVOD .....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS .....	1
PŘED POUŽITÍM .....	2
PŘED MONTÁŽÍ.....	2
MONTÁŽ .....	2
SEDÁTKO.....	2
UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ.....	2
POUŽITÍ.....	3
ÚDRŽBA .....	3
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	3
Čištění.....	3
Dezinfekce .....	3
PODMÍNKY LIKVIDACE .....	3
Obecné podmínky likvidace .....	3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:.....	3
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	4
ZÁRUKA.....	4
OPRAVY .....	4
Záruční opravy.....	4
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka .....	4
Neoprávněná reklamace .....	5
NÁHRADNÍ DÍLY .....	5
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE .....	5

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení klozetového křesla do sprchy. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

## ÚČEL POUŽITÍ

Multifunkční křeslo do koupelny MOPEDIA je určeno pro osoby s obtížemi chůze a slouží jako pomůcka do sprchy a koupelny. Opora na WC, toaletní a sprchové křeslo 2 v 1.

## UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelňových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

## OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce.
- O vhodnosti výrobku vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem terapeutem.
- Zkontrolujte kompletnost balení a uchovávejte jej mimo zdroje tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením jeho součástí.
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jiným způsobem manipulovaly.

## OBECNÝ POPIS

RP780 – Pevný model, rám: eloxovaný hliník, sedátko s poklopem: PVC materiál, protiskluzové pryžové nástavce. Nastavitelná výška po 2,5 cm.

## PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte opotřebení částí výrobku, aby bylo zaručeno, že výrobek bude zcela bezpečný pro uživatele a jeho okolí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně namontovány.

## PŘED MONTÁŽÍ

Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

## MONTÁŽ

Vložte do držáků toaletní nádobu, která je součástí balení a ujistěte se, že je správně uchycena.



*(jedná se o ilustrační obrázek)*

## SEDÁTKO

- Pro nastavení výšky křesla nastavte výšku každé nohy zvlášť stisknutím kolíku na každé z nich. Vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolíček.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky ve stejné výšce.

**POZNÁMKA:** Před usednutím:

- Umístěte křeslo na rovnou a pevnou plochu.
- Ujistěte se, že západka je zajištěna a výrobek je stabilní.

## UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

- Buďte opatrní, je-li podlaha mokrá nebo kluzká.
- Křeslo nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální nosnost uvedenou na obalu.
- Křeslo umístěte na rovný a pevný povrch. Nepoužívejte křeslo na schodech, svazích nebo na nakloněném povrchu.
- Nepoužívejte křeslo pro jiné účely, než je uvedeno v této příručce. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Nenechávejte výrobek v dlouhodobém kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu a opotřebení částí výrobků. Vyměňte jednu.
- V případě pochybností ohledně použití, opravy nebo údržby výrobku kontaktujte svého prodejce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům.

## POUŽITÍ

*Pokyny pro usedání:*

- Nesedejte na křeslo opření pouze o jednu stranu.
- Při zvedání se vždy opírejte oběma rukama, abyste vstali snadněji a udrželi rovnováhu.
- Bude-li křeslo používat osoba s pohybovými obtížemi, vždy ji pomáhejte při usedání a vstávání z křesla.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepřenášejte křeslo, pokud v ní osoba sedí.

## ÚDRŽBA

Výrobky řady MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost uživatele se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována autorizovaným servisem každé dva roky.

Pravidelná kontrola znamená kontrolu následujících částí:

- Zkontrolujte montáž;
- Zkontrolujte všechny sváry;
- Zkontrolujte protiskluzové nástavce;

V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

## ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### Čištění

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchat s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

### Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

## PODMÍNKY LIKVIDACE

### Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Kód	Max. nosnost	Výška područek při nastavení výšky sedátka	Nastavitelná výška sedátka	Základna	Materiál
RP780	130 kg	66 - 76 cm	45 - 55 cm		Hliníkový rám

## NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



### RV7058-4

Náhradní sedátko na WC s poklopem

Rozměry otvoru:  
20,5 cm x 24 cm



### RV7069-1

Toaletní nádoba pro toaletní křeslo včetně háčku a poklopu



### RV7024

Ø 29mm

Protiskluzové nástavce na nohy 4 ks

## ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

## OPRAVY

### Záruční opravy

V případě, že produkt má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravdu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

### Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

## Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

## OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň