


ZÁVĚS KE ZVEDÁKU

NÁVOD K POUŽITÍ

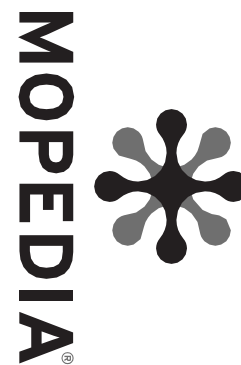

INDEX

1. KÓD	STRANA .3
2. ÚVOD.....	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA.3
5. OBECNÉ VAROVÁNÍ.....	STRANA.4
6. SYMBOLY	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS.....	STRANA.5
8. PŘED POUŽITÍM	STRANA.5
9. POUŽITÍ POZOR.....	STRANA.5
10. JAK POUŽÍVAT	STRANA.6
10.1 Z polohy v sedě	strana 6
10.2 Z polohy v leže.....	strana 6
11. ÚDRŽBA	STRANA.6
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STRANA.7
13. PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA.7
14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STRANA.7
15. ZÁRUKA	STRANA.8
16. DOLOŽKY O VÝJIMKÁCH	STRANA.8



Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA RP881 02 B_ENG_10 2021

1. KÓD**RP881 Standardní závěs s opěrkou hlavy****2. ÚVOD**

Děkujeme, že jste si zakoupili závěs MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A.. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat vámi vybraný výrobek, a poskytuje několik cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete návod k použití. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Svazky MOPEDIA by MORETTI jsou určeny k přepravě pacienta s poruchou hybnosti.



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyráběný a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny STANDARD SLINGS je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující :

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabici NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže .

Poznámka: Kompletní kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ani žádné dostupné volitelné vybavení, aniž byste si nejprve zcela přečetli tento návod k použití a porozuměli mu.
- Porad'te se s lékařem nebo terapeutem, abyste určili správné nastavení a správné použití závěsu.
- Po každém použití výrobek vydezinfikujte
- ŽIVOTNOST - limit použití závěsu je dán opotřebením dílů.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobci a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.



- Pečlivě si přečtete návod k obsluze zvedáku pro pacienty nebo stojanového zvedáku a postupujte podle pokynů v něm uvedených.
- V případě použití postrojů s jiným maximálním zatížením, než je maximální zatížení dodané pro zvedák nebo stojan, vždy použijte nejnižší maximální zatížení.

6. SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečná identifikace zařízení



Označení CE



Výrobce



Šarže



Přečtete si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Maximální teplota praní 30 °C; velmi šetrný proces



Velmi jemně opláchněte, neždímejte.



Nebělit



Nežehlete




Nesušit v sušičce



Nečistit chemicky

7. OBECNÝ POPIS

Návod pro všechny druhy zvedání pacientů. Vyrobeno z polyesteru (100 %), vhodného zejména pro styk s vodou, pevného a prodyšného, šitého polyesterovou nití. Ohraničení je tvořeno pevnou stuhou (100% nylon), která tvoří tři očka v každém konci, aby byla zaručena dokonalá rovnováha. Pásek pokračuje po celém obvodu závěsu, aby byla zajištěna větší odolnost. Švy jsou vyrobeny z vysoce pevné polyesterové příze.

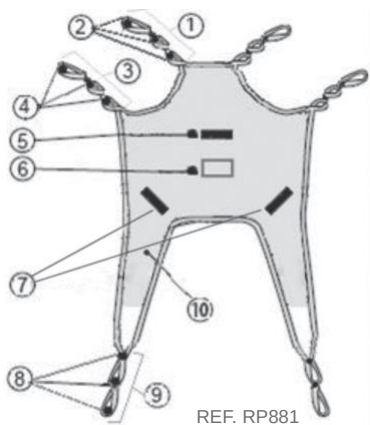

1. Horní očko
2. Smyčky
3. Mezipropustné očko
4. Smyčky
5. Pohybová rukojeť
6. Štítek
7. Pohybová rukojeť
8. Spodní očko
9. Smyčky

8. PŘED POUŽITÍM

Vždy zkontrolujte, zda je popruh v bezvadném stavu, pečlivě zkontrolujte švy a poutka.

9. POUŽITÍ VAROVÁNÍ

- Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno: tkáň, okraj, švy a závěsné smyčky musí být neporušené.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození nejméně jednou za 6 měsíců, zejména pokud závěs často čistíte.
- Zkontrolujte, zda jsou smyčky správně připojeny ke kolébce.
- Skladujte a používejte mimo dosah plamene nebo zdroje tepla.
- Nepřekračujte maximální zatížení



- Vždy si prostudujte návod k obsluze patientského zvedáku nebo stojanu, na který postroj instalujete, a důsledně dodržujte uvedené pokyny.



- Vyhodnocení rizika, aby bylo možné zaručit přesnou tělesnou podpůrnou jednotku pro pacienta podle správných rozměrů, typologie a tvaru.
- V případě použití závěsu s jiným maximálním zatížením, než je maximální zatížení dodané pro zvedák nebo stojanový zvedák, vždy použijte nejvyšší maximální zatížení.

10. JAK POUŽÍVAT

Závěsy MOPEDIA od společnosti Moretti se hodí pro všechny druhy zvedáků pro pacienty, pevné i pohyblivé.



Obr.
1



Obr.
2



Obr.
3



Obr.
4

10.1Z polohy vsedě

1. Dbejte na to, aby popruhy směřovaly ven. Stáhněte popruh dolů až na záda uživatele a nechte otvor popruhu u základny páteře.
2. Zkontrolujte, zda je popruh správně nastaven ve výšce ramen. (Obr.1)
3. Zvedněte pacientovu nohu, zasuňte pod ni popruh a vytáhněte jej mezi nohama, přičemž dbejte na to, aby se popruh pod stehnem nepomačkal. (Obr. 2)
4. Postup opakujte i s druhou nohou.
5. Překřížte popruhy přes nohy a připevněte je k předním hákům na rozpěrné tyči kladkostroje.
6. Zvedák mírně zvedněte a připevněte kratší ramenní popruhy k rozpěrné tyči. Zvedák přitom posuňte směrem k pacientovi. (Obr. 3)



POZOR! Dlouhé popruhy jsou určeny pro nohy a krátké pro ramena.

10.2 Z polohy vleže

1. Odvalte pacienta stranou a umístěte závěs na lůžko (obr. 4) (závěs musí být hladký, bez jakéhokoli zvrásnění a musí být správně vyrovnaný ve výšce ramen).
2. Ujistěte se, že otvor ve spodní části závěsu je umístěn u základny páteře.
3. Přetočte pacienta na záda (poloha vleže na zádech).
4. Zkřížte popruhy pod nohama pacienta a nastavte závěs tak, jak je znázorněno pro polohu vsedě (obr. 2), přičemž popruhy na ramenou musí zůstat co nejkratší.
5. Nyní jste připraveni k tomu, abyste zavěsili popruhy na kolébku (obr. 3).

POZNÁMKA: Společnost Moretti doporučuje, aby při polohování pacienta do závěsu byli použiti dva asistenti (jeden na každé straně lůžka).



POZOR! Dbejte na to, aby měl pacient neustále podepřenou hlavu.

11. ÚDRŽBA

Přístroje MOPEDIA by MORETTI jsou po uvedení na trh pečlivě kontrolovány a dodávány se značkou ES.

Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat přístroj zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří každých 6 měsíců.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE



Maximální teplota praní 30 °C; velmi šetrný proces



Velmi jemně opláchněte, neždímejte.



Nebělit



Nežehlete



Nesušit v sušičce



Nečistit chemicky

13. PODMÍNKY LIKVIDACE



V případě likvidace nepoužívejte vkladací kontejner na komunální odpad. Závěs doporučujeme odevzdat do příslušných sběrných míst pro recyklaci.


14. TECHNICKÉ

VLASTNOSTI REF. RP881

MATERIÁL 100% polyester a popruhy 100% nylon (nehořlavá tkanina EN 1021)

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST 200 Kg

Velikost	A	B	C	D
JEDNA VELIKOST	143 cm	80 cm	93 cm	35 cm

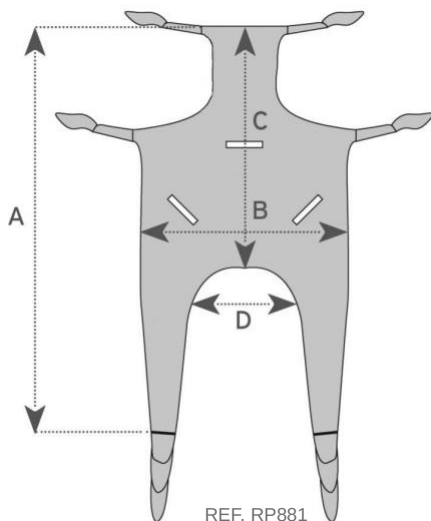

15. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu, s výjimkou možných vyloučení nebo omezení, která jsou uvedena níže. Záruka se nevztahuje na případné škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami a záruka neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správný účel použití je uveden v této příručce.

Společnost Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob nebo jiné škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním.

Záruka společnosti Moretti se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku: přírodní katastrofy, neautorizované údržby nebo oprav, závad způsobených problémy s dodávkou elektrické energie (v případě potřeby), použití náhradních dílů, na které se nevztahuje záruka společnosti Moretti, nesprávného používání, neautorizovaných změn, poškození při přepravě (odlišné od originální zásilky společnosti Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu.

Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají opotřebení při správném používání zařízení.

16. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

Společnost Moretti neposkytuje žádná další prohlášení, výslovné nebo implicitní záruky nebo podmínky, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv a nezasahování, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v této záruce. Společnost Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné používání. Doba trvání případných implicitních záruk, které mohou být uloženy ze zákona, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení pro náhodné škody. V takových zemích se některé z těchto vyloučení nebo omezení nemusí na uživatele vztahovat. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní prodejce _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.