



**MOPEDIA®**



*Onda*

## ŽIDLE DO SPRCHY SKLÁDACÍ RS826

Návod k obsluze

## Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS .....	2
MONTÁŽ.....	2
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	2
PODMÍNKY LIKVIDACE .....	2
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:.....	2
ZÁRUKA.....	3
OPRAVY .....	3
NÁHRADNÍ DÍLY .....	3
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE .....	3

## OZNAČENÍ

RS826 Židle do sprchy skládací

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení židle do sprchy značky MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

## ÚČEL POUŽITÍ

Židle do sprchy zajistí zdravotně postiženým komfort při sprchování.

## OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

## OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud neporozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na technický personál před použitím tohoto výrobku, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroj tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění

- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jiným způsobem manipulovaly.

## OBECNÝ POPIS

Sprchová židle z hliníkové konstrukce, sedák z termoplastu, skládací pro úsporu místa, protiskluzové nástavce, výškově nastavitelné nohy.

## MONTÁŽ

Při montáži RS826 postupujte dle následujících pokynů.

1. Zvedněte sedadlo
2. Natočte obě područky do správné polohy
3. Sklopte sedadlo a zajistěte pomocí jisticích páček na obou stranách.
4. Vložte 4 nohy do trubek v konstrukci.
5. Nastavte výšku nohy na každé straně.

Nastavení výšky

- Pro nastavení výšky židle nastavte výšku každé nohy zvlášť stisknutím kolíku.
- Vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolík.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky ve stejné výšce.

## ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### Čištění

Použijte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím dobře osušte.

### Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

POZNÁMKA: V žádném případě nepoužívejte na čištění výrobku kyseliny nebo zásaditá, agresivní rozpouštědla a látky s přídavkem acetonu.

## PODMÍNKY LIKVIDACE

### Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Rozměry RS826 D: 52 cm Š 53 cm V: 94 cm
- Sedátko: 40 x 40 cm
- Výška područek od sedátka: 16 – 18,5 cm
- Nastavitelná výška sedátka: 48 – 53,5 cm
- Hmotnost: 4,2 kg
- Max. nosnost: 120 kg

## ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

## OPRAVY

### Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu výrobku v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

### Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

### Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

## OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



**Stamed s.r.o.**

tel: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň