



MOPEDIA®



Onda



ŽIDLE DO SPRCHY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ RS829

Návod k obsluze

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS	2
MONTÁŽ	2
PŘED POUŽITÍM.....	3
UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ.....	3
POUŽITÍ.....	3
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	3
PODMÍNKY LIKVIDACE	3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	4
ZÁRUKA.....	4
OPRAVY	4
NÁHRADNÍ DÍLY	5
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	5

OZNAČENÍ

RS829 Židle do sprchy výškově nastavitelná

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení židle do sprchy značky MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

ÚČEL POUŽITÍ

Židle do sprchy zajistí zdravotně postiženým komfort při vykonávání potřeby.

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku
- v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud neporozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na technický personál před použitím tohoto výrobku, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroj tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění

- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jiným způsobem manipulovaly.

OBECNÝ POPIS



- Koupelnová židle
- Lakovaná hliníková konstrukce
- Sedadlo a opěradlo z HDPE
- Nastavitelná výška
- Nohy s protiskluzovými nástavci
- Montáž bez nástrojů

MONTÁŽ



Výrobek je dodáván nesmontovaný, ale lze ho snadno sestavit bez použití nástrojů.

Obsah balení:

- 1) Sedák (1 ks)
- 2) Nohy (4 ks)
- 3) Opěradlo (1 ks)
- 4) trubky pro opěradlo (2 ks)



Spojte nohy s trubkami pro sedák. Následně spojte s opěradlem a spojte vše dohromady.

PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není konstrukce výrobku poškozena, aby bylo zaručeno bezpečné používání.
- Zkontrolujte správnou montáž výrobku.

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

- Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Vždy pomáhejte pacientovi usadit se na židli.
- Židli nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální nosnost uvedenou na obalu.
- Vyvarujte se prudkých pohybů během přemístění.
- Buďte opatrní, je-li podlaha mokrá nebo kluzká.
- Výrobek neukládejte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, utaženost šroubů a protiskluzové nožičky.
- V případě pochybností ohledně použití, opravy nebo údržby výrobku, kontaktujte svého prodejce.
!! Maximální nosnost v žádném případě nepřekračujte!!

POUŽITÍ

Nastavení výšky

- Pro nastavení výšky židle nastavte výšku každé nohy zvlášť stisknutím kolíku.
- Vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolík.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky ve stejné výšce.
- Umístěte židli na rovnou plochu a před použitím zkontrolujte její stabilitu.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchejte s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton; mohly by způsobit neopravitelné poškození povrchu výrobku.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím přípravků nebo korozivních chemikálií, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku.

Dezinfekce


V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

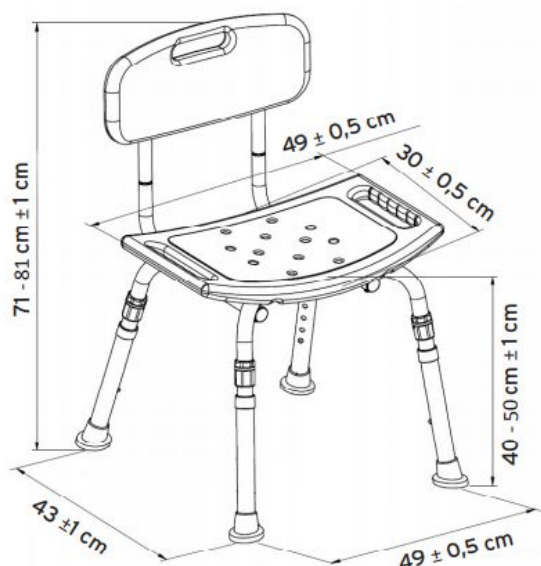

RS829 – rozměry: 49,5 cm x 40 x 74,5-87,3 cm;
sedadlo: 49 x 30 x 40-50 cm

hmotnost: 3 kg; maximální nosnost: 110 kg

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodeje ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu výrobku v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň