

MOPEDIA®

MA RS844-RS846-RS847-RS848 01 A_01-2022

SPRCHOVÉ KŘESLO

NÁVOD K POUŽITÍ

ČEŠTINA

OBSAH

1. OZNAČENÍ.....	str.3
2. ÚVOD.....	str.3
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	str.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	str.3
5. OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	str.3
6. SYMBOLY	str.4
7. OBECNÝ POPIS.....	str.4
7.1 Náhled a seznam komponentů.....	str.4
8.MONTÁŽ/DEMONTÁŽ	str.5
8.1 Montáž RS844	str.5
8.2 Montáž RS846 - RS847	str.6
8.3 Montáž RS848	str.6
8.4 Demontáž	str.7
9. PŘED POUŽITÍM.....	str.7
10. VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ.....	str.7
11. JAK POUŽÍVAT.....	str.8
11.1 RS844	str.8
11.2 RS846 - RS848	str.8
11.3 RS847	str.8
12. ÚDRŽBA.....	str.9
13. ČIŠTĚNÍ A SANITACE.....	str.9
13.1 Čištění	str.9
13.2 Technické specifikace	str.9
14. PODMÍNKY LIKVIDACE.....	str.10
15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	str.10
15.1 Rozměry a váha.....	str.10
15.2 Čištění	str.10
16. ZÁRUKA.....	str.10
17. OPRAVY.....	str.10
18. NÁHRADNÍ DÍLY.....	str.11
19. VÝJIMKY.....	str.11

CE Zdravotnický prostředek třídy I dle Směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC MDD a pozdějších předpisů

1. OZNAČENÍ

RS844 - Sklopné sprchové křeslo

RS846 - Demontovatelné sprchové křeslo se čtyřmi kolečky

RS847 – Sprchové invalidní křeslo

RS848 - Skládací sprchové křeslo

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali sprchové křeslo MOPEDIA od Moretti S.p.A. MOPEDIA. Sprchová křesla od Moretti S.p.A. jsou navržena tak, aby splňovala všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tato příručka poskytuje několik užitečných rad, jak správně používat zařízení, které jste si vybrali, a nabízí cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme si pečlivě přečíst celý návod před použitím zakoupeného zdravotnického zařízení. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého prodejce, který vám poradí nebo pomůže.

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození jakých koliv částí výrobku během přepravy. V případě poškození produkt nepoužívejte. Další pokyny vám poskytne váš prodejce.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z nesprávného používání.
- Výrobce si vyhrazuje právo upravit zařízení či změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění za účelem zlepšování charakteristik.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Sprchové a toaletní křesla MOPEDIA byly vytvořeny pro osoby s pohybovými problémy a mohou být používány v interiéru jako náhrada toalety či jako pomůcka při sprchování.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moretti S.p.A. tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobky vyrobené a prodávané společností Moretti S.p.A. a patřící do řady Nemocniční lůžka vyhovují ustanovením nařízení ve Směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a následným změnám. Za tímto účelem MORETTI S.p.A. na svou vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje následující::

1. Dotyčné zařízení splňují základní požadavky přílohy I Směrnice 93/42/EHS předepsané v příloze VII výše uvedené směrnice. Úplný seznam dotyčných prostředků je k dispozici v příloze A prohlášení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍMI nástroji.
3. Dotyčná zařízení NEJSOU URČENA pro stanovení klinické diagnózy.
4. Dotyčná zařízení jsou zabalena v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Dotyčná zařízení by měla být považována za náležející do třídy I.
6. NEPOUŽÍVEJTE dotyčná zařízení k žádnému jinému účelu, než k jakému jsou výslovně určeny společností MORETTI S.p.A..
7. Moretti S.p.A. vede a předkládá příslušným orgánům technickou dokumentaci osvědčující shodu daných výrobků se směrnicí 93/42/EHS a následným změnám..

5. OBECNÁ VAROVÁNÍ











VAROVÁNÍ!

Vždy věnujte zvýšenou pozornost přítomnosti pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění.

- Pro správné používání zařízení si přečtěte tento návod.
- O správném používání zařízení se poraďte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený produkt uchovávejte mimo zdroje tepla, jelikož je obal vyroben z lepenky.
- Životnost příslušenství je určena opořebením dílů, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- Buďte opatrní, když jsou v blízkosti děti.

6. SYMBOLY

	Označení produktu		Šarže
	Unikátní identifikace zařízení		Zdravotnické zařízení
	Přečtěte si návod k použití		Označení CE
	Podmínky likvidace		Výrobce

7. OBECNÝ POPIS

7.1 Náhled a seznam komponentů

RS844 Sklopné sprchové a toaletní křeslo se 4 kolečky (Obr.1)



Obr.1

1. Konstrukce – 1 ks
2. Zádová opěrka s područkami – 1 ks
3. Otočná kolečka bez brzd – 2 ks
4. Otočná kolečka s brzdami – 2 ks
5. Opěrka hlavy – 1 ks
6. Opěrky na nohy – 2 ks
7. Sedátko – 1 ks
8. Potah na sedátko – 1 ks
9. Kyblík – 1 ks

RS846 Demontovatelné sprchové a toaletní křeslo se 4 kolečky (Obr.2)



Obr.2

1. Levý rám – 1 ks
2. Pravý rám – 1 ks
3. Spojovací trubka – 2 ks
4. Zádová opěrka s područkami – 1 ks
5. Opěrky na nohy – 2 ks
6. Sedátko – 1 ks
7. Potah na sedátko – 1 ks
8. Kyblík – 1 ks

RS847 Sprchový a toaletní invalidní křeslo se 4 kolečky (Obr.3)

Obr.3

1. Levý rám – 1 ks
2. Pravý rám – 1 ks
3. Spojovací trubka – 2 ks
4. Zádová opěrka s područkami – 1 ks
5. Opěrky na nohy – 2 ks
6. Sedátko – 1 ks
7. Potah na sedátko – 1 ks
8. Kyblík – 1 ks

RS848 Skládací sprchové a toaletní křeslo se 4 kolečky (Obr.4)





Obr.4

1. Skládací konstrukce – 1 ks
2. Zádová opěrka s područkami – 1 ks
3. Opěrky na nohy – 2 ks
4. Sedátko – 1 ks
5. Potah na sedátko – 1 ks
6. Kyblík – 1 ks

8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ
8.1 Montáž RS844

Pro montáž proveďte následující kroky:


- Namontujte 4 kola na konstrukci pomocí dodaných šroubů a podložek. Kola bez brzd musí být namontována na přední stranu konstrukce (obr.5);
- Vložte zádovou opěrku s područkami do otvorů na rámu invalidního vozíku a zajistěte ji dvěma upevňovacími knoflíky (obr. 6);
- Vložte opěrku hlavy do již nainstalované zádové opěrky a utáhněte ji (obr.6);
- Umístěte sedačku na rám invalidního vozíku a zatlačením dolů zajistěte její polohu, poté přidejte potah (obr. 7);
- Nasadte opěrky na nohy ze strany a otočte je dopředu, dokud nezapadnou do držáku (obr. 8);
- Vložte kyblík ze zadní strany sprchového křesla zasunutím do drážek.

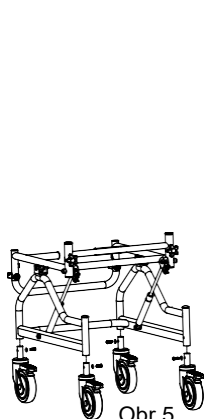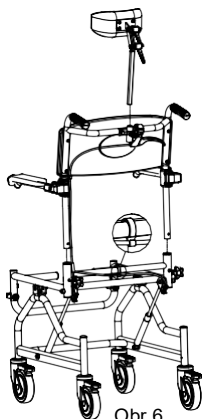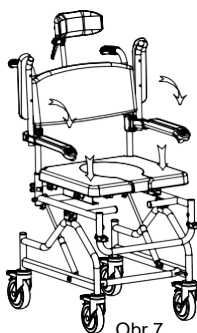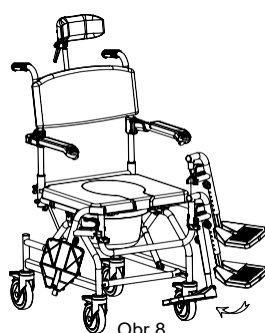
Obr.5

Obr.6

Obr.7

Obr.8

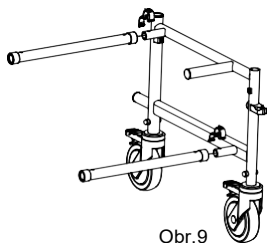
8.2 Montáž RS846 – RS847

Pro montáž proveďte následující kroky:


- Vložte upevňovací trubky do levého nebo pravého bočního rámu, vyrovnejte otvory a vložte C-spony, jak je znázorněno na Obr.9;
- Připojte nově smontovaný díl ke druhé straně rámu pomocí stejných dvou upevňovacích trubek a dvou přídatných C-spon, jak je popsáno v předchozím bodě (obr.10)
- Vložte opěradlo do otvorů na rámu invalidního křesla a zajistěte zádivovou opěrku pomocí dvou upevňovacích knoflíků (Obr.11);



Obr.9

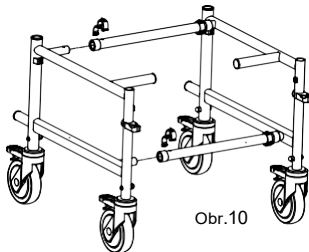


Obr.10

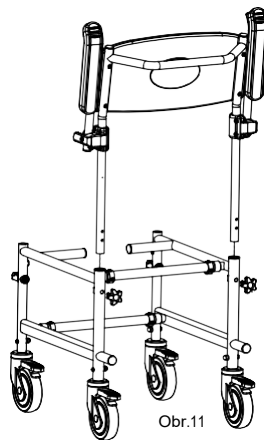


Obr.11

Obrázky jsou pouze ilustrativní

- Umístěte sedátko na rám invalidního křesla a zatlačte dolů, aby se zafixovala jeho poloha, poté přidejte potah (Obr.12);
- Ze strany vložte opěrky na nohy a otočte je dopředu, dokud nezapadnou do držáku (Obr.13);
- Vložte kyblík ze zadní strany sprchového křesla zasunutím do drážek (Obr.14).

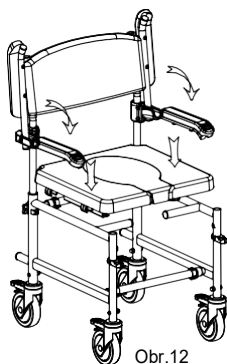

Obr.12

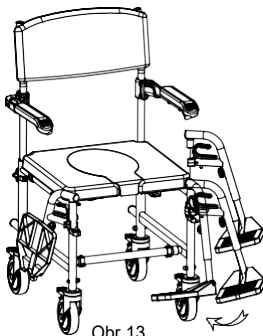

Obr.13



Obr.14


Obrázky jsou pouze ilustrativní

8.3 Montáž RS848


Pro montáž proveďte následující kroky:

- Otevřete konstrukci;

- Vložte zádovou opěrkou do otvorů na rámu invalidního křesla a zajistěte jej pomocí dvou upevňovacích knoflíků (obr. 15);
- Vložte sedátko do rámu křesla a zatlačte dolů, aby se zafixovala jeho poloha, poté nasadte potah (Obr.16);
- Ze strany nasadte opěrky nohou a otočte je dopředu, dokud nezapadnou do držáku (Obr.17);
- Vložte kyblík ze zadní strany sprchového křesla zasunutím do drážek (obr. 18.).

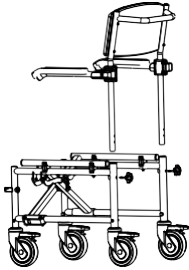


Obr. 15

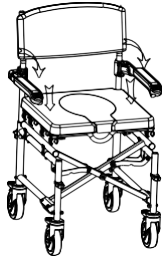

Obr. 16



Obr. 17

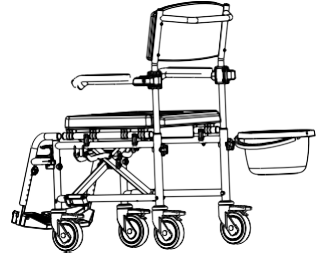

Obr. 18

Demontáž

Proveďte výše uvedený postup v opačném pořadí.

9. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav mechanických částí, abyste zaručili, že jsou používány s naprostou bezpečností pro osoby a životní prostředí.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení, přičemž dbejte na správné vložení zajišťovacích šroubů, matic, zádové opěrky a opěrek nohou.

10. VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ

- Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za následky nesprávného použití výrobku.
- Vždy pomozte pacientovi s obtížemi při chůzi posadit se na sedátko.
- Nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na štítku umístěném na rámu produktu.
- Během polohování nedělejte žádné prudké pohyby.
- Buďte opatrní na mokré podlahy, na mokrých nebo kluzkých površích, mohlo by to ztížit polohování pacienta.
- Neskladujte výrobek venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, správné upevnění šrouby a stav ochranných gum.
- V případě pochybností o použití, seřízení nebo údržbě kontaktujte svého prodejce.
- Za žádných okolností nepřekračujte maximální nosnost.
- Při manipulaci vždy asistujte pacientovi.
- Bez pomoci nenaklánějte židli o více než 10 %.
- Zajistěte kolečka během přesouvání pacienta.
- Invalidní křeslo musí být na stabilním povrchu a kolečka musí být během přesunu uživatele zablokována.
- Než se pacient opře nebo vstane, ujistěte se, že jsou kolečka rovná a že zadní kolečka jsou zablokována, aby se zabránilo převrácení.
- Nevyklánějte se z opěradla, aby nedošlo k převrácení.
- Při montáži, údržbě i během používání dávejte pozor na prsty.
- Dávejte pozor na prsty při posouvání invalidního křesla uživatelem.
- Držte křeslo mimo dosah ohně.
- Vždy používejte originální příslušenství a náhradní díly.



VAROVÁNÍ! Za žádných okolností nepřekračujte maximální nosnost!

11. JAK POUŽÍVAT

K pohybu křesla používejte pouze zadní rukojet, nikdy nepoužívejte jinou část konstrukce. Než se pokusíte vyjet na rampu, znejte své vlastní schopnosti a omezení týkající se síly a vytrvalosti. Asistence se doporučuje při sklonu vyšším než 10 %. Pokud potřebujete zastavit na nakloněné ploše, vyhněte se prudkým pohybům. Během sjezdu neměňte náhle směr. V případě potřeby zvedněte křeslo pomocí hlavního rámu, nikoli pomocí područek nebo opěrek na nohy.



VAROVÁNÍ! Pacient nesmí při usedání a vstávání tlačit na opěrky nohou!

11.1 RS844

- Sedněte si na sedátko a rovnoměrně rozprostřete svou váhu. Netlačte vahou pouze na jednu stranu;
- Vždy se opírejte o obě područky, abyste vstali a udrželi si rovnováhu;
- V případě, že křeslo používají osoby s pohybovými obtížemi, vždy jim pomáhejte při usedání nebo při vstávání z křesla.

NASTAVENÍ OPĚREK NOHOU

Opěrky na nohy mohou být nastaveny dle vašich potřeb:

- Odšroubujte šroubek;
- Upravte výšku nožních opěrek;
- Zašroubujte znovu šroubek. Zkontrolujte, že jsou obě nožní opěrky ve stejné výšce.

NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Opěrku hlavy lze snadno nastavit do různých poloh. Chcete-li ji nastavit, odšroubujte knoflíky na opěrce hlavy jeden po druhém a upravte jejich polohu. Poté knoflíky pevně utáhněte. V případě potřeby proveďte stejný postup také s ostatními knoflíky.

NASTAVENÍ SKLONU

Chcete-li křeslo naklonit dozadu, zatáhněte za páku namontovanou na rukojeti a zatlačte dolů. Chcete-li vrátit křeslo do normální polohy, jednoduše zatáhněte za páku namontovanou na rukojeti. Hydraulické písty jsou navrženy tak, aby se vracely do výchozí polohy, aniž by uživatel vyvíjel jakoukoli sílu.

11.2 RS846 - RS848

- Sedněte si na sedátko a rovnoměrně rozprostřete svou váhu. Netlačte vahou pouze na jednu stranu;
- Vždy se opírejte o obě područky, abyste vstali a udrželi si rovnováhu;
- V případě, že křeslo používají osoby s pohybovými obtížemi, vždy jim pomáhejte při usedání nebo při vstávání z křesla.

NASTAVENÍ VÝŠKY

Opěradlo a područky lze společně nastavit do dvou různých výšek. Odšroubujte a vyjměte knoflíky, které zajišťují opěradlo k sedadlu, a podle potřeby opěradlo zvedněte nebo snižte. Nakonec znovu vložte a utáhněte knoflíky.

NASTAVENÍ OPĚREK NOHOU

Opěrky na nohy mohou být nastaveny dle vašich potřeb:

- Odšroubujte šroubek;
- Upravte výšku nožních opěrek;
- Zašroubujte znovu šroubek. Zkontrolujte, že jsou obě nožní opěrky ve stejné výšce.

11.3 RS847

K pohybu židle používejte pouze zadní rukojeť, nikdy nepoužívejte jiné části konstrukce.

Než se pokusíte vyjet na rampu, znejte své vlastní schopnosti a omezení týkající se síly a vytrvalosti. Asistence se doporučuje při sklonu vyšším než 10 %. Pokud potřebujete zastavit na nakloněné ploše, vyhněte se prudkým pohybům. Během sjezdu neměňte náhle směr. V případě potřeby zvedněte křeslo pomocí hlavního rámu, nikoli pomocí područek nebo opěrek na nohy.



VAROVÁNÍ!

Pacient nesmí při usedání a vstávání tlačit na opěrky nohou!

BRZDY

Křeslo zabrzdíte stisknutím páky na každém kole. Pokud potřebujete nastavit brzdovou páku, můžete odšroubovat matici, posunout svorku do požadované polohy a poté ji znovu utáhnout.

WC

Použijte toaletu, když je invalidní křeslo zcela zablokované. Pro použití toalety vyjměte odnímatelnou část sedátka pomocí madla na přední části. Vyjměte toaletu pomocí rukojeti.

NASTAVENÍ VÝŠKY

Opěradlo a područky lze společně nastavit do dvou různých výšek. Odšroubujte a vyjměte knoflíky, které zajišťují opěradlo k sedadlu, a podle potřeby opěradlo zvedněte nebo snižte. Nakonec znovu vložte a utáhněte knoflíky.

NASTAVENÍ OPĚREK NOHOU

Opěrky na nohy mohou být nastaveny dle vašich potřeb:

- Odšroubujte šroubek;
- Upravte výšku nožních opěrek;
- Zašroubujte znovu šroubek. Zkontrolujte, že jsou obě nožní opěrky ve stejné výšce.

12. ÚDRŽBA

Křesla MOPEDIA od MORETTI S.p.A. potřebují minimální údržbu a obecnou péči, ale doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu:

- Brzdového systému: měsíčně.
- Čištění dílů (sedátko, zádové opěrky, područky, kol a tak dále) pokud je třeba.
- Čištění polstru sedátka dle potřeby.
- Všeobecná kontrola kvalifikovaným personálem každé dva roky.

Je nesmírně důležité zkontrolovat vozík při prvním použití. Konkrétně, zkontrolujte prosím, že jsou všechny šrouby a matice jsou utáhnuté.

13. ČIŠTĚNÍ A SANITACE

13.1 Čištění

K čištění pomůcky a konstrukce použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla (ve stejném poměru) smíchaného s vodou.



VAROVÁNÍ! Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, čistý alkohol, čističe na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezivění kovových povrchů.

Výrobce není zodpovědný za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

13.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.



VAROVÁNÍ! Sanitační prostředky jsou korozivní. Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží. Noste ochranné oblečení, rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv. V případě neúmyslného kontaktu, důkladně omyjte zasaženou oblast za použití teplé vody a okamžitě kontaktujte doktora..















14. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím městských sběrných dvorů pro zajištění předpokládané recyklace použitých materiálů.

15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

15.1 Rozměry a váha

Rozměry* a váha												
Rozměry v cm												
RS844	98	40	102	78	54	40÷55	46	49	49	17 kg	12	12
RS846	85	40	96÷98	73÷75	50	40÷55	46	45÷48	49	14 kg	12	12
RS847	101	40	96÷98	73÷75	50	40÷55	46	45÷48	51	17 kg	60	12
RS848	85	40	96÷98	73÷75	50	40÷55	46	45÷48	49	15 kg	12	12

* Odchylka může být až ±0.5cm

15.2 Technické specifikace

- Hliníková konstrukce s práškovým nástřikem
- Sedátko, loketní opěrka a zádová opěrka z PU
- Sklopné područky
- Oddělatelný toaletní kyblík s krytem
- Max. váha uživatele 136 Kg

16. ZÁRUKA

Na produkty Moretti je poskytována záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu, s výjimkou možného vyloučení nebo omezení následujícím způsobem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravou zařízení a záruka nebude platná, pokud nebudou přesně dodržovány pokyny k použití. Správné zamýšlené použití je specifikováno v tomto návodu. Moretti nenese odpovědnost za následné škody, zranění osob nebo cokoli způsobené chybnou instalací nebo nesprávným použitím zařízení nebo v souvislosti s nimi.

Moretti neručí za škody způsobené následujícím: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo opravy, závady způsobené problémy s dodávkou elektřiny (je-li to nutné), použití náhradních dílů, které nejsou od společnosti Moretti, nesprávné použití, neoprávněná úprava, poškození přepravou (odlišnou od původní zásilky Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu.

Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

17. OPRAVY

Záruční oprava

Pokud výrobek Moretti během záruční doby vykazuje materiálové nebo výrobní vady, Moretti zákaznika uvědomí, zda se na závadu může vztahovat záruka. Moretti může podle svého nevyvratitelného uvážení opravit nebo vyměnit produkt u prodejce produktů Moretti nebo v centrále Moretti. Pracovní náklady mohou být účtovány společností Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje záruku.

Oprava nekrytá zárukou

Produkt po záruce může být odeslán po autorizaci Moretti. Náklady na opravu a přepravu produktu při mimozáruční opravě hradí zákazník nebo prodejce. Záruka na opravy je 6 měsíců od převzetí zboží.

Zařízení bez závad

Zákazník bude informován, pokud po vrácení zařízení a kontrole Moretti prohlásí, že zařízení není vadné. Produkt bude zaslán zpět zákazníkovi a veškeré náklady na zpětné doručení hradí zákazník.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí.

19. VÝJIMKY

Moretti nenabízí žádné jiné prohlášení, výslovnou nebo implicitní záruku nebo podmínky, včetně možných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování a nezasahování, vše kromě toho, co je výslovně uvedeno v této záruce. Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné používání. Doba trvání případných implicitních záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země nepovolují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení pro náhodné škody. V takových zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá z těchto výjimek nebo omezení. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Prodejce _____

Adresa _____ **Místo** _____

Zákazník _____

Adresa _____ **Místo** _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

VYROBENO V ČR

MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com