



MOPEDIA®



SPRCHOVÉ A TOALETNÍ KŘESLO RS847

Návod k obsluze

Obsah

ÚVOD	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ:.....	1
SYMBOLY	2
POPIS ČÁSTÍ	2
ZASUNUTÍ/VYJMUTÍ OPĚRADLA A PODNOŽEK	2
Zasunutí	2
Vyjmutí	3
PŘED POUŽITÍM	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ.....	3
POUŽITÍ.....	3
Brzdy.....	4
WC	4
Područky	4
Nastavení podnožek	4
Nastavení výšky sedadla.....	4
ÚDRŽBA	4
ČIŠTĚNÍ	4
LIKVIDACE	5
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	5
Rozměry a hmotnost	5
Technické specifikace	5
ZÁRUKA.....	5
OPRAVY	5
Záruční opravy.....	5
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	6
Neoprávněná reklamace	6
NÁHRADNÍ DÍLY	6
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	6

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení sprchového křesla MOPEDIA. Sprchová křesla MOPEDIA jsou navržena a realizována tak, aby vyhovovala vašim potřebám pro správné a bezpečné používání. Tento návod k obsluze vám poskytuje rady ke správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím křesla. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda u zboží nedošlo k poškození během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

ÚČEL POUŽITÍ

Sprchová křesla MOPEDIA jsou určena pro osoby s pohybovými obtížemi a mohou být použita v interiéru jako náhrada za toaletu nebo jako pomůcka pod sprchou.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že produkty jím vyráběné a obchodované, patřící do kategorie sprchových židlí, jsou v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / CEE). Výrobce zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42 / EHS jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Zmíněná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ.
3. Zmíněná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ POUŽITÍ.
4. Zmíněná zařízení jsou distribuována V NESTERILNÍM OBALU.
5. Zmíněná zařízení patří do třídy I°.
6. NENÍ DOVOLENO používat a sestavovat produkty jiným způsobem, než je určen výrobcem.
7. Výrobce ukládá technickou dokumentaci u příslušných orgánů, ve věci prokázání shody zařízení se směrnicí 92/42 / CEE.

OBECNÁ VAROVÁNÍ:

Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem, které by mohly způsobit zachycení končetin a následné zranění.

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce.
- Pro správné používání zařízení se poradte s lékařem nebo terapeutem;
- Uchovávejte zabalený výrobek v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli zdroje tepla-obal je vyroben z kartonu;
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí, které nemohou být opraveny a/nebo nahrazeny;
- Dbejte zvýšené opatrnosti v přítomnosti dětí;

SYMBOLY



Kód produktu



Značka CE



Výrobce



Šarže



Uživatelská příručka



Podmínky likvidace

POPIS ČÁSTÍ



1. Rám - 1 ks
2. Opěradlo – 2ks
3. Šrouby – 2 ks
4. Stupačky – 2 ks
5. Zadní 60'kola – 2 ks
6. Přední kolečka – 2 ks
7. Toaletní nádoba 1 ks

ZASUNUTÍ/VYJMUTÍ OPĚRADLA A PODNOŽEK

Zasunutí

Křeslo MOPEDIA je dodáváno s rozloženým opěradlem a opěrkou nohy.


- A. Vyjměte výrobek z kartonu a zkontrolujte jeho kompletnost.
- B. Namontujte zadní kola pomocí rychloupínacích kolíků. (Obr. 3)
- C. Pro sestavení opěradla vložte trubky do příslušných otvorů „A“. Pevně utáhněte šroubem „B“. (Obr. 4)



Obr. 3



Obr. 4

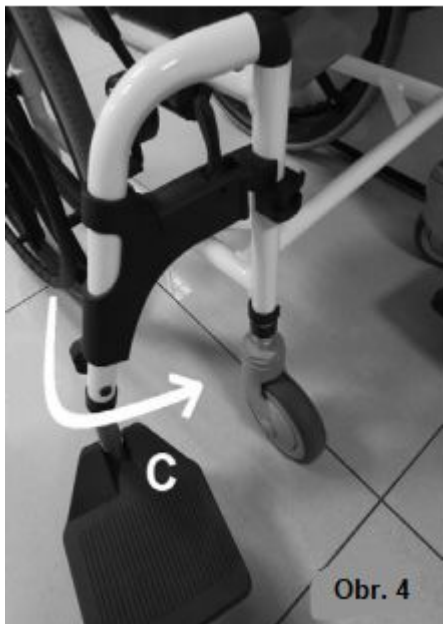

- D. Zasunutí: Podnožky zasuňte směrem dovnitř křesla, dokud nezapadnou na své místo.
- E. Vyjmutí: Uvolněte aretační pojistku na podnožkách, vykleňte podnožky do stran a vysuňte podnožky. (Obr. 4)
- F. Pod sedadlo podél drážek zasuňte toaletní nádobu.
- G. Nyní je zařízení připraveno k použití.

VAROVÁNÍ: Podnožky by měly být vždy otočeny směrem dovnitř. Toaletní nádobu zasuňte ze zadní strany židle a dbejte na to, abyste ji zasunuli správně.

Vyjmutí

Pro vyjmutí částí postupujte opačně.

PŘED POUŽITÍM

- Z důvodu bezpečnosti osob a s ohledem na životní prostředí vždy zkontrolujte stav mechanických částí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně namontovány, aby bylo zajištěno bezpečné používání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ

- Nepřekračujte maximální nosnost.
- Při manipulaci vždy pomáhejte pacientovi.
- Nepokoušejte se sjíždět svah s více než 10 % sklonu bez pomoci.
- Při přenosu s pacientem zablokujte kola.
- Křeslo by mělo být umístěno na stabilním povrchu a před přemístěním uživatele by měly být zablokovány brzdy kol.
- Před naklápěním do strany nebo zvednutím otočte kolečka směrem k přední straně křesla a zajistěte zámky kol, abyste zabránili převrácení křesla.
- Nenaklánějte se přes opěradlo, protože to může způsobit převrácení křesla.
- Dbejte na to, aby nedošlo k rozdrčení prstů během montáže nebo používání.
- Držte křeslo daleko od ohně.
- Používejte vždy originální náhradní díly a příslušenství.

POUŽITÍ

K manipulaci s křeslem používejte pouze zadní madlo, části rámu neslouží k manipulaci. Před manipulací ve svahu či nakloněné rovině se ujistěte, že můžete křeslo bezpečně ovládat. Všichni uživatelé by před použitím křesla nejprve měli konzultovat správné techniky manipulace ve svahu s kvalifikovaným odborníkem. Při sklonu větším než 10 % by měla mít obsluha křesla k dispozici asistenci. Pokud je nutné zastavit na svahu, vyhněte se náhlým, prudkým pohybům. Pokud chcete křeslo zdvihnout, držte ho pouze za zadní úchyty a rám.

VAROVÁNÍ: Opěrka nohou slouží pouze jako odpočinková plocha pro nohy, uživatel se o ní nesmí opírat celou svou vahou.

Brzdy

Aktivujte brzdu zatlačením páky na každém kole. Pokud je třeba upravit polohu brzdové páky, povolte matici, nastavte páku do požadované polohy a utáhněte.

WC

Používejte toaletu pouze když je křeslo v klidu. K použití toalety odstraňte vyjímatelnou část sedadla pomocí rukojeti na přední části. Toaletní mísu vyjměte pomocí rukojeti.



Područky

Pro usnadnění přepravy křesla můžete odstranit nebo pootočit područky.

VAROVÁNÍ: Nikdy je nepoužívejte k manipulaci s křeslem nebo k jeho zvedání.

Nastavení podnožek

Podnožky lze nastavit dle vašich potřeb. Povolte šroub, nastavte podnožky do požadované polohy a šroub utáhněte. Zkontrolujte, zda jsou nastaveny ve stejné výšce.

Nastavení výšky sedadla

Výšku sedadla lze nastavit v rozmezí od 45 do 52,5 cm s možností aretace ve 3 polohách.

Odstraňte bezpečnostní svorku, nastavte výšku a vložte zpět svorku.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je křeslo stabilní. Všechny bezpečnostní svorky musí být nastaveny ve stejné výšce.

ÚDRŽBA

Křeslo MOPEDIA vyžaduje minimální údržbu a péči, pravidelně kontrolujte:

- Brzdy: měsíčně
- Čištění sedadla: dle potřeby
- Čištění ostatních částí (područky aj.): dle potřeby
- Odborná kontrola: 1x za dva roky

Mějte na paměti, aby křeslo bylo před prvním použitím zkontrolováno. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice správně utažené.

ČIŠTĚNÍ

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchat s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

LIKVIDACE:

Produkt nesmí být likvidován jako komunální odpad, je třeba ho odvézt do sběrného dvora dle platné místní vyhlášky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost											
Rozměry v cm											
	85	40	92,5±100	70±77,5	48,5±56	46±52,5	44	42			
RS847	102								63	17,5	60 12,5

Tolerance +/-0,5 cm

Technická specifikace

- Práškově hliníkový rám
- PU sedadlo, područky a opěradlo
- Sklopné područky
- Výškově nastavitelné sedadlo s možností aretace ve 3 polohách
- Odnímatelná toaletní nádoba s víkem
- Zadní 60' rychloupínací kola
- Maximální nosnost 113 kg

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou.

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravdu

přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň

eshop: www.pomuckyseniorum.cz