



**MOPEDIA®**



RS918 Sedačka do sprchy sklopná

RS919 Sedačka do sprchy sklopná, opěrné nožičky

Návod k obsluze

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení sedačky do sprchy MOPEdia. Sedačky byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší kvality standardy kvality a bezpečnosti. Rám je z práškově lakovaných ocelových trubek se základovou deskou s upevněním na stěnu. Všechny sedačky mohou být umístěny svisle. RS919 má výškově nastavitelné podpůrné nožičky pro případ větší zátěže.

## MONTÁŽ

Úchytná deska na zeď obsahuje montážní otvory. Montáž by měla být provedena pouze odborným technikem a na stěnu, která je schopná unést svislé zatížení a síly způsobené hmotností uživatele (princip páky). Maximální nosnost pro oba modely je 110 kg.

### Nastavení výšky (pro model RS819)

Chcete-li nastavit výšku, stiskněte kolík a vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolík.

**POZNÁMKA:** Nastavte výšku sedáku dříve, než upevníte desku na stěnu.

## ČIŠTĚNÍ

- Sedačky do sprchy vyžadují minimální údržbu. Čištění provádějte příležitostně měkkým hadříkem. Používejte univerzální neutrální čisticí prostředky a teplou vodu.
- Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch výrobku.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou deska a sedák pevně zajištěny.

## VAROVÁNÍ

- Výrobci ani dodavatelé nevnášají žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Před použitím zkontrolujte stav výrobku.
- V případě pochybností o použití, úpravě nebo údržbě výrobku se obraťte na prodejce.
- Opatřované, poškozené nebo chybějící díly je třeba vyměnit.
- Výrobek neskladujte venku.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku a správné utažení šroubů včetně protiskluzových nástavců. (pouze RS919)

## ZÁRUKA

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, která je potvrzena účtenkou nebo fakturou. Distributor si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným poškozením při montáži/demontáži. V případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně oslovte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.



Stamed s.r.o.  
telefon: +420 725 323 111  
www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)  
email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)  
adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň