

**KOUPELNOVÁ SEDAČKA**  
**NÁVOD K POUŽITÍ**

**MOPEDIA®**



## INDEX

1. KÓD .....	STRANA .3
2. ÚVOD .....	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ .....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STRANA.4
6. SYMBOLY .....	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS.....	STRANA.4
8. MONTÁŽ.....	STRANA.4
9. PŘED POUŽITÍM .....	STRANA.5
10. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ .....	STRANA.5
11. ČIŠTĚNÍ .....	STRANA.5
12. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	STRANA.5
13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI .....	STRANA.5
14. ZÁRUKA .....	STRANA.6
15. OPRAVA .....	STRANA.6
15.1 Záruční opravy .....	strana 6
15.2 Opravy, na které se nevztahuje záruka.....	strana 6
15.3 Zařízení bez závad .....	stran a 6
16. NÁHRADNÍ DÍLY.....	STRANA.7
17. VÝJIMKY.....	STRANA.7

**EC** Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓDY

RS921 Dřevěná sedačka do vany

RS922 Dřevěná sedačka do vany

RS923 Závěsná sedačka do vany

RS925 Závěsná sedačka do vany s opěrkou

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili koupelnové výrobky MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A.. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat výrobek, který jste si vybrali, a poskytuje několik cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím návod pečlivě přečtěte. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže. V případě nejasností doporučujeme obrátit se na prodejce, který vám může pomoci a správně poradit.

**Poznámka Před použitím zkontrolujte, zda některý díl není poškozen při přepravě, a vyzkoušejte jej. V případě poškození zařízení nepoužívejte. Další pokyny získáte od svého prodejce.**

## 3. URČENÉ POUŽITÍ

Dřevěné koupací křeslo Moretti je určeno pro asistenci pacientům se zdravotním postižením při koupání.



### POZOR!

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

## 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny LÁZEŇSKÉ ŽIDLE je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující :









1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabičce NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže .

**Poznámka:** Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek ani žádné dostupné volitelné vybavení, aniž byste si nejprve zcela přečetli tento návod k použití a porozuměli mu. Pokud nejste schopni porozumět varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se před pokusem o použití tohoto zařízení na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál, jinak může dojít ke zranění nebo poškození.
- Zabalenou sprchovou lavici uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- Limit použití výrobku je dán opotřebením dílů.
- **VŽDY** udržujte ruce a prsty mimo dosah pohyblivých částí, aby nedošlo ke zranění.
- **NEDOVOLUJTE** dětem, aby si na koupacím křesle hrály nebo ho obsluhovaly.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobci a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

## 6. SYMBOLY


	Kód produktu
	Jedinečná identifikace zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace


## 7. OBECNÝ POPIS

Pro vany od 53 do 67 vnitřních rozměrů vany.

## 8. MONTÁŽ

- Zasuňte područky "C" do rámu.
- Pro použití židle na vanách o šířce 67 cm použijte plastové distanční podložky.
- K ochraně boků vany je k dispozici 8 plastových spon "B".
- Zasuňte opěradlo "D" do rámu podle obrázku (pouze pro RS922 a RS925).

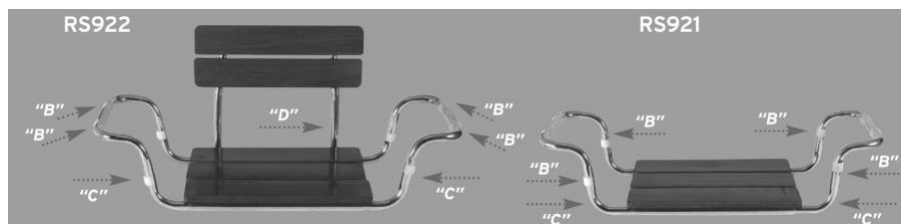

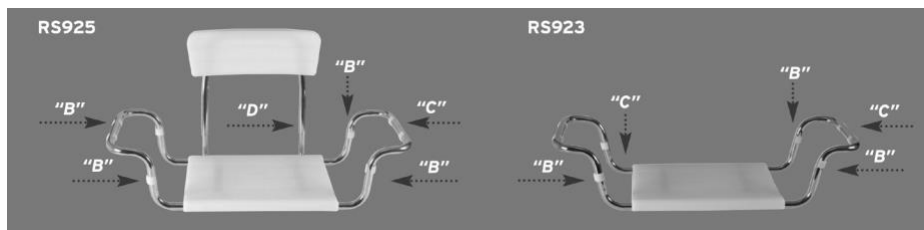

## 9. PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro osoby a věci.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení.

## 10. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Výrobce a distributor odmítají jakoukoli odpovědnost za následky nesprávného použití tohoto výrobku.

- Před použitím zkontrolujte, zda byl výrobek dodán v bezvadném stavu.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o používání, nastavení nebo údržbě výrobku, obraťte se na svého prodejce.
- Opatřované, poškozené nebo chybějící součásti je třeba vyměnit.
- Výrobek neskladujte venku.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku.



### POZOR!

Tento výrobek se doporučuje pro osoby s hmotností maximálně 100 kg.

## 11. ČIŠTĚNÍ

Použijte vlhký hadřík a běžný čisticí prostředek. Doporučujeme neponořovat sedačku do vody ve vaně, po použití vypustit trubky sedačky a sedačku důkladně vysušit.



## 12. PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte vkladací kontejner na komunální odpad. Doporučujeme vanové křeslo odevzdat do příslušných sběrných míst pro recyklaci.

## 13. TECHNICKÉ

### VLASTNOSTI RS921

ROZMĚRY:  D: 53 ÷ 71 CM  P: 37 CM  V: 17 CM



HMOTNOST: 2 KG



MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTNÁKLADU: 100KG

### RS922

ROZMĚRY:  D: 53 ÷ 71 CM  P: 37 CM  V: 32 CM



HMOTNOST: 2,5KG



MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTNÁKLADU: 100KG

**RS923****ROZMĚRY:**
 **D: 53÷ 71 CM CM**
 **P: 37 CM**
 **V: 17 CM**
**HMOTNOST:****2 KG****MAXIMÁLNÍ****HMOTNOSTNÁKLADU: 100KG****RS925****ROZMĚRY:**
 **D: 53÷ 71 CM**
 **P: 37 CM**
 **V: 32 CM**
**HMOTNOST:****2,5KG****MAXIMÁLNÍ****HMOTNOSTNÁKLADU: 100KG****14. ZÁRUKA**

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku, Záruka neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správné určené použití zařízení je uvedeno v tomto návodu.

Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním.

Společnost Moretti Moretti nezaručuje, že výrobky budou poškozeny nebo vadné za následujících podmínek: živelná pohroma, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je poskytováno) použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neautorizovaná změna, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

**15. OPRAVA****15.1 Záruční oprava**

V případě, že se na výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, společnost Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na vadu může vztahovat záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení výrobek v rámci záruky opravit nebo vyměnit u prodejce Moretti nebo v provozovně Moretti. Náklady na práci při opravě mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje ani neobnovuje záruku.

**15.2 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka**

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu při opravě, na kterou se nevztahuje záruka, plně hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka po dobu šesti (6) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

**15.3 Nepoškozené zařízení**

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

## 16. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí. Náhradní díly a příslušenství naleznete pouze v obecném katalogu Moretti.

## 17. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás některé výhrady a omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



## ZÁRUČNÍ LIST

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne (datum) \_\_\_\_\_

Maloobchodní prodejce \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) e-mail: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.