



MOPEDIA®



RS923



RS925

RS923 Sedačka do vany závěsná

RS925 Sedačka do vany závěsná s opěrkou

Návod k obsluze

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení sedačky do vany MOPEdia, které byly navrženy a vyrobeny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a bezpečnost.

NÁVOD K POUŽITÍ

- V rámu posuňte područky "C".
- Sedačka je opatřena osmi plastovými návleky, které zabraňují klouzání a poškrábání vany.
- Vložte opěradlo "D" do rámu, jak je znázorněno (pouze pro RS925).

ČIŠTĚNÍ

Použijte vlhký hadřík a běžný mycí prostředek. Doporučujeme nepokládat sedačku do vody. Po použití nechte odtéct přebytečnou vodu na sedačce a osušte.


Upozornění:

Tento produkt je vhodný pro osoby s maximální nosností 100 kg.

VAROVÁNÍ

- Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Před použitím zkontrolujte kompletnost balení.
- V případě pochybností ohledně použití, úpravy nebo údržby výrobku, kontaktujte svého prodejce.
- Opatřené, poškozené nebo chybějící díly vyměňte.
- Výrobek neukládejte venku.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku.

Vhodné pro vany s vnitřní šířkou od 53 do 67 cm.

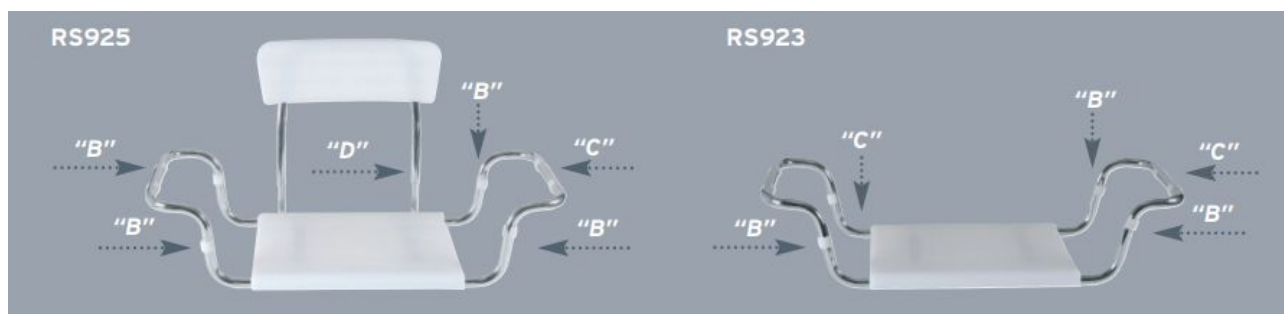

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku bez jakýchkoli poplatků. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. V případě opravy produktu a splnění záručních podmínek, zašlete produkt spolu s dokladem o nákupu případně reklamačním protokolem.



Stamed s.r.o.
telefon: +420 725 323 111
www: www.stamed.cz
email: obchod@stamed.cz
adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň
eshop: www.pomuckyseniorum.cz