

SafeCrushTM

BY SERRANO

Návod k použití



Serrano Medical Solutions Inc.

Kanada

E-mail: sales@safecrush.com

Web: safecrush.com

Kancelář: 778-588-5477

SafeCrush Irsko

E-mail: sales@safecrush.com

Web: safecrush.com

SafeCrush Jižní Afrika

E-mail: simone@safecrushint.com

Web: safecrush.com

SAFECRUSH™ - ODKAZY NA VIDEA

SafeCrush™ - vzdělávací série - prevence zranění

<https://www.safecrush.com/resources/v/safecrush-injury-prevention>

SafeCrush™ - Vzdělávací série - Ucpané napájecí trubice

<https://www.safecrush.com/resources/v/safecrush-clogged-feeding-tubes>

SafeCrush™ - Vzdělávací série - Hluk

<https://www.safecrush.com/resources/v/safecrush-eliminating-noise>

SafeCrush™ - vzdělávací série - Airborne Pill Dust

<https://www.safecrush.com/resources/v/safecrush-eliminating-airborne-pill-dust>

SafeCrush™ - Vzdělávací série - Čas a efektivita

<https://www.safecrush.com/resources/v/safecrush-efficiency>

Rychlý návod k použití

(Po vložení baterie do zařízení SafeCrush™ a jejím nabíjení po dobu čtyř hodin nebo přes noc)

Krok 1: Vyjměte hliníkový zásobník na kelímky.

Krok 2: Umístěte drticí kelímek SafeCrush™ do plastového držáku a ujistěte se, že je kelímek usazen a drží v zářezu vyrytém v plastovém držáku kelímku.

VAROVÁNÍ

Nedrtě tablety v modrém držáku na kelímky.
Rozbijete tím drticí hlavu. Záruka se na to nevztahuje.

Krok 3: Vložte drtitelné tablety do drticího kelímku SafeCrush™.

Krok 4: Na tablety položte další drticí kelímek SafeCrush™.

Připomínka

Na každé drcení musíte použít 2 bílé drticí kelímky SafeCrush™. Jeden kelímek slouží k zachycení prášku, druhá chrání přechodadlo a zabraňuje kontaktu s práškem (křížová kontaminace). Druhý kelímek také umožňuje fungování systému SafeCrush™.

Krok 5: Zavřete hliníkový zásobník na kelímky.

Krok 6: Stiskněte tlačítko Crush.

Krok 7: Jakmile je cyklus drcení dokončen, což signalizuje modrá kontrolka, vysuňte hliníkový zásobník na šálky.

Krok 8: Vyjměte oba drticí pohárky SafeCrush™ (a rozdrcené tablety uvnitř) a položte je na pult nebo na povrch vzdálený od otvoru drticí komory.

Krok 9: Vyjměte horní nádobku- recyklujte ji nebo zlikvidujte.

Krok 10: Přidejte jablečné pyré nebo podobný produkt do hrnku s rozdrcenými tabletami a dobře promíchejte.

ČERVENÁ (BLIKÁ): Baterie je vybitá, zbývá maximálně 10 stisknutí dokud se baterie zcela nevybije.

ČERVENÁ (STÁLÁ): Zkontrolujte, zda je zavřený zásobník CUP-PILLS-CUP a/nebo hliníkový zásobník na šálky.


ZELENÁ (BLIKÁ): Baterie se nabíjí (je připojena ke zdroji napájení).

ZELENÁ (STÁLÁ): Baterie je nabitá na 100 %.

MODRÁ (BLIKÁ): Cyklus drcení je aktivní.

MODRÁ (STÁLÁ): Připraveno k rozdrcení.

MODRÁ (STÁLÁ): Cyklus drcení je dokončen.

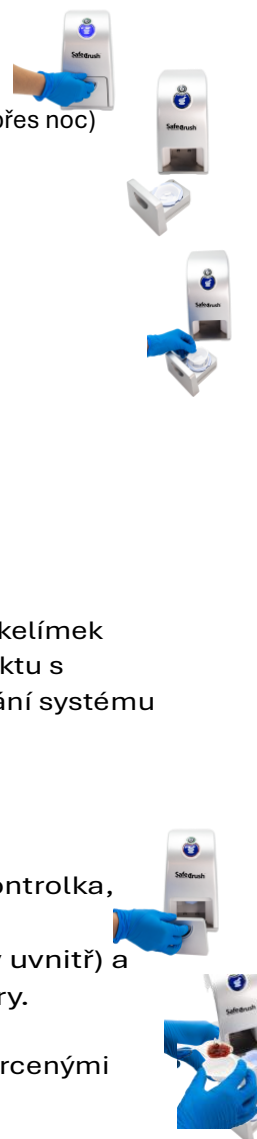

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Na konci každého drcení použijte vlhký hadřík nebo alkoholové ubrousky k očištění zařízení SafeCrush™ poté otřete suchým hadříkem.



BATERIE

Pokud nenabíjíte baterii, mějte zařízení SafeCrush™ "odpojené od sítě".



POZOR!!! Při vkládání baterie dbejte na správné umístění kabelu propojující baterii a drtič léků, viz obrázky.



ÚDRŽBA

Pokud systém SafeCrush™ nefunguje správně, obraťte se na klinické inženýrství ve svém zařízení nebo kontaktujte společnost Serrano Medical Solutions Inc. e-mailem na [adrese: info@safecrush.com](mailto:info@safecrush.com).

POKYNY K ČIŠTĚNÍ



KROK PRVNÍ:

Abyste předešli možnému zranění, odpojte před čištěním nabíjecí kabel ze zadní strany zařízení SafeCrush™.

KROK DRUHÝ:

Na konci každého drcení očistěte vnitřek mlecí komory alkoholovým tamponem a poté ji osušte suchým hadříkem. Nepoužívejte peroxid. Hadřík zlikvidujte, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

KROK TŘETÍ:

DŮLEŽITÉ - Otřete hliníkovou zásuvku, mlecí hlavu, plastový držák na kelímky a mlecí komoru. Zvláště důležité je vyčistit senzory po stranách drtící komory. Pokud není správně dodržen protokol drcení SafeCrush™, může se na senzorech nahromadit prach z pilulek, který je pokryje a způsobí poruchu funkce systému SafeCrush™.

KROK ČTVRTÝ:

Ubrousek zlikvidujte. Nepoužívejte vlhké utěrky nebo alkoholové tampony, protože by mohlo dojít ke křížové kontaminaci.

Záruka

Zdravotnická řešení od společnosti Serrano Záruka SafeCrush™

Společnost Serrano Medical Solutions Inc (Serrano) poskytuje na všechny držiče léků SafeCrush™ záruku na vady materiálu a zpracování pouze po dobu 3 let (1 ROK na baterii). Pokud se zjistí, že je přístroj SafeCrush™ vadný, společnost Serrano podle svého uvážení přístroj SafeCrush opraví nebo vymění, a to bezplatně pro původního kupujícího. Je vyžadován originální doklad o koupi. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití výrobku, úpravy, demontáž, modifikace, nesprávné použití, neautorizované opravy nebo použití zařízení SafeCrush™ v rozporu s původním záměrem výrobce, jak je popsáno v uživatelské příručce k zařízení SafeCrush™ a v návodu k použití www.safecrush.com. Záruka se navíc nevztahuje na používání jiných kelímků než SafeCrush™ od společnosti Serrano Medical Solutions Inc. Společnost Serrano si vyhrazuje právo provést kontrolu jakéhokoli zboží vráceného z důvodu vadné reklamace podle výše uvedených kritérií před uznáním reklamace zákazníka.

3LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Na co se vztahuje tato omezená záruka?

Výrobce výrobku SafeCrush™ zaručuje držiteli platného dokladu o koupi (spotřebiteli nebo vám), že výrobek a veškeré příslušenství, které je součástí prodejního balení (výrobek), bude bez vad materiálu a zpracování za následujících podmínek, pokud je správně nainstalován a používán v souladu s návodem k obsluze výrobku. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na spotřebitele na výrobky zakoupené a používané po celém světě.

Co udělá společnost Serrano Medical Solutions nebo její sesterská společnost SafeCrush™ International? (Výrobce), pokud výrobek nebude během omezené záruční doby bez vad materiálu a zpracování ("výrobek s vadou materiálu")?

Během omezené záruční doby a u t o r i z o v a n ý servisní zástupce výrobce podle volby výrobce bezplatně opraví nebo vymění věcně vadný výrobek. Pokud výrobek opravíme, můžeme použít nové nebo repasované náhradní díly. Pokud se rozhodneme výrobek vyměnit, můžeme jej nahradit novým nebo repasovaným výrobkem stejné nebo podobné konstrukce. Vadné díly, moduly nebo zařízení si ponecháme. Oprava nebo výměna výrobku podle volby výrobce je vaším výhradním opravným prostředkem. Opravený nebo repasovaný výrobek vám výrobce vrátí. Náhradní výrobky vám zašle ve funkčním stavu. Po č í t e j t e s t í m , že oprava nebo výměna bude trvat přibližně 30 dní.

Jak dlouhá je omezená záruční doba?

Omezená záruční doba na drtič tablet SafeCrush™ je tři (3) roky od data zakoupení. Pokud společnost v rámci této omezené záruky opraví nebo vymění věcně vadný výrobek, vztahuje se tato omezená záruka i na opravený nebo vyměněný výrobek, a to buď po dobu (a) 90 dnů ode dne, kdy vám byl opravený nebo vyměněný výrobek zaslán, nebo (b) po zbývající dobu původní tříleté záruky; podle toho, která doba je delší

Pokračování záruky

Na co se tato omezená záruka nevztahuje?

Tato omezená záruka se nevztahuje:

1. Výrobek, který byl vystaven nesprávnému použití, nehodě, přepravě nebo jinému fyzickému poškození, nesprávné instalaci, abnormálnímu provozu nebo manipulaci, zanedbání, zaplavení, opětovnému vniknutí, vniknutí vody nebo jiné kapaliny;
2. Výrobek, který byl poškozen opravou, úpravou nebo modifikací provedenou jinou osobou než autorizovaným servisním zástupcem výrobce;
3. výrobku, pokud je problém způsoben elektrickými podmínkami ve vašem zařízení;
4. výrobku, pokud je problém způsoben použitím příslušenství jiných výrobců, například šálků jiných výrobců nebo jiných baterií než baterií SafeCrush™;
5. Výrobky, u nichž byly odstraněny, pozměněny nebo nečitelné záruční nálepky a nálepky kvality, štítky šarží nebo elektronická sériová čísla.

Jak získáte záruční servis?

Záruční servis v USA a Kanadě získáte na telefonním čísle 1 (877) 768-3828. Po celém světě nám prosím napište na info@safecrush.com.

POZNÁMKA:

Než zavoláte do servisu, přečtěte si návod k použití - kontrola ovládacích prvků a funkcí výrobku vám může ušetřit volání do servisu. S výjimkou případů stanovených zákonem přebíráte riziko ztráty nebo poškození během přepravy a transportu a nesete odpovědnost za veškeré náklady na doručení nebo manipulaci vzniklé při přepravě vadných výrobků do servisního místa. Výrobce vrátí opravený nebo vyměněný výrobek v rámci této omezené záruky. Dopravu opraveného nebo vyměněného výrobku, dodací nebo manipulační poplatky hradí předem výrobce.

Výrobce nepřebírá žádné riziko za poškození nebo ztrátu výrobku během přepravy. Pokud se na závadu výrobku nevztahuje tato omezená záruka nebo doklad o koupi neodpovídá podmínkám této omezené záruky, výrobce vás na to upozorní a požádá vás o schválení nákladů na opravu před jakoukoli další činností spojenou s opravou. Náklady na opravu a náklady na zpětnou dopravu v případě opravy výrobků, na které se nevztahuje tato omezená záruka, hradíte vy.

Co je třeba vrátit spolu s výrobkem, abyste získali záruční servis?

1. Vraťte celé originální balení s veškerým obsahem včetně výrobku oddělení zákaznického servisu výrobce (které vám bude poskytnuto e-mailem) spolu s popisem závady nebo chyby;
2. Zadejte číslo šarže výrobku (umístěné na spodní straně zařízení SafeCrush™).
3. Zadejte své jméno, úplnou a správnou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Další omezení

Tato záruka je úplnou a výhradní dohodou mezi vámi a společností, výrobcem. Nahrazuje všechna ostatní písemná, nebo ústní sdělení týkající se tohoto výrobku. Výrobce neposkytuje na tento výrobek žádné jiné záruky. Záruka se vztahuje výhradně na všechny povinnosti výrobce ve vztahu k výrobku. Neexistují žádné další výslovné záruky. Žádná osoba není oprávněna provádět jakékoliv změny této omezené záruky a neměli byste se na takové změny spoléhat.

Výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo podobné škody (mimo jiné včetně ušlého zisku nebo příjmů, nemožnosti používat výrobek nebo jiné související zařízení, nákladů na náhradní zařízení a nároků třetích stran) vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí a pacientů.

Pokud systém SafeCrush™ nefunguje správně, obraťte se na klinické inženýrství ve svém zařízení nebo kontaktujte společnost Serrano Medical Solutions Inc. e-mailem na [adrese: info@safecrush.com](mailto:info@safecrush.com).

