



# ANTIDEKUBITNÍ NAFUKOVACÍ PODSEDÁK ST851/2

Návod k obsluze

## Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	1
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	2
POUŽITÍ.....	2
PÉČE A ÚDRŽBA .....	3
OPRAVA ANTIDEKUBITNÍHO PODSEDÁKU .....	3
ČIŠTĚNÍ A MYCÍ INSTRUKCE.....	3
Čištění.....	3
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	3
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	4
ZÁRUKA.....	4

## OZNAČENÍ

ST851/2 – Dvoukomůrkový podsedák 40 x 40 cm v: 6 cm

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení antidekubitního podsedáku LEVITAS. Jeho design a kvalita zaručují uživatelský komfort, bezpečnost a spolehlivost. Podsedáky LEVITAS jsou navrženy a realizovány tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

## ÚČEL POUŽITÍ

Podsedáky jsou navrženy tak, aby zajistily rovnováhu, ochránily zdraví pacienta a zabránily vzniku dekubitu a poškození tkáně. Zajišťuje perfektní rozložení hmotnosti a zmírní tlak v jakékoli poloze. Navíc podsedák se přizpůsobí tvarům těla uživatele a umožňuje plné ponoření do sedací části těla.

### Pro koho je antidekubitní podsedák určen?

- Pro ty, pro které je sezení nepohodlné.
- Pro vozíčkáře
- Osobám, které dlouhodobě sedí (z důvodu nemoci, starší osoby atd.)
- Osobám, u kterých je riziko vzniku dekubitů
- Osobám, které mají šikmé postavení pánve

### Na co je podsedák je určen?

- Pro zabezpečení správného umístění pánve a dolních končetin
- Stabilitu trupu, hlavy, krku a horních končetin zajištěním pánve a dolních končetin
- Pro snížení tlaku
- Pro prevenci vzniku poškození kůže

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu vzduchových polštářů, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem.
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Materiál:
- Polštář: PVC
- Podšívka: Základ z PU, kryt a spodní boční kryt z nylonu.
- Rozměry: Dvoukomůrkový podsedák 40 x 40 cm v: 6 cm

## VAROVÁNÍ:

Před prvním použitím si přečtěte tento návod k použití. Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí.

## POUŽITÍ

Nafukovací pumpa je součástí vybavení.

### **Podsedák**

1. Umístěte antidekubitní podsedák na židli.
2. Odšroubujte ventil proti směru hodinových ručiček.
3. Připojte pumpičku do ventilu.
4. Nafoukněte polštář.
5. Po nafouknutí vytáhněte pumpu a zavřete ventil.
6. Posad'te se na podsedák.
7. Umístěte ruku pod pánevní oblast v místě, kde kost nejvíce vystupuje
8. Pomalu otevřete ventil a nechte unikat vzduch. Uzavřete ventil, když vznikne mezera mezi sedákem a pánví alespoň pro na šířku konečků prstů.
9. V tuto chvíli je podsedák správně nafouknutý.

### **Potah**

- Potah chrání povrch podsedáku. Dno je vyrobeno z protiskluzového materiálu, který se zafixuje na židli a pomáhá pacientovi udržet rovnováhu.
- Pokud chcete potah použít, postupujte dle následujících pokynů:
- Rozložte potah, černou protiskluzovou úpravou dolů a zipem nahoru.
- Vložte podsedák s buňkami nahoru do potahu s prodyšnou stranou vzhůru.
- Ventil musí vyčnívat ven – k tomu slouží otvor v potahu.
- Jemně zatlačte na podsedák, případně s ním lehce posunujte ze strany na stranu – dosáhnete lepší fixace k potahu.
- Opatrně zapněte zip.

## UPOZORNĚNÍ

- Regulujte tlak podsedáku nafukovací pumpičkou nebo manometrem každých 5-10 dnů.
- Pracujte s následujícími teplotními a vlhkostními rozsahy:
- Teplotní rozsah: 0 ~ 40 ° C
- Rozsah vlhkosti: 10 ~ 90 % RH

## PÉČE A ÚDRŽBA

Výrobky řady LEVITAS jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Používejte pouze originální díly a příslušenství.

### OPRAVA ANTIDEKUBITNÍHO PODSEDÁKU

- Nechte vyfouknout podsedák.
- Použijte brusný papír a jemně nabruste poškozené místo do hladka.
- Poškozený povrch zalepte záplatou potřenou lepidlem.
- Nechte schnout 5 minut, případně otřete zbytky lepidla, poté zatlačte na náplast.
- Po uschnutí nafoukněte podsedák

### ČIŠTĚNÍ A MYCÍ INSTRUKCE

#### Čištění

##### **Podsedák**

- Pro čištění výrobku použijte vlažnou vodu a neutrální mýdlo.
- Podsedák otřete mokrým hadříkem a opláchněte studenou vodou.
- Podsedák nechte uschnout.

#### VAROVÁNÍ

- Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.
- Podsedák neperte v pračce.
- Nepoužívejte tepelné ani parní trysky.
- Chraňte před přímým slunečním světlem.

##### **Potah**

- Potah perte ve studené vodě s pracím práškem nebo kapalným čisticím prostředkem. Opláchněte studenou vodou a nechte volně uschnout.
- Nepoužívejte sušičku, topení nebo bělidlo.
- Nežehlete
- Skladování:  
Teplotní rozsah: 0 ~ 40 ° C  
Rozsah vlhkosti: 10 ~ 90 % RH

\*10% tolerance u všech specifikací

### OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavatelé nevniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

## UPOZORNĚNÍ

- Chraňte před ostrými předměty a nedopalky cigaret
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a ohni
- Maximální nosnost je 130 kg. Nepřekračujte maximální nosnost.
- NEPOUŽÍVEJTE podsedák, pokud je poškozen vnější silou.
- Před usednutím na podsedák se ujistěte, že na povrchu podsedáku nezůstaly žádné cizí předměty.
- Podsedák by měl být používán samostatně, nekombinujte s jinými topnými nebo chladícími zařízeními.

## NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v katalogu výrobce.

## ZÁRUKA

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, které je potvrzen účtenkou nebo fakturou. Distributor si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným poškozením nebo poškozením při montáži/demontáži. V případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně kontaktujte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.



### **Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň

eshop: [www.pomuckyseniorum.cz](http://www.pomuckyseniorum.cz)