


Evakuační podložka



Evakuační podložka EVS je určena ke snadné evakuaci osob v případě nouze. Výrazně zvyšuje efektivitu záchrany pacientů v případě požáru. Snadná manipulace jedním až dvěma lidmi. Rychlá příprava pro evakuaci pacientů. Evakuační podložka slouží jako trvalá součást lůžka.

- ✓ Kluzná spodní vrstva pro snadnou manipulaci
- ✓ Křížové prošíání u bezpečnostních pásů a popruhů
- ✓ Možnost umístění na různě vysoké typy matrací
- ✓ Evakuace po schodech a úzkých prostorech
- ✓ Trvalá součást lůžka
- ✓ Nevytváří tlakové body
- ✓ Přezky v podobě plastového „trojzubce“ nebo kovové spony

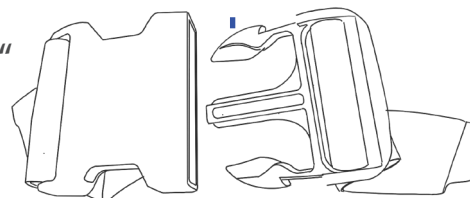

Možnost evakuace
v jednom nebo
dvou lidech



Varianta s
dvěma popruhy
a plastovou přezkou



Varianta s třemi
popruhy a přezkou
kovovou



Rychlá příprava pro
evakuaci





Nehořlavý materiál



Snadná manipulace

EVAKUAČNÍ PODLOŽKA - Příprava lůžka a samotná evakuace

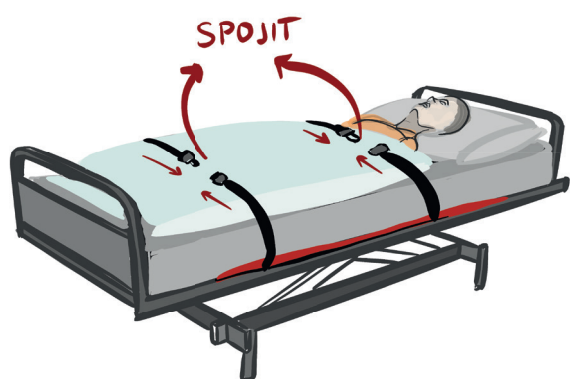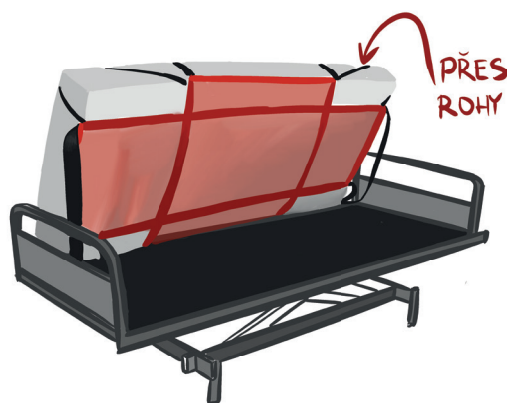

1. Příprava lůžka pro evakuační podložku

- Položte podložku na rošt lůžka.
- Ujistěte se, že je viditelný štítek. Šipky znázorňují správné umístění podložky směrem k hlavě nebo nohám ležícího.
- Ujistěte se, že je **viditelný štítek**, a umístěte matraci na horní stranu evakuační podložky.
- Připevněte rohové pásky evakuační podložky na rohy matrace.

Poznámka: Maximální rozměry použité matrace jsou 200 x 90 cm, Lůžko následně ustelte obvyklým způsobem.

2. Příprava ležícího pro evakuaci

- Umístěte polštář pod pacientovu šíji, abyste tak zajistili dostatečnou ochranu a podporu oblasti krku evakuované osoby.
- Pokud je riziko, že by u evakuované osoby mohlo dojít k poranění hrudníku, pevným utažením jistícího popruhu umístěte evakuované osobě na oblast hrudníku polštář pro snížení tlaku na tuto oblast. Až poté zajišťovací popruh náležitě utáhněte.
- Nyní propojte spony protilehlých popruhů přes matraci a evakuovanou osobu a utáhněte. Utažení popruhů **nesmí** evakuované osobě způsobit zranění.
- Upravte výšku lůžka do nejnižší možné polohy. **Nyní je pacient připraven na evakuaci.**

3. Přemístění pacienta z lůžka

- Pokud se rozhodnete pro evakuaci tažením za popruhy v nožní části matrace, posuňte matraci s ležícím pod úhlem 45° tak, abyste měli neustálou kontrolu nad rychlostí pohybu matrace z lůžka na zem, aby nedošlo k poranění ležícího.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů není tímto způsobem povolena evakuace osob s hmotností nad 250 kg.

Pro bezpečnou evakuaci výrobce doporučuje, aby přesunutí pacienta z lůžka na zem **bylo prováděno ve dvou osobách**

- **1. osoba** u hlavy pacienta zajišťuje stabilitu hlavy a krku a zároveň kontroluje rychlost sesunutí matrace na zem, zatímco...
- **2. osoba** zjišťuje stažení matrace s pacientem dolů z lůžka na zem.




**Doporučená evakuace
ve dvou lidech**

EVAKUAČNÍ PODLOŽKA - Příprava lůžka a samotná evakuace



Doporučená evakuace po schodech ve dvou lidech

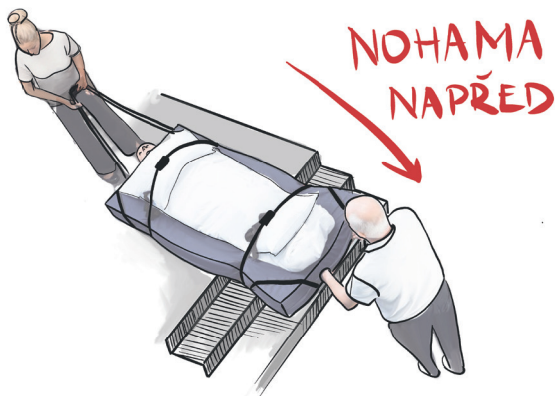

4. Evakuace pacienta na bezpečné místo

- Tažením za popruhy přemístíte podložku spolu s matrací z pokoje na místo stanovené v evakuačním plánu. Pro bezpečnou manipulaci s pacientem je doporučena obsluha ve dvou osobách.
- Pro snížení tření a zvýšení komfortu a efektivity evakuace nadlehčete při tažení rohy matrace. Pro snadnější zatočení kolem rohů můžete bok matrace odlehčit pomocí postranních úchytlů.
- Upozornění: Mějte na paměti, že koberec na podlaze výrazně zvyšuje tření a evakuace je tak mnohem obtížnější.

5. Evakuace po schodech

- Pokud je zapotřebí evakuovat po schodech, je výrobcem doporučeno toto provádět za účasti dvou osob. Evakuace osob o vyšší hmotnosti může pro bezpečný transport vyžadovat více osob obsluhy.

Upozornění: Transport po schodech provádějte co nejplynuleji, zvláště pak v počáteční fázi při překonávání prvního schodu, kdy je zvýšený tlak na tělo pacienta.

6. Pravidelně kontrolujte neporušenost a celistvost evakuační podložky. Před zahájením používání a během používání kontrolujte neporušenost evakuační podložek každých 3–6 měsíců. Kontrolované položky jsou uvedeny v příloženém kontrolním seznamu.

7. V případě potřeby údržby a čištění postupujte podle instrukcí uvedených na štítku.

8. Evakuační podložku skladujte na suchém a chladném prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím evakuační podložky si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že rozumíte všem uvedeným instrukcím. Pokud některým pasážím obsluhy nebo upozornění nerozumíte, kontaktujte svého dodavatele. Pokud je evakuační podložka nesprávně umístěna nebo používána v rozporu s návodem k obsluze, může dojít k ublížení na zdraví evakuované osoby nebo obsluhy. Nesprávným použitím může rovněž dojít k poškození samostatné evakuační podložky.

- NEPOUŽÍVEJTE evakuační podložku, pokud je poškozená nebo chybějí některé části výrobku.
- NEPŘEKRAČUJTE maximální povolené zatížení podložky.

KONTRAINDIKACE

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v případě, že pacient trpí vnějším poraněním nebo poraněním krku/páteře.



praní max. na 80°



v sušičce na nízké teploty



nepoužívat bělidlo



nežehlit



viz. návod



Seznam kontrolovaných položek u evakuační podložky

Datum kontroly:

Vizuální kontrola				
č.	Kontrolovaná část	Standardní požadavek	Závěr	
			OK	Neg
1	Vzhled produktu	Celý produkt nesmí být poškozený, odřený, roztřepený.		
2	Štítek	Štítek na podložce musí být čitelný: maximální zatížení, objednáací číslo, sériové číslo, velikost, prací symboly.		
3	Látka	Látka musí být bez trhlin, roztřepených okrajů, stop od propálení, dírek, barevných odchylek, zápachu, nebo jiných známek opotřebení.		
4	Švy	Švy: žádné povolené a volné nitě, ani poškozené švy/stehy.		
5	Popruhy	Popruhy musí být bez trhlin, roztřepených okrajů, stop od spálení, nebo jiných známek opotřebení.		
6	Elastické popruhy	Elastické popruhy musí být bez trhlin, roztřepených okrajů, stop od spálení, nebo jiných známek opotřebení.		
7	Spony	Přezky nejsou poškozené ani prasklé.		
8	Návod k použití	Návod k použití je k dispozici. Před použitím si návod pečlivě přečtete a uschovejte pro budoucí použití.		
Výsledky kontroly		☐ Schváleno ☐ Zamítnuto		

Kontrolu provedl:

Podpis kontrolora: